

## 1. Общие сведения.

1.1 Шкаф медицинский металлический (далее по тексту шкаф), предназначен для хранения медицинских принадлежностей.

## 2. Техническая характеристика.

Таблица 1

Обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм		
	ширина	глубина	высота
ШММ-1	555	320	1680
ШМС-1	555	320	1680
ШММ-1 с трейзером	555	320	1680
ШММ-2	800	370	1680
ШМС-2	800	370	1680
ШММ-2 с трейзером	800	370	1680
ШММ-2 с трейзером	800	370	1680

Таблица 2


Обозначение шкафа	Верхнее отделение			Нижнее отделение		
	Кол-во створок	Кол-во полок	Материал створок и полок	Кол-во створок	Кол-во полок	Материал створок и полок
ШММ-1	1	3	металл	1	1	металл
ШМС-1	1	3	стекло	1	1	металл
ШММ-1 с трейзером	1	1+трейзер	металл	1	1	металл
ШММ-2	2	3	металл	2	1	металл
ШМС-2	2	3	стекло	2	1	металл
ШММ-2 с трейзером	2	3	стекло	2	1	металл
ШММ-2 с трейзером	2	1+трейзер	металл	2	1	металл

- 2.1. Шкаф изготовлен из холодно-катанной, листовой стали. Конструкция шкафа цельносварная. Окрашен порошковой краской белого цвета. Шкаф доставляется в собранном виде, в стрейч пленке и гофрокартоне.
- 2.2. Конструкция шкафа обеспечивает запирание верхнего и нижнего отделения индивидуальными механическими замками (за исключением шкафов ШМС-1, ШМС-2 и ШМС-2 с трейзером - только нижнего отделения).
- 2.3. Верхние стеклянные створки запираются при помощи магнитной защелки (только для шкафов ШМС-1, ШМС-2, ШМС-2 с трейзером).
- 2.4. Нагрузка на металлическую полку не должна превышать 15кг.
- 2.5. Нагрузка на стеклянную полку не должна превышать 5кг.

2.6. В верхнем отделении шкафа ШММ-2 с трейзером имеются два запираемых трейзера, а в ШММ-1 с трейзером один запираемый трейзер в верхнем отделении.

2.7. Возможно изготовление шкафов со стеклянными створками и полками нижнего отделения (без замков).

2.8. Возможно изготовление стеклянных створок в алюминиевом обрамлении и выдвигаемых ящиков на телескопических направляющих, установление регулируемых опор (высотой 50 мм).

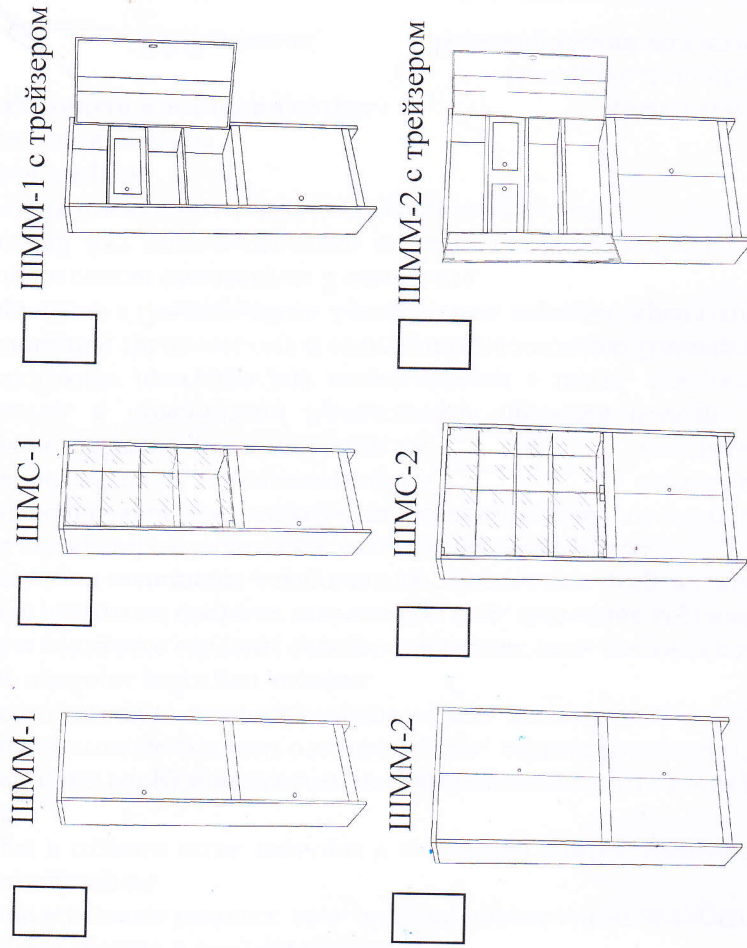

## 3. Комплект поставки.

Обозначение шкафа	Ключи от створок верхнего отделения	Ключи от створок нижнего отделения	Полки стеклянные	Створки стеклянные	Фурнитура для стеклянных створок	Ключи от трейзера	Паспорт
ШММ-1	1 компл.	1 компл.	-	-	-	-	1 экз.
ШМС-1	-	1 компл.	3 шт.	1 шт.	1 компл.	-	1 экз.
ШММ-1 с трейзером	1 компл.	1 компл.	-	-	-	1 компл.	1 экз.
ШММ-2	1 компл.	1 компл.	-	-	-	-	1 экз.
ШМС-2	-	1 компл.	3шт.	2 шт.	2 компл.	-	1 экз.
ШММ-2 с трейзером	-	1 компл.	3шт.	2 шт.	2 компл.	2 компл.	1 экз.
ШММ-2 с трейзером	1 компл.	1 компл.	-	-	-	2 компл.	1 экз.

## ПАСПОРТ


### Шкаф

ШМС-1, ШММ-1,

ШММ-1 с трейзером,

ШМС-2, ШМС-2 с трейзером

ШММ-2, ШММ-2 с трейзером

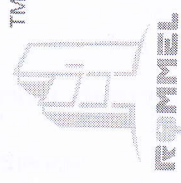

Нижний Новгород

#### 4. Инструкция по сборке шкафов ШМС

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить пластмассовые втулки в отверстия под петли на корпусе шкафа.
- 4.3. Установить петли стеклянных створок в пластмассовые втулки. При этом крепежные винты должны быть внутри.
- 4.4. Во внутрь петель вложить пластмассовые вкладыши. Со стороны крепежных винтов вложить металлические вкладыши.
- 4.5. Вставить стеклянную створку в петлю между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между створкой и каркасом шкафа. Затянуть крепежные винты, для надежной фиксации стекла в петлях.
- 4.6. Установить на место магнитный держатель и закрепить его винтами.
- 4.7. Вложить пластиковый вкладыш в ручку. Вставить ручку в нижнюю кромку стеклянной створки напротив магнитного держателя.
- 4.8. Уложить стеклянные полки на полкодержатели в верхней части шкафа.

#### 5. Свидетельство о приемке.

- 5.1. Шкаф соответствует рабочим чертежам и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления



Контролер ОТК

#### 6. Гарантия изготовителя.

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа в течение 12 месяцев со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 6.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафа не ухудшающих его потребительских свойств.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, изготовитель ответственности не несёт.

Изготовитель: Россия г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.21/2,  
помещение ПЗ, ООО «Мебель-Групп»  
Тел./факс (831) 439-39-36, 430-52-27

E-mail: [151@151.ru](mailto:151@151.ru)

web-сайт: [www.151.ru](http://www.151.ru)

[www.Rommel.ru](http://www.Rommel.ru)