

# **MET AVK GK 02**

**Кресло-кровать медицинская акушерская гинекологическая**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)**



\*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

\* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.


## 1. Правила безопасности

- Если в кресле обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Рекомендуемая непрерывная нагрузка не должна превышать 2 минуты, интервалы между нагрузками - не менее 5 минут.
- Кресло должно быть зафиксировано во время работы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Крепко фиксируйте подлокотники и опоры для ног, дабы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.
- При проведении технического обслуживания или очистки кресло должно быть отключено от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кресла отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кресла.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

## 2. Технические характеристики

Длина / ширина кресла в разложенном виде	1780 x 1000 мм
Длина / ширина ложа	1780 * 600 мм
Высота ложа / сиденья	610 - 810 мм
Угол наклона спинной секции	0 - 70 градусов
Угол наклона сиденья	0 - 12 градусов
Угол наклона Антитренделенбург	0 - 7 градусов

## 3. Управление функциями кресла при помощи пульта управления

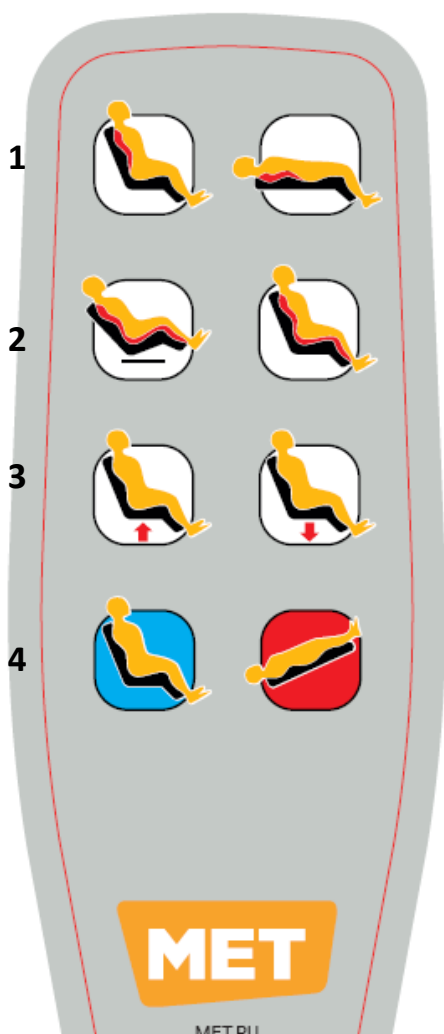

1, 5. Регулировка спинной секции

2, 6. Одновременная регулировка спинной и ножной секции

3, 7. Регулировка высоты

4. Приведение кресла в сидячее положение с минимальной высотой для начала или окончания осмотра – одновременным нажатием двух педалей

8. Положение тренделенбург



При обнаружении сбоев в двигателе, блоке управления или пульте управления, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

#### **4. Условия использования**

- Температура воздуха: от 5°C до 40°C, относительная влажность: не более 80%.
- Требование по электропитанию: ~220 В±10%, 50 Гц±1Гц, входная мощность: 90 В-А.
- Не используйте оборудование в огнеопасной среде, содержащей огнеопасный анестезирующий газ, кислород или закись азота.

#### **5. Очистка и дезинфекция**

Перед очисткой кресло должно быть приведено в удобное положение и отключено от электросети.

- Выполняйте очистку и дезинфекцию обивки гинекологического кресла с помощью 20% раствора спирта, смешанного с 2% глутаральдегида.
- Возможна дезинфекция кресла с помощью ультрафиолетового излучения.
- После окончания эксплуатации произведите очистку кресла и оботрите его насухо, чтобы исключить попадание жидкости во внутренние электрические компоненты.

#### **6. Техническое обслуживание**

Поскольку некоторые части кресла могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов не реже 1 раза в 6 месяцев:

1. Шнуры и штифты регулируемых секций – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
2. Моторные поршни – протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Регулярно проверяйте целостность соединительного провода панели управления.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кресла и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

#### **7. Комплект поставки:**

- гинекологическое кресло – 1 шт.;
- лоток из нержавеющей стали – 1 шт.;
- держатель для рук – 2 шт.;
- опора по Геппелю – 2 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

**Гарантия не распространяется на следующие неисправности:**

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).
- 

**Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.**

**Покупатель:** \_\_\_\_\_

**Срок гарантии:** 12 месяцев

**Дата продажи:** \_\_\_\_\_

**М.П.**

**Продавец:** \_\_\_\_\_

*Кресло-кровать медицинская акушерская гинекологическая AVK GK 02  
регистрационное удостоверение РЗН 2020/18282 от 19 сентября 2022 года;  
срок службы изделия – не менее 5 лет;*

*Производитель: ООО "МЕТ", Россия, Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), д/д. 4, стр.2, эт.5, блок Г*

*Сервисный центр: ООО «МЕТ»  
142784, Город Москва, Киевское ш. 22й км. (п. Московский), д/д. 4, стр.2, эт.5, блок Г  
На расходные материалы гарантийные обязательства не распространяются.*

*Телефон сервисной службы: +7 (499) 288-48-81*