

ПАСПОРТ

Ветеринарный стол СВ-4



wiki⁺vet
СДЕЛАНО В РОССИИ

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2. ОПИСАНИЕ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ	6
6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ	7
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ...	8
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	8
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	9
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	10

Ветеринарный стол СВ-4

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Ветеринарный стол СВ-4 (далее изделие) предназначен для проведения процедур, осмотров и обследований в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб квадратного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

2.3. Материал столешницы – нержавеющая сталь.

2.4. Столешница имеет рейлинги по краям для фиксации животных во время оперативных вмешательств.

2.5. Высота стола не регулируется.

2.6. В ножках стола находятся регулируемые опоры, которые позволяют компенсировать неровности пола.

2.7. Изделие поставляется в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина стола, мм	1300-1450
Ширина стола, мм	600
Высота стола, мм	850
Масса стола, кг	25±0,5
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100±5

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К сборке изделия допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно собираться и эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляется в разобранном виде в составе

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Столешница	1	
2	Стойка	2	
3	Распорка угловая 1	1	
4	Распорка угловая 2	1	
5	Регулируемая опора	4	
6	Болт М8х20	12	
7	Шайба М8	12	
8	Паспорт	1	-
9	Схема сборки	1	-

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

- 6.1. После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.
- 6.2. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия и проверить комплектность.
- 6.3. Собрать изделие согласно схеме сборки.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксимед, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

7.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

7.3. Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

7.4. Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и подрегулированные высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

7.5. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ветеринарный стол СВ-4

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации

Дата выпуска ____ / _____ /20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
медицинской
техники Ветеринарный стол СВ-4
(наименование
и тип)

Серийный
номер _____

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»
155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2
Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____ / ____ / 20 ____ г.

М.П. _____
(подпись, штамп торгующей организации)

СХЕМА СБОРКИ Ветеринарный стол СВ-4

- 1) Аккуратно разобрать комплект стола;
- 2) Установить стойки (ножки) (2,3) на каркас: стойку 1 установить на сторону 1, стойку 2 установить на сторону 2;
- 3) Совместить отверстия стоек и каркаса и закрепить с помощью крепежа (7,8);
- 4) Установить распорки угловые (4,5) между столешницей и стойками: распорку угловую 1 к стойке 1 со стороны столешницы 1, распорку угловую 2 - к стойке 2 со стороны столешницы 2;
- 5) Совместить отверстия угловых распорок, основных стоек и столешницы и закрепить с помощью крепежа (7,8,9);
- 6) Вкрутить в основные стойки регулируемые опоры (6);
- 7) Установить столешницу (1) на стойки: стороной столешницы 1 на стойку 1, стороной столешницы 2 на стойку 2;
- 8) Совместить отверстия стоек и столешницы и закрепить с помощью крепежа (8,10);
- 9) Отрегулировать устойчивость стола с помощью регулируемых опор.

Спецификация к схеме для сборки:

№	Наименование детали	Количество, шт
1	Столешница	1
2	Стойка 1	1
3	Стойка 2	1
4	Распорка угловая 1	1
5	Распорка угловая 2	1
6	Регулируемая опора	4
7	Болт М8х20	12
8	Шайба М8	12

