

ПАСПОРТ

Светильник ветеринарный хирургический светодиодный напольный wikiVET



2024 г.

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальный хирургический светильник. Стальная консоль на колесной основе и мощные светодиодные прожекторы – это надежность и простота. Светильник оснащен регулировкой наклона по осям X-Y, а также регулировкой высоты стойки. Регулировка высоты стойки (вертикальной консоли) от пола: 142 - 185 см. Светильник состоит из 4 прожекторов мощностью 50 Вт с 36 диодами в каждом. Прожектор светильника имеет характеристики: Свет белый 6500K / Светоотдача 50Гц/Класс IP: 65.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество, шт.	Изображение
1	Основание - опора с колесами (2 колеса с тормозом + 2 колеса без тормоза)	1	
2	Вертикальная стойка с фиксатором	1	
3	Верхний часть светильника с лампой (горизонтальная консоль)	1	
4	Паспорт	1	-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Светильник поставляется в упаковке в сложенном виде с необходимой комплектацией. Необходимо распаковать изделие и приступить к сборке. **При поставке часть фиксирующих болтов может быть уже прикручена.*

1 Расположите опору с колесами на ровной поверхности и прикрепите вертикальную стойку при помощи болтов, зафиксируйте.


2 Вставьте верхнюю часть светильника с лампой в вертикальную стойку и зафиксируйте на нужной для работы высоте при помощи фиксатора с пластиковой рукояткой.

3 Светильник готов к работе. При необходимости можно перемещать по горизонтали верхний кронштейн светильника для удобства работы, а также регулировать угол наклона подачи света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметры
Длина опоры, см	120
Ширина опоры, см	70
Длина верхней горизонтальной консоли, см	80
Ширина светильника - каркас лампы, см	19
Длина светильника - каркас лампы, см	57
Длина провода, м	4
Материал корпуса	Стальная труба с полимерно-порошковым покрытием
Общая мощность ламп светильника, W	200
Страна производства	Россия
Вес светильника	~20 кг

Подробную схему сборки
можно посмотреть здесь

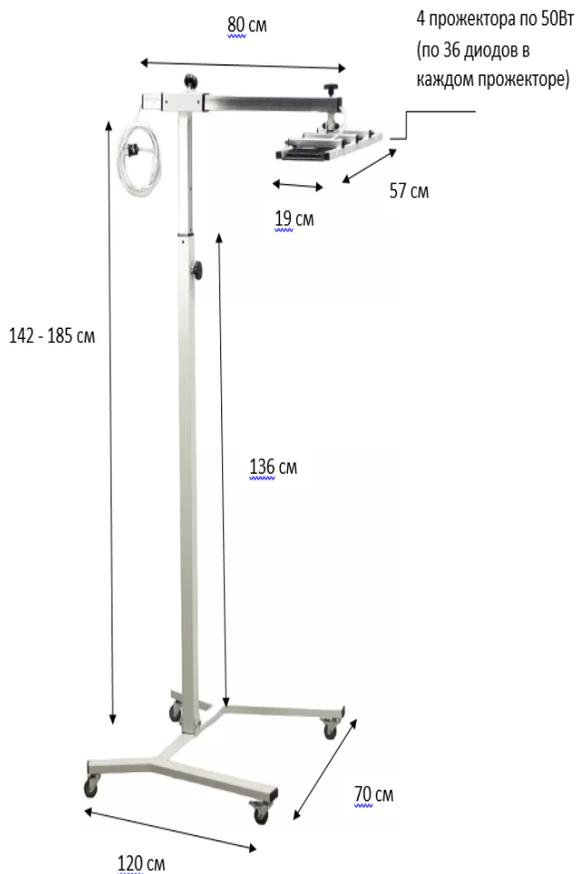

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2

Контакты отдела рекламации: + 7 (499) 444 69 48, otdrekl@yandex.ru

Дата продажи _____/_____/20 _____ г.

М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)