

**1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1 Кровать медицинская (далее по тексту — кровать) предназначена для использования в палатах медицинских учреждений.
- 1.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.2.1. Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Параметры                          | КФО-01- «МСК»<br>(МСК-132) |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Габаритные размеры, мм, ±5% мм  |                            |
| Длина                              | 2000                       |
| Ширина                             | 840                        |
| Высота                             | 760                        |
| 2. Размеры ложа, мм, ±5% мм        |                            |
| 1900x800                           |                            |
| 3. Угол наклона подголовника, град |                            |
| 0 — 45                             |                            |
| 4. Масса, кг, не более             |                            |
| 30                                 |                            |

- 2.2. Характеристики:
- 2.2.1. Кровати изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, листового металла и металлической сетки.
- 2.2.2. Кровать выдерживает статическую равномерно распределенную по ложу нагрузку не более 130 кг.
- 2.2.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой оксидно-полиэфирной «МЕДЛИАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
- 2.2.4. Поверхности кровати устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки кровати соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование      | КФО-01- «МСК»<br>(МСК-132) |
|-------------------|----------------------------|
|                   | Кол-во, шт.                |
| Ложе              | 1                          |
| Спинка            | 2                          |
| Болт М6х16        | 12                         |
| Гайка М6          | 12                         |
| Шайба пружинная 6 | 12                         |
| Матрац с чехлом*  | 1                          |
| Опора             | 8                          |
| Руководство       | 1                          |

\* - комплектуется по согласованию с заказчиком.

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Кровать представляет собой сборно-разборную конструкцию.
- 4.2. Ложе кровати изготовлено из стального П-образного профиля и металлической сетки толщиной 4 мм с размером ячейки 50x50 мм.
- 4.3. Спинки изготовлены из стального профиля круглого сечения.
- 4.4. Угол наклона подголовника регулируется при помощи зубчатой рейки.

**5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

**6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ**

- 6.1. После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

**7. ПОРЯДОК СБОРКИ**

- 7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего руководства.
- 7.2. Прикрепите ложе к спинкам болтами М6х16. Установить опоры в спинки.
- 7.3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов. Установите кровать на место.

**8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кровати, проверку исправности подъемных механизмов, а также при необходимости смазку подвижных соединений.
- 8.2. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

**9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 9.1. Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
- 9.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем руководстве.
- 10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 10.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика.
- 10.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.
- 10.5. Средний срок службы 6 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

**11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Кровать медицинская общебольничная (с подголовником) КФО-01- «МСК»(МСК-132) \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ М. П.

Соответствует ТУ 9452-001-52962725-01 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_ (Хабибуллин Р.Р)

**12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Изделие \_\_\_\_\_ на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»  
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)292-26-00

