

Адрес изготовителя:

Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г
ООО «Айболит-2000»
Тел. (831) 468-06-73
Факс (831) 417-89-98, 468-86-60

Дата изготовления _____

ОТК _____

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил и условий эксплуатации изделие будет долго служить Вам.

**ООО «Айболит-2000»
Производство медицинской мебели**

ПАСПОРТ

**Стол массажный регулируемый
СМ-4-«Айболит»
с фиксированной головной,
промежуточной, ножной секциями и 4-мя
подлокотниками**

ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-012-51768895-2007

г. Нижний Новгород

1. Назначение

Стол массажный регулируемый СМ-4 (в дальнейшем стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений, косметологических и массажных кабинетов.

2. Комплект поставки

Стол массажный регулируемый – 1
Паспорт - 1

3. Инструкция по сборке

- 3.1. Распаковать стол. Снять транспортировочные распорки из трубы (4 шт).
- 3.2. Подсоединить пульт управления к блоку управления штекером.

4. Правила эксплуатации

- 4.1. Механизм «**Rastomat**»: при опускании сначала довести секцию до крайнего верхнего положения и опустить на необходимый угол.
- 4.2. **Электропривод питание от сети 220V**, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- 4.3. **Не допускать попадания воды на электропривод.**

5. Правила ухода

- 5.1. Стол эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 10⁰С до 35⁰ С и относительной влажностью воздуха до 80% при 25⁰С .
- 5.2. Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в медицинских учреждениях растворителей, щелочей и кислот.
- 5.3. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 6.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.