
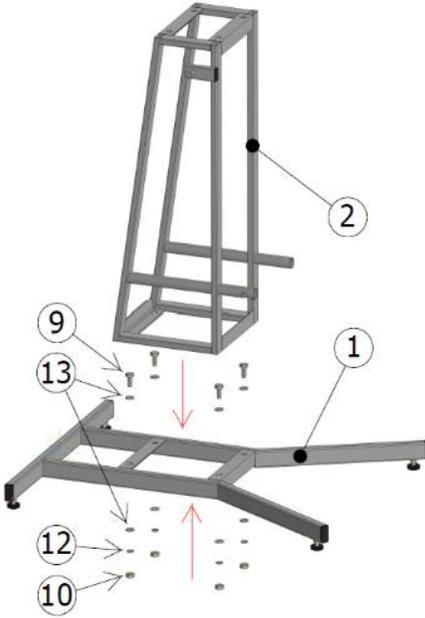
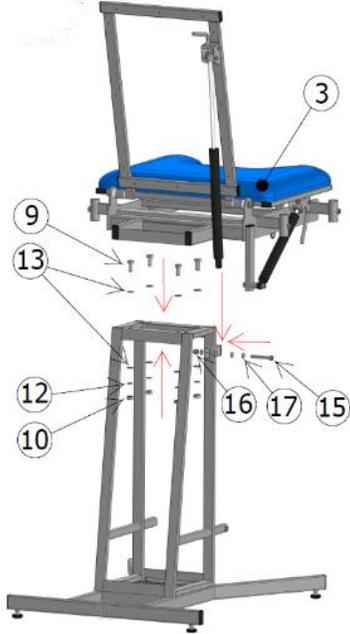
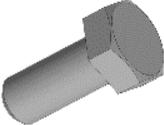
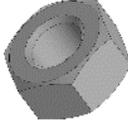


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское»

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|
| <p>1</p>  <p>1 шт</p> | <p>2</p>  <p>1 шт</p> | <p>3</p>  <p>1 шт</p> | <p>4</p>  <p>1 шт</p> | <p>5</p>  <p>2 шт</p> | | |
| <p>1 шаг</p>  | | <p>2 шаг</p>  | <p>7</p>  <p>2 шт</p> | <p>9</p>  <p>M10x25 8 шт</p> | <p>10</p>  <p>M10 8 шт</p> | <p>11</p>  <p>6 шт</p> |
| | | <p>12</p>  <p>10Л 8 шт</p> | <p>13</p>  <p>C.10 16 шт</p> | <p>14</p>  <p>3,5x25 10 шт</p> | | |
| | | <p>8</p>  <p>1 шт</p> | <p>15</p>  <p>M8x50 1 шт</p> | <p>16</p>  <p>M8 1 шт</p> | <p>17</p>  <p>C.8 3 шт</p> | |

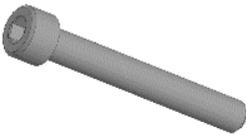

Шаг 1. Монтаж стойки поз.2 выполнить на основание поз.1, которое необходимо предварительно установить на твердую ровную поверхность, при помощи соответствующего крепежа: болт поз.9, гайка поз.10, шайба пружинная поз.12, шайба поз.13.

Шаг 2. Каркас сиденья поз.3, идущий в сборе с рамой спинки, рамой сиденья, мягким сиденьем и пневмопружинами, монтировать на верхнюю часть стойки поз.2, ранее установленную на основание поз.1 (см. шаг 1), посредством крепежа: болт M10x25 поз.9, гайка поз.10, шайба пружинная поз.12, шайба поз.13. Также, при установке каркаса сиденья, выполнить монтаж пневмопружины рамы спинки при помощи крепежных изделий: винт M8x50 поз.15, гайка самостопорящая поз.16 и набора шайб поз.17.

Шаг 3. Мягкую спинку поз.4, со стороны фанеры, закрепить на раму спинки, входящую в состав подсборки поз.3, при помощи винтов самонарезающих с прессшайбой поз.14. Мягкую спинку следует позиционировать относительно рамы спинки следующим образом: по горизонтали - симметрично относительно рамы спинки; по вертикали, таким образом, как изображено на поперечном сечении узла крепления рамы спинки к раме сиденья (см. рис.1.).

Шаг 4. Выполнить монтаж подсборки поз.5 (упор подколенный) на держатель поз.7 из нерж. стали, посредством затяжки винта M4x8, входящего в состав подсборки поз.5 (см. изображение шага 4).

Шаг 5. Сборку из держателя поз.7 и упоров подколенных поз.5 (2 шт.), выполненную на шаге 4, установить в соответствующие приварные кронштейны рамы сиденья (см. изображение шага 5), с последующей фиксацией держателя с помощью резьбовой зажимной ручки поз.11.

Шаг 6. Ручки-подлокотники поз.6 установить в соответствующие кронштейны рамы сиденья, с последующей их фиксацией резьбовыми зажимными ручками поз.11 (см. изображение шага 6).

Шаг 7. Монтаж выдвижной ступени на колесных опорах поз.8 выполнить путем вставки двух опорных элементов (нерж. круглых труб) в соответствующие трубные приварные направляющие, входящие в конструктив стойки поз.2, с последующей фиксацией ступени при помощи резьбовых зажимных ручек поз.11 (см. изображение шага 7).

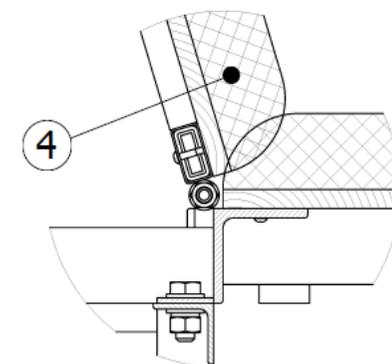


Рис.1

