

МЕТ KR 07 Акушерская гинекологическая кресло-кровать

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	стр. 3
1.1.	Поставка	стр. 3
1.2.	Перемещение кровати	стр. 3
2.	Правила безопасности	стр. 3
3.	Условия использования	стр. 4
4.	Технические характеристики	стр. 4
5.	Кровать в деталях	стр. 5
6.	Установка кровати	стр. 5
7.	Управление функциями кровати	стр. 6
7.1.	Положение Тренделенбург / Антитренделенбург	стр. 7
7.3.	Положение сердечно-легочной реанимации	стр. 7
8.	Положения кровати	стр. 8
8.1.	Регулировка спинной секции	стр. 8
8.2.	Регулировка икроножной секции	стр. 8
8.3.	Регулировка высоты	стр. 8
9.	Спинка кровати	стр. 9
10.	Боковые ограждения	стр. 9
11.	Колеса	стр. 9
12.	Очистка и дезинфекция	стр. 10
13.	Решение проблем, возникших при эксплуатации	стр. 10
14.	Хранение	стр. 11
15.	Техническое обслуживание	стр. 11
16.	Комплект поставки	стр. 11
17.	Гарантийные обязательства	стр. 12

1. Введение

Данная модель кровати предназначена для использования в родильных отделениях медицинских учреждений.

Кровать изготавливается в соответствии с международными стандартами (TS EN 60601-2-38). Наша компания работает в соответствии с нормами Системы менеджмента качества ISO 9001: 2008 и нормами медицинских изделий ISO 13485.



Чтобы правильно использовать данную кровать, внимательно прочитайте руководство пользователя перед ее использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока эксплуатации Вашей кровати.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кровати важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности.

1.1. Поставка

Наши кровати поставляются полностью смонтированными или разобранными на несколько частей. Перед использованием изделия вся кровать должна быть полностью собрана. Если в комплектации кровати отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы должны немедленно письменно известить производителя / поставщика.

1.2. Перемещение кровати

Колеса кровати не должны быть заблокированы во время перемещений. Колеса предназначены для использования в закрытых помещениях и должны перемещаться по гладкой и чистой поверхности. Перемещения по неровному или загрязненному полу могут привести к повреждению колес.

2. Правила безопасности

- Перед использованием кровати внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Если в кровати обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Используйте самое низкое положение ложа кровати во время реанимационных процедур.
- Если Вы не планируете перемещать кровать, ее колеса должны быть заблокированы, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Высота кровати должна регулироваться в зависимости от состояния пациента.
- Недопустимо создавать дополнительную нагрузку на кровать во время нахождения на ней пациента – например, сидение на ней еще одного человека недопустимо.
- При использовании функций кровати не допускайте зажимания ее элементами пациента или других лиц.
- Если инфузионная стойка закреплена на ложе кровати, а кровать находится в положении

Тренделенбург, необходимо оставить достаточное пространство между кроватью и стеной, дабы избежать поломки или деформации стойки или ложа.

- При проведении технического обслуживания или очистки кровать должна быть отключена от электросети.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- При перемещении кровати отсоедините вилку электропитания от сети. Во избежание повреждения кабеля избегайте его контакта с полом.
- Если кровать перемещается вместе с пациентом, ограждения должны быть подняты и зафиксированы.
- Следите, чтобы силовые кабели не попадали в движущиеся части кровати.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате сбоев электрической сети.

3. Условия использования


Кровать предназначена для использования в медицинских целях. Электрическая сеть, к которой подключена вилка питания кровати, должна соответствовать условиям использования (AC 230 V 50 Hz).

4. Технические характеристики

Габариты кровати	176*69*175 см
Регулировка высоты и наклона ложа TR	до 18 градусов
Угол наклона икроножной секции	-90-0 градусов
Угол наклона спинной секции	0-70 градусов
Тренделенбург / Антитренделенбург	70/70 градусов
Собственный вес, кг	107 кг

5. Кровать в деталях



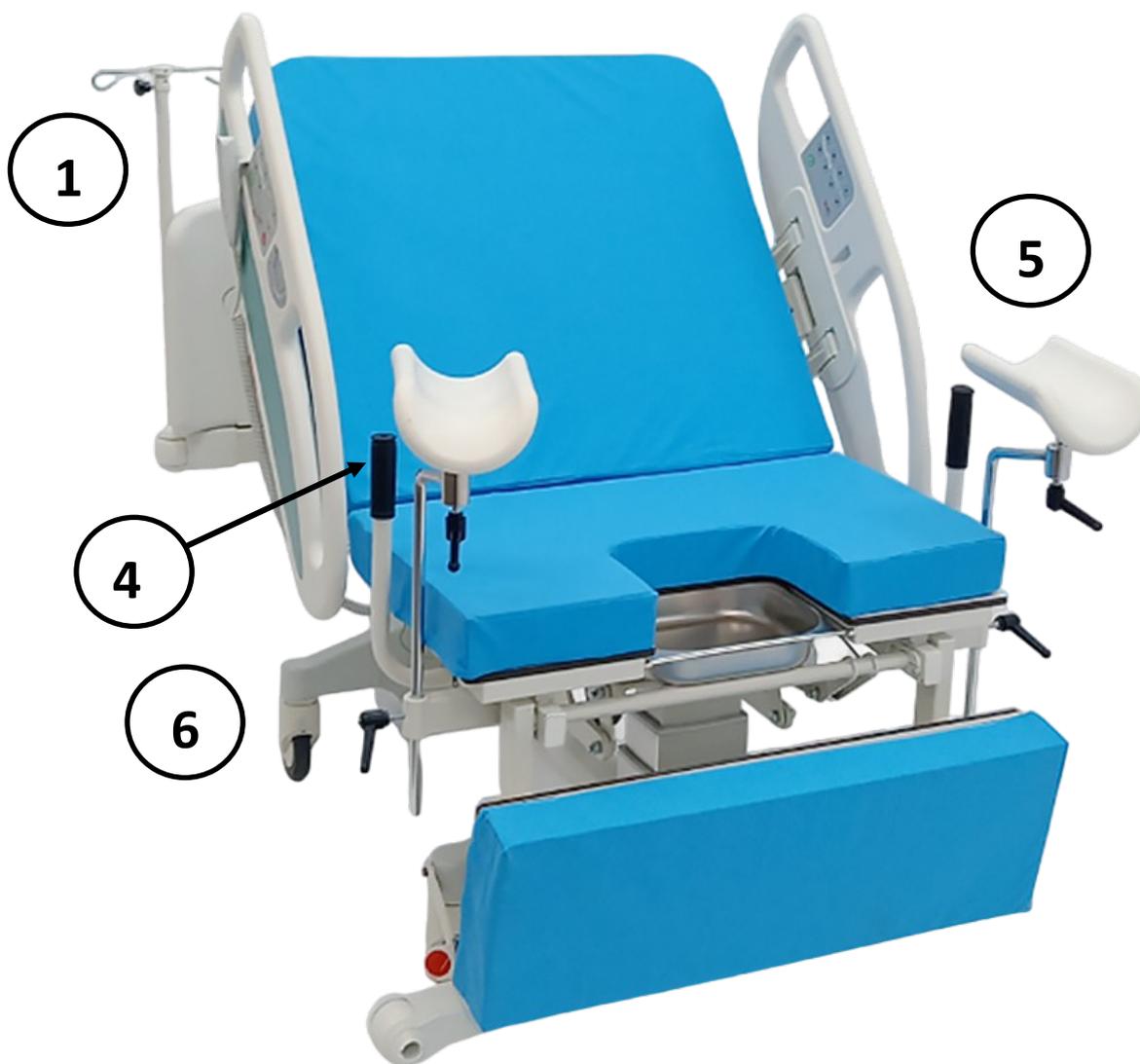

1. Головная спинка
2. Ложе кровати
3. Боковые ограждения
4. Рукоятки для роженицы
5. Опоры для ног
6. Колеса

6. Установка кровати

1. Проверьте кровать на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
2. Внимательно прочитайте руководство пользователя.
3. Проверьте управление функциями кровати при помощи панели управления медсестры.
4. Проверьте работу механизма блокировки колес.
5. Проверьте, блокируются ли боковые ограждения в поднятом положении.
6. Проверьте полноту комплектации, если были заказаны опции.



Перед перемещением кровати всегда проверяйте колеса и, если колеса заблокированы, разблокируйте их.




Если во время установки обнаружены какие-либо неисправности или повреждения, не пользуйтесь кроватью и уведомьте о них производителя.

7. Управление функциями кровати

Кровать управляется с помощью пульта на шнуре, который можно повесить на боковые ограждения, а также с помощью двухсторонних кнопочных панелей, встроенных в боковые ограждения.




Пульт

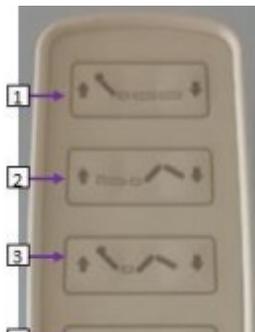

1. Спинная секция: вверх-вниз движения
2. Бедренная секция: вверх-вниз движения
3. Положение Фаулера: вверх-вниз движения
5. Кнопка движения АнтиТренделенбурга/Тренделенбурга


Панель управления для персонала

1. Поднятие/опускание головной секции
2. Поднятие/опускание бедренной секции
3. Регулировка высоты
4. Положение Фаулера
5. Тренделенбург одной кнопкой
6. Антитренделенбург одной кнопкой
7. Шоковое положение
8. Положение сердечно-легочной реанимации (CPR)

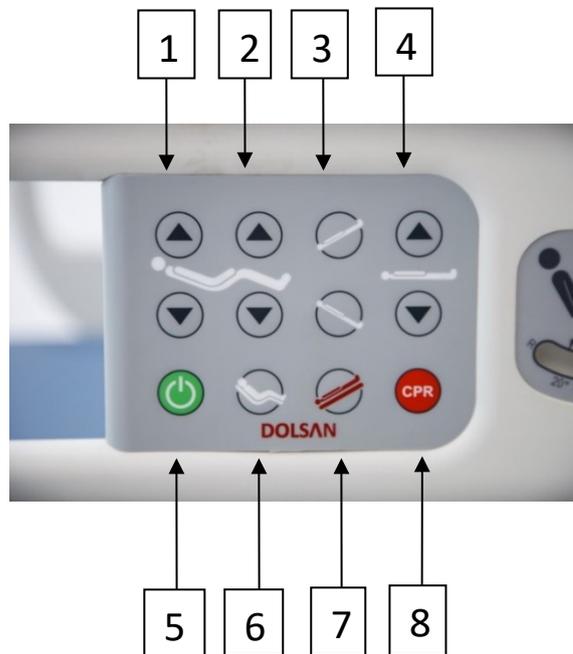


Панель управления для пациента

1. Регулировка спинной секции
2. Регулировка бедренной секции
3. Одновременная регулировка спинной и бедренной секций ложа
4. Регулировка высоты
5. Кнопка включения / выключения панели управления

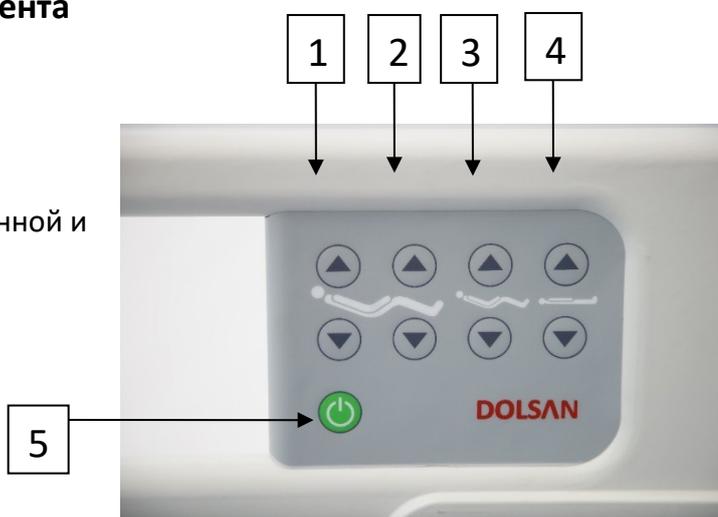

7.1. Положение Тренделенбург / Антитренделенбург

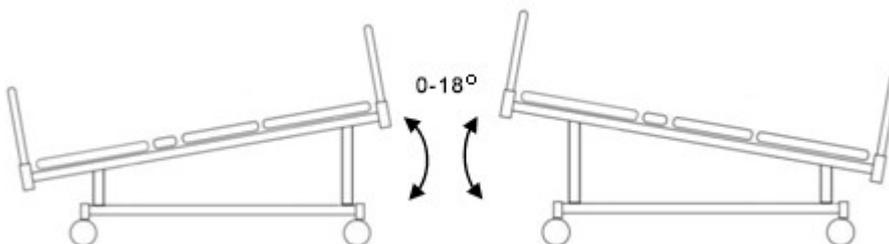


Регулировка высоты и наклона ложа TR до 18 градусов - с помощью двух независимых электроактуаторов.

7.2. Положение сердечно-легочной реанимации

Возможность быстрого мануального опускания изголовья в горизонтальное положение для CPR.

8. Положения кровати

8.1. Регулировка спинной секции

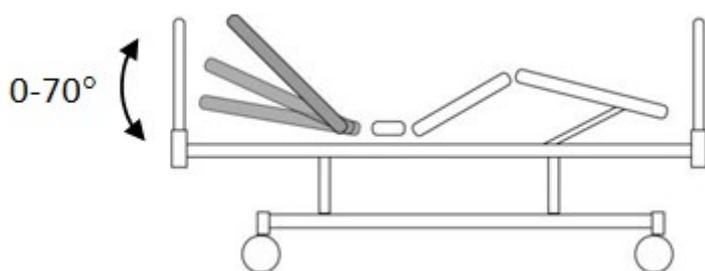


Спинная секция ложа может быть поднята до 70 градусов при помощи электропривода с панели управления медсестры.

8.2. Регулировка икроножной секции


Регулировка положения опускающейся до -90 градусов икроножной секции - с помощью электроактуатора.

8.3. Регулировка высоты

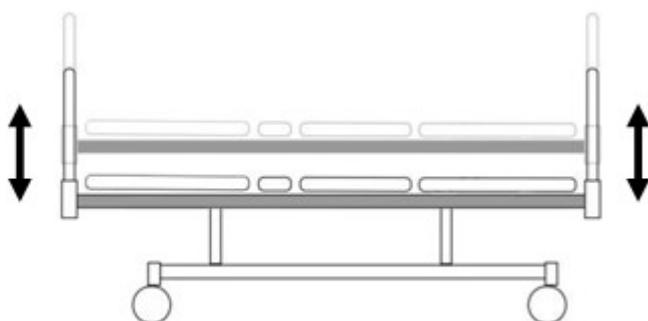

Регулировка высоты кровати и положения TR осуществляется посредством электроприводов.

8.4. Удлинение ложа (опция)

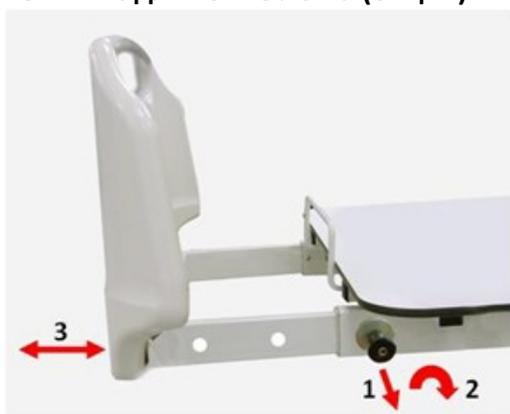

Конструкция кровати предусматривает возможность удлинения ложа на 20 см.

Для того чтобы удлинить ложе, оттяните фиксаторы (1), находящиеся с обеих сторон икроножной секции, проверните их (2) и выдвиньте направляющие (3).

9. Спинка кровати



Спинка кровати легко очищаемая, двухслойная, изготавливается из прочного пластика, легко монтируется и снимается.

Спинка кровати легко очищаемая, двухслойная, изготавливается из прочного пластика, легко монтируется и снимается.

10. Боковые ограждения


Боковые ограждения из АБС-пластика с интегрированными транспортирами для визуального контроля.



Если пациент без сознания или находится в вертикальном положении, убедитесь, что боковые ограждения зафиксированы.

11. Колеса

Бесшумные самоориентирующиеся колёса с широкими противопылевыми колпаками, диаметром 150 мм.

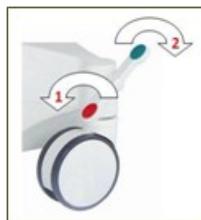

Когда красно-зеленая цветная педаль доведена до положения параллельно полу, все колеса будут в свободном положении. Если нажать педаль ногой в направлении стрелки номер 2, блокировка колес активируется, а одно из передних колес будет заблокировано параллельно кровати. При нажатии ногой на педаль в направлении стрелки номер 1, система центрального тормоза активируется, и все колеса блокируются.



Нельзя перемещать кровать, если колеса заблокированы. Если нет необходимости передвигать кровать, колеса должны быть заблокированы, дабы снизить риск травмы пациента.

12. Очистка и дезинфекция



При очистке кровати используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте чистящие вещества, которые могут привести к коррозии элементов кровати.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, которые могут повредить пластиковые элементы кровати.

Перед очисткой, для облегчения доступа к нижней части ложа кровать должна быть приведена в соответствующее положение и отключена от электросети.

13. Решение проблем, возникших при эксплуатации

Проблема	Причина проблемы	Решение проблемы
Функции кровати не работают	Кнопки блокировки на панели управления медсестрой неактивны	Активируйте соответствующую кнопку блокировки
Функции кровати не работают	Кабель не подключен к электросети	Проверьте, вставлена ли вилка электропитания в розетку
Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети и функции на панели управления медсестры активны	Возможно, произошел сбой электросети и кровать начала работать от аккумулятора. Ваш аккумулятор разрядился.	Зарядите аккумулятор при первой возможности. Это может понадобиться вам в чрезвычайных ситуациях.
Функции кровати не работают, даже если кровать подключена к электросети и функции на панели управления медсестры активны и аккумулятор заряжен	Соединительные кабели двигателя, ручного управления и панели управления медсестры, возможно, вышли из разъемов.	Проверьте, подключены ли кабели к разъемам.



Если произойдут какие-либо сбои в двигателе, блоке управления, ручном управлении и панели управления медсестрой, не пытайтесь ремонтировать их самостоятельно. Электрические элементы, вскрытые кем-либо кроме нашего технического персонала, будут исключены из сферы действия гарантии

14. Хранение

- Приведите кровать в самое низкое горизонтальное положение.
- Отключите кровать от электросети.
- Опустите боковые ограждения.
- Отсоедините инфузионную стойку.
- Упакуйте в подходящий упаковочный материал.

15. Техническое обслуживание

Поскольку некоторые части кровати могут изнашиваться в процессе использования, очистки и дезинфекции, проводите визуальный осмотр следующих элементов кровати не реже одного раза в 6 месяцев:

1. Соединения и штифты боковых ограждений.
2. Шнуры и штифты регулируемых секций кровати - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
3. Моторные поршни - протрите и смажьте силиконовой смазкой.
4. Правильность и плавность хода поворотов бокового ограждения.

Иные процедуры технического обслуживания - это квалифицированная работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи профессионального сервиса.

Если вы обнаружили неисправности или несоответствия во время технического обслуживания, прекратите использование кровати и немедленно свяжитесь с производителем или поставщиком.

16. Комплект поставки:

- кровать – 1 шт.;
- эксплуатационная документация – 1 шт.

17. Гарантийные обязательства

Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения.
- Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования.
- Дефекты, возникшие в результате отклонения параметров питающих сетей от Государственных технических стандартов.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»).

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

Покупатель _____

Срок гарантии: _____ 24 месяца _____

Дата продажи: _____ м.п.

Продавец: _____