

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2 При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4 При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.30 офис 121

ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»

Тел./факс (8313)25-35-78

Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

Упаковщик _____

ПАСПОРТ СТУЛ

СТ 6 газ – лифт



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1 Стул предназначен для организации сидячего рабочего места в медицинских и других учреждениях.
- 1.2 Сиденье и спинка обтянуты винилискожей. Каркас изготовлен из металлической трубы покрытой методом порошковой покраски. Кресло регулируется по высоте с помощью пневматического устройства. Установлен на 5- лучевую опору с колесами.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	Высота до сиденья	
600-810	480	430-540	13

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование(размеры),мм.	Кол-во,шт.
3.1	Опора аппаратная	5
3.2	Пятилучье	1
3.3	Газовый патрон	1
3.4	Маховик М8	1
3.5	Сидение	1
3.6	Спинка	1
3.7	Чехол газового патрона	1
3.8	Паспорт	1
3.9	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направление на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

- 4.1 Распаковать компоненты стула.
- 4.2 Установить в отверстия на пятилучье колеса и вставить газ-патрон в стакан, закрыв декоративным пластиковым чехлом.
- 4.3 Каркас спинки вставить в piaстру сидения и зафиксировать при помощи маховика. После установки спинки подтянуть шурупы крепления piaстры к сидению.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1 Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2 Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3 Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4 Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5 Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г. на 10л. Раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.