

# Паспорт

Кушетка

КМФ

## 7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.28 пом.34  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.supl.biz

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_



ГОСТ 16371-14

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.00841/21 от 8.04.2021 г.

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Кушетка предназначена для лежания 1 человека.
- 1.2. Ложе кушетки изготовлено из панелей ДСП, обитых поролоном, обтянутых винилискожей и закрепленных на каркасе. Каркас из двухстороннее ламинированной мдф 22 мм. Угол наклона панели подголовника может изменяться при помощи регулируемого упора «Rastomat».

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	длина	
530	600	2000	26

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Ложе с каркасом в сборе	1
3.2	Ножки в разборе, детали	6
3	3 Болт М8	8
3.4	Гайка М8	8
3.5	Шайба 8	8
3.6	Евровинт	8
3.7	Заглушка евровинта	20
3.8	Ключ	1
3.9	Паспорт	1
3.10	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

**Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.**

Для сборки потребуется гаечный ключ на 13 мм.

- 4.1. Распаковать компоненты кушетки.
- 4.2. Закрепить 4 ножки 3.2 на каркасе кушетки 3.1, для чего:
  - положить кушетку каркасом вверх;
  - приставить ножку изнутри в угол каркаса так, чтобы оба отверстия в ножке совпали с отверстиями в брусках каркаса;
  - вставить с наружной стороны каркаса болты 3.3 сквозь отверстия в каркасе и ножке;
  - надеть на резьбовые концы болтов шайбы 3.5 и навернуть гайки 3.4;
  - повторить операции для остальных ножек.

## 5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

