

ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2009/06531 от 3.11.2015 г.

КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ КН-1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) 2055000000 ПС



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед включением, регулировкой и эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Ковать для новорожденных КН-1 (в дальнейшем - кровать) предназначена для размещения новорожденных детей в родильных домах или детских лечебных учреждениях.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина	800 ± 30 мм
Ширина	500 ± 20 мм
Высота	980 ± 30 мм
Масса, не более	12 кг
Предельная рабочая нагрузка на кровать	12 кг
Углы наклона ванны-кюветы: - в сторону головы - в сторону ног	не менее 8° не менее 8°
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Кровать для новорождённых КН-1	1
<u>Съёмные части</u>		
2	Ванна-кювета	1
3	Матрац в чехле	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
4	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Акционерное общество
"Досчатинский завод медицинского оборудования"

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок "ДЗМО", здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Кровать согласно рисунка 1 состоит из каркаса 1, поворотной опорной рамки 2, в которую вставляется ванна-кювета 3 с матрасом 4. Каркас установлен на четыре колеса 5, два из которых с тормозами 6.

Ванна-кювета выполнена из прозрачного органического стекла. В одном торце ванны-кюветы имеется карман 7 для именной таблички. Чехол матраца выполнен из клеенки с полихлорвиниловым покрытием на тканевой основе. Фиксация угла наклона ванны-кюветы, как в сторону головы ребенка, так и в сторону ног осуществляется бесступенчато при помощи зажимного винта.

4.2. Подготовка к работе:

- распаковать кровать, очистить ее от упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом;
- проверить комплектность;
- проверить надежность резьбовых соединений и, при необходимости, подтянуть их;
- произвести санитарную обработку кровати.

4.3. Для установки ванны-кюветы в нужное положение необходимо:

- придерживая рукой опорную рамку 2 с установленной в ней ванной-кюветой 3, ослабить винт 8;

- придать ванне-кювете необходимое положение и зажимным винтом 8 зафиксировать.

4.4. Затормаживание колес производится нажатием ногой на педаль тормоза 6.

Растворение колес производится нажатием на противоположное плечо педали тормоза 6, приведя в исходное положение педаль.

4.5. Не допускается подвергать ванну-кювету, панель для пеленания и каркас кровати ударам о твердые предметы.

4.6. Перед помещением ребенка в кровать, колеса должны быть заторможены.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование кровати с неисправными тормозами, с ванной-кюветой, имеющей сколы и трещины.



1 - каркас; 2 - поворотная опорная рамка; 3 - ванна-кювета; 4 - матрас;
5 - колесо с поворотным кронштейном; 6 - тормоз колеса; 7 - карман;
8 - винт зажимной

10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.

10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:

- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.

2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.

3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Кровать для новорожденных

КН-1

Наименование изделия

Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается в проверке и подтяжке резьбовых соединений; замене, при необходимости, годными деталями; смазке раз в год подшипников колес любой консистентной смазкой; промывке моющими растворами и санитарной обработке кровати.
- 5.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кровати, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего руководства по эксплуатации (паспорта), при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, трещин и сколов ванны-кюветы, панели для пеленания, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений, свободное вращение колес.
- 5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали кровати и съемных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°С со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Кровать для новорожденных КН-1 подвергнуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-028-07614107-2005.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Сведения об утилизации

Поскольку кровать не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

8. Транспортирование и хранение

- 8.1. Транспортирование кровати должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
- 8.2. Кровать должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-028-07614107-2005.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок производителя

Наименование товара	КРОВАТЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ КН-1	
Серийный номер		Дата производства
Гарантийный срок	24 месяца	со дня продажи
Заполняет продающая организация		
Наименование продающей организации		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> М.П. </div>
Дата продажи		
ФИО / Подпись		
Заполняет покупатель		
С условиями гарантии ознакомлен и согласен. К комплектации и внешнему виду товара претензий не имею.		
Наименование покупателя		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> М.П. </div>
ФИО / Подпись		

