

Инструкция по сборке и эксплуатации

Массажный стол М110-03

Общие указания

Складной массажный стол М110-03 предназначен для проведения релаксационных процедур, укрепляющих и восстанавливающих жизненные силы организма человека. Конструкция стола разработана с учетом современных требований к удобству и долговечности в эксплуатации, надежности, дизайну.

Стол может устанавливаться в спортивно-оздоровительных центрах, салонах красоты, саунах, массажных кабинетах и др.

Каркас стола изготовлен из алюминиевой трубы. Лежак обит искусственной кожей или тканью. В лежаке предусмотрено отверстие для лица.

Максимальная нагрузка на стол – 200 кг.

Габариты

В разложенном виде 1870x670x640-850h, в сложен. виде 930x190x670h.

Вес 22 кг.



Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за кожнозаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щетки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожу.
 4. Время от времени кожу следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожа не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на нее солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

- Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.
Бесплатный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения правил эксплуатации:
- если была попытка самостоятельного ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции;
 - при механических повреждениях;
 - при повреждениях, вызванных стихией, пожаром и другими обстоятельствами непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на крепежные изделия.