

Паспорт

Стол инструментальный и манипуляционный

СИМ 2

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск
Ул. Студенческая д.28 пом.34
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»
Тел./факс (8313)25-35-78
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:



Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик_____

РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

1. Столик инструментальный СИМ 2 предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов.
2. Разборный каркас столика выполнен из металлической трубы с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	длина	
810	540	450	26

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	Кол-во
3.1	Стекло и\или металл + рамка	2
3.2	Стойки	2
3.3	Опора колесная	4
3.4	Крепежные элементы	набор
3.5	Паспорт	1
3.6	Упаковка	1

4. Инструкция по сборке.

- 4.1 Распаковать компоненты столика.
- 4.2 Соединить стойки 3.2 с рамами 3.3 при помощи крепежных элементов
- 4.3 Ввернуть в ножки каркасов колеса 3.3
- 4.4 Установить полки в собранный каркас

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.