


## Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по  
ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-03

### Комплектность поставки

- 1 – верхняя часть с держателями – 1 шт.
- 2 – опора высокая – 1 шт.
- 3 – опора низкая – 2 шт.
- 4 – фиксатор – 1 шт.
- 5 – винт М6х65 с потайной головкой – 2 шт.
- 6 – гайка колпачковая М6 – 2 шт.

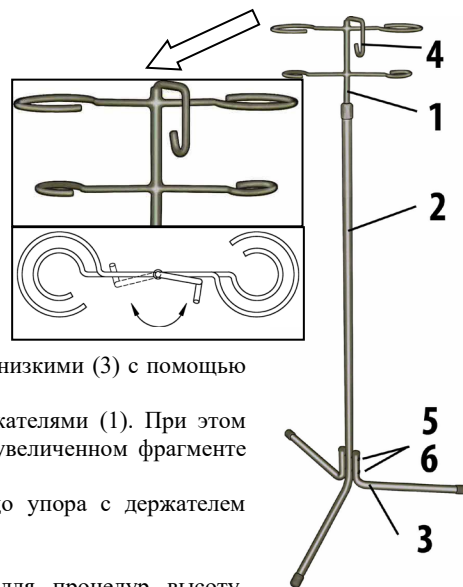

### Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Соединить опору высокую (2) с двумя опорами низкими (3) с помощью двух винтов (5) и двух гаек (6).
3. Вставить фиксатор (4) в верхнюю часть с держателями (1). При этом сориентировать фиксатор так, как показано на увеличенном фрагменте рисунка.
4. Повернуть фиксатор (4) по часовой стрелке до упора с держателем верхней части (1).
5. Вставить верхнюю часть (1) в опору высокую (2).
6. Установить верхнюю часть (1) на нужную для процедур высоту. Зафиксировать это положение, повернув фиксатор (4) против часовой стрелки до упора с держателем верхней части (1).

**Во время проведения процедур капельницу не передвигать!**

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
2. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
4. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
5. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б  
тел.: (812) 362-42-79

web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)


E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)

## Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по  
ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192-03

### Комплектность поставки

- 1 – верхняя часть с держателями – 1 шт.
- 2 – опора высокая – 1 шт.
- 3 – опора низкая – 2 шт.
- 4 – фиксатор – 1 шт.
- 5 – винт М6х65 с потайной головкой – 2 шт.
- 6 – гайка колпачковая М6 – 2 шт.

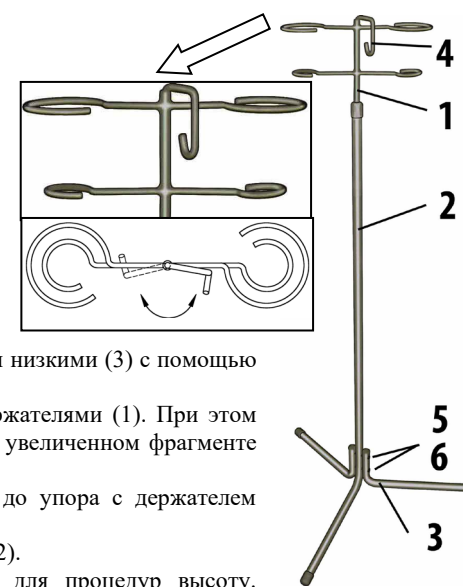

### Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Соединить опору высокую (2) с двумя опорами низкими (3) с помощью двух винтов (5) и двух гаек (6).
3. Вставить фиксатор (4) в верхнюю часть с держателями (1). При этом сориентировать фиксатор так, как показано на увеличенном фрагменте рисунка.
4. Повернуть фиксатор (4) по часовой стрелке до упора с держателем верхней части (1).
5. Вставить верхнюю часть (1) в опору высокую (2).
6. Установить верхнюю часть (1) на нужную для процедур высоту. Зафиксировать это положение, повернув фиксатор (4) против часовой стрелки до упора с держателем верхней части (1).

**Во время проведения процедур капельницу не передвигать!**

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.

2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б  
тел.: (812) 362-42-79

web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)

E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)