

АО «СКБ СО и Э»



**Стол для интраорального сканера
СДИС-01**

**Паспорт
СДИС-01.00.000 ПС**

г. Волгоград

1. Назначение

Стол для интраорального сканера СДИС-01 (в дальнейшем – стол) предназначен для размещения интраорального сканера, приборов, приспособлений и другого оборудования, используемого лечебных учреждениях.

2. Комплектность поставки

п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Корпус	1
2	Кронштейн монитора	1
3	Крышка передняя	1
4	Крышка задняя	1
5	Колесо Ø 75 мм	2
6	Колесо с тормозом Ø 75 мм	2
7	Крепежные элементы	1 комплект
Эксплуатационная документация		
8	Паспорт	1

3. Основные технические характеристики

3.1. Корпус стола изготовлен из листового металла и имеет сварную конструкцию.

Равномерно распределенная нагрузка:

на столешницу не должна превышать - 10 кг;

на верхнюю полку – 7 кг;

на кронштейн – 7 кг;

на основание – 12 кг.

3.2. Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное покрытие порошковой, эпоксидно-полиэфирной краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания согласно МУ-287-113. При обработке рекомендуется применять способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе одного из следующих дезинфицирующих средств 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Лотос»)

3.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

3.4. Основные параметры и размеры.

3.4.1. Габаритные размеры:

ДхШхВ – 460х550х1148 (±4 мм)

3.4.2. Диаметр колесных опор: 75 мм.

3.4.3. VESA крепления: 75х50, 75х75, 100х50, 100х100 мм.

3.4.4. Масса: 26 ±2,6 кг.

4. Устройство и сборка

4.1. Устройство изделия представлено на рисунке 1

4.1.1. Конструкцией стола предусмотрена установка приборов (системного блока) в корпус поз.1.

4.1.2. Крышка передняя поз.3 установлена на магнитах для быстрого доступа к нише.

4.1.2. На кронштейне поз.2 возможно закрепить оборудование (монитор) с помощью VESA крепления.

4.1.3. Для прокладки проводов имеются специальные заглушки.

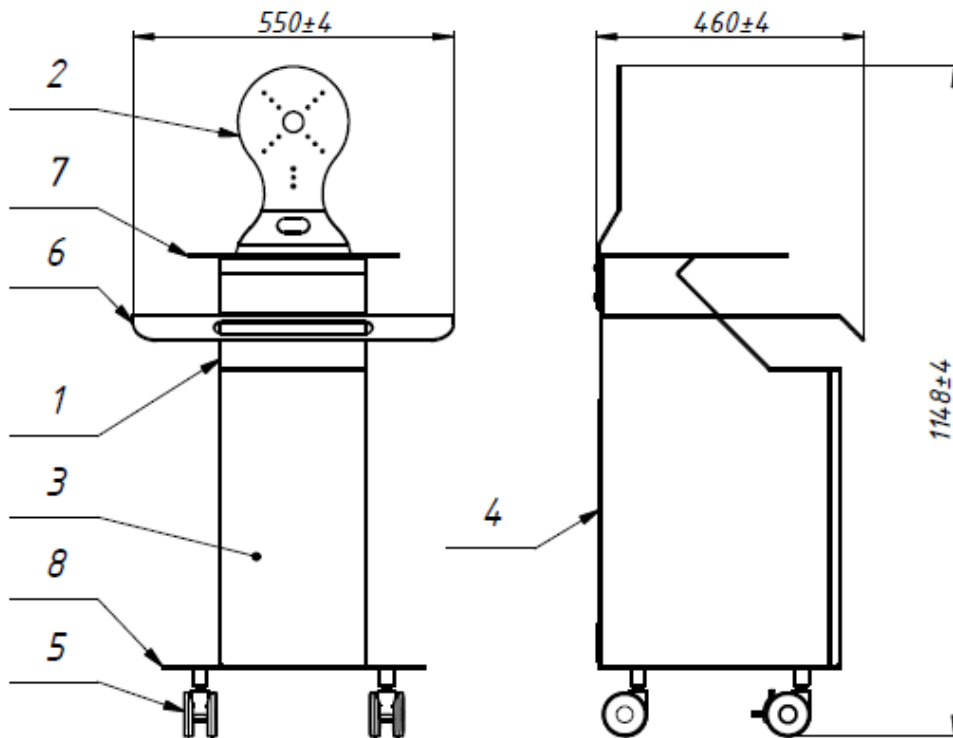


Рисунок 1

1. Корпус, 2. Кронштейн монитора, 3. Крышка передняя, 4. Крышка задняя, 5. Колесо, 6. Столешница, 7. Верхняя полка, 8. Основание.

4.2. Сборка

4.2.1. Распаковать и проверить целостность покрытия.

4.2.2. Проверить комплектность.

4.2.3. Сборку рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- прикрутить колеса (поз.5) к корпусу (поз.1).

- прикрутить кронштейн монитора (поз.2) к корпусу (поз.1) винтами М6.

5. Меры предосторожности (противопоказания) при применении изделия

5.1. К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации, описание и конструкцию изделия.

6. Срок службы (годности) и указание на запрет использования изделия по истечении срока службы (годности)

6.1. Средний срок службы до списания не менее 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

7. Условия хранения

7.1. Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 16371 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

7.2. Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и влажности от 45 до 70%.

7.3. Изделие обёрнуто влагонепроницаемым материалом.

8. Требования к применению и эксплуатации изделия

8.1. Изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

9. Техническое обслуживание

9.1. Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

9.2. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений.

9.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их.

10. Порядок осуществления утилизации

10.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

10.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

10.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

11. Гарантии изготовителя

11.1. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу изделия на протяжении гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи, гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с момента выпуска изделия.

12. Свидетельство о приемке

Стол для интраорального сканера СДИС-01

серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

13. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Юридический адрес: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12.

Адрес производства: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Электродесовская 70а, 70б, 70л.