

8. Гарантийные обязательства

При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу стола на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с даты выпуска изделия.

9. Сведения о рекламациях

В случае неисправности стола в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, владелец стола должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель изготовителя или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;
- ведомость дефектов.

10. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04.

Серийный номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска и консервации _____

Личные подписи лиц,

ответственных за приемку _____

11. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12

АО «СКБ СО и Э»



Стол для стоматологов СС-04
ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008

Стол для стоматолога
СС-04

Паспорт
СС-04.00.000ПС

г. Волгоград

1. Назначение изделия

1.1. Стол для стоматолога СС-04 предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.

1.2. Нормальные условия эксплуатации стола: температура от +10°C до +35 °C и относительная влажность до 80% при температуре +25°C.

1.3. Дезинфекцию наружных поверхностей стола производить согласно МУ-287-113.

2. Технические характеристики

2.1. Габаритные размеры:

Длина - 703±4 мм; Ширина - 418±4 мм; Высота - 787±4 мм.

2.2. Масса не более 18 кг.

2.3. Равномерно распределенная нагрузка на полку не более 4кг.

2.4. Равномерно распределенная нагрузка на дно ящика не более 5,5кг.

3. Комплектация поставки

№	Наименование	Обозначение документа	Кол-во
1.	Стол для стоматолога СС-04	СС-04.00.000	1
2.	Стекло (верхнее)	СС-04.00.002	1
3.	Стекло (нижнее)	СС-04.00.003	1
4.	Колесо поворотное (шпилька М8)		4
5.	Паспорт	СС-04.00.000 ПС	1

4. Устройства и принцип работы

4.1. Стол состоит из каркаса 1, в котором размещены две стеклянные полки - верхняя полка 2 и нижняя полка 3, а также два выдвижных ящика 4. Ящики перемещаются на роликовых направляющих. Для выдвижения ящиков на их передних стенках установлены ручки 5. Ящики предохранены от выпадения при их полном выдвижении.

4.2. Для перемещения стол снабжен поворотными колесами 6.

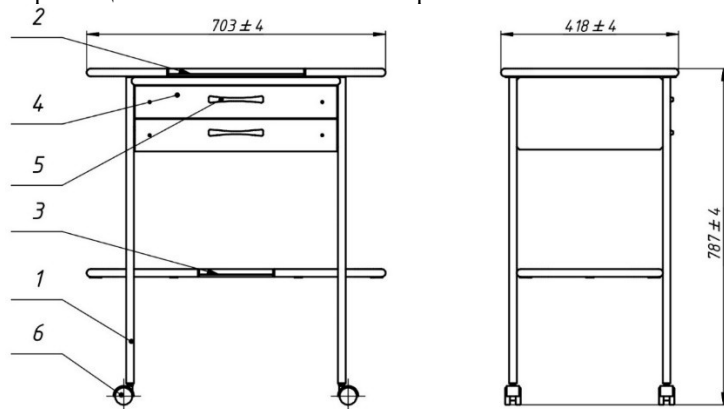


Рисунок 1

1 - Каркас; 2, 3 - Стеклянная полка; 4- Ящик; 5 - Ручка; 6 – Колесо

5. Подготовка изделия к работе

5.1. Распакуйте стол, проверьте его комплектность, а также сохранность после транспортировки. Поверхности, смазанные консервационной смазкой, протрите хлопчатобумажными салфетками, смоченными бензином или растворителем по ГОСТ 3134 или ГОСТ 443, затем протрите сухими салфетками до полного удаления консервационной смазки.

ВНИМАНИЕ!!! При распаковывании соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стеклянные полки, расположенные на верхней поверхности стола.

5.2. Для приведения стола в рабочее положение необходимо извлечь из ящика комплект колес и ввернуть их в ножки каркаса 1 (см. рис.) до упора. Стеклянные полки 2, 3 уложить в соответствующие ниши каркаса (широкую полку - в верхнюю, узкую - в нижнюю).

6. Правила хранения, консервации, упаковки и транспортирования

6.1. Стол, упакованный в транспортную тару, может храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от +40°C до минус 50°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6.2. Наружные неокрашенные металлические части стола предохранены от коррозии путем консервации. Предельный срок хранения без переконсервации - 3 года.

6.3. Дата проведения консервации изделия на предприятии указана в свидетельстве о приемке.

6.4. Для транспортирования, стол с уложенной в него эксплуатационной документацией, упакован в ящик и закреплен в нем. При транспортировании в контейнерах допускается упаковка стола в обрешетку. Стол внутри ящика (обрешетки) защищен влагонепроницаемым материалом.

6.5. Стол в упаковке должен транспортироваться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах).

7. Утилизация

7.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

7.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» и в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

7.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».