

### **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

### **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

### **7. Адрес изготовителя:**

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск

Ул. Студенческая д.30 офис 121

**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**

Тел./факс (8313)25-35-78

Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик\_\_\_\_\_

# **Паспорт Тумба ТП 1/05 (на колесах или на опорах)**



**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

**г. Дзержинск.**

## **1. Назначение и конструкция.**

- 1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика в медицинских и других учреждениях.  
1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП.

## **2. Основные технические характеристики.**

Габаритные размеры, мм		Масса, кг не более
высота	ширина	глубина
700	450	450
		20

## **3. Комплект поставки.**

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Стенка боковая (594*430)	2
2	Крыша (450*450)	1
3	Дно (430*450)	1
4	Фасад-дверка (405*448)	1
5	Задняя стенка ДВПО (624*448)	1
6	Полка съемная (416*400)	1
7	Фасад ящика (200*448)	1
8	Фальш-панель, задняя стенка ящика (360*120)	2
9	Боковые стенки ящика (400*120)	2
10	Дно ящика ДВПО (390*398)	1
11	Ручка	2
12	Опоры или колеса	4
13	Стяжка эксцентриковая	4
14	Стяжка винтовая (евровинт)	8
15	Полкодержатели	4
16	Винт М 4*35	2
17	Петля накладная	2
18	Саморез 3,5*16	32
19	Направляющие роликовые L400	1комп
20	Гвозди 1*20	30
21	Винт 4*20	2
22	Ключ шестигранный	1
23	Паспорт	1

**Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.**

## **4. Инструкция по сборке.**

**Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).**

- 4.1. Распаковать компоненты тумбы.
- 4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с дном 3.
- 4.3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 19 к боковым стенкам 1.
- 4.4. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми стенками 1.
- 4.5. Вставить полкодержатели 15 в отверстия боковых стенок 1.
- 4.6. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 4.7. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 5 к задней поверхности каркаса тумбы.
- 4.8. Закрепить саморезами 18 по углам дна 3 колеса или опоры 12.
- 4.9. Установить на дверку 4 накладные петли 17, закрепив их саморезами 18.
- 4.10. Закрепить саморезами 18 на боковой стенке 1 планки петель 17 по месту.
- 4.11. Собираем ящик. При помощи ключа 21 и винтовых стяжек 14 соединить боковые стенки ящика 9 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 8.
- 4.12. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 10.
- 4.13. Установить ящик в каркас тумбы.
- 4.14. Установить съемную полку 6.
- 4.15. Закрепить ручки на фасадах.
- 4.16. При помощи отвертки отрегулировать фасады.

