


МД Б

HILFE




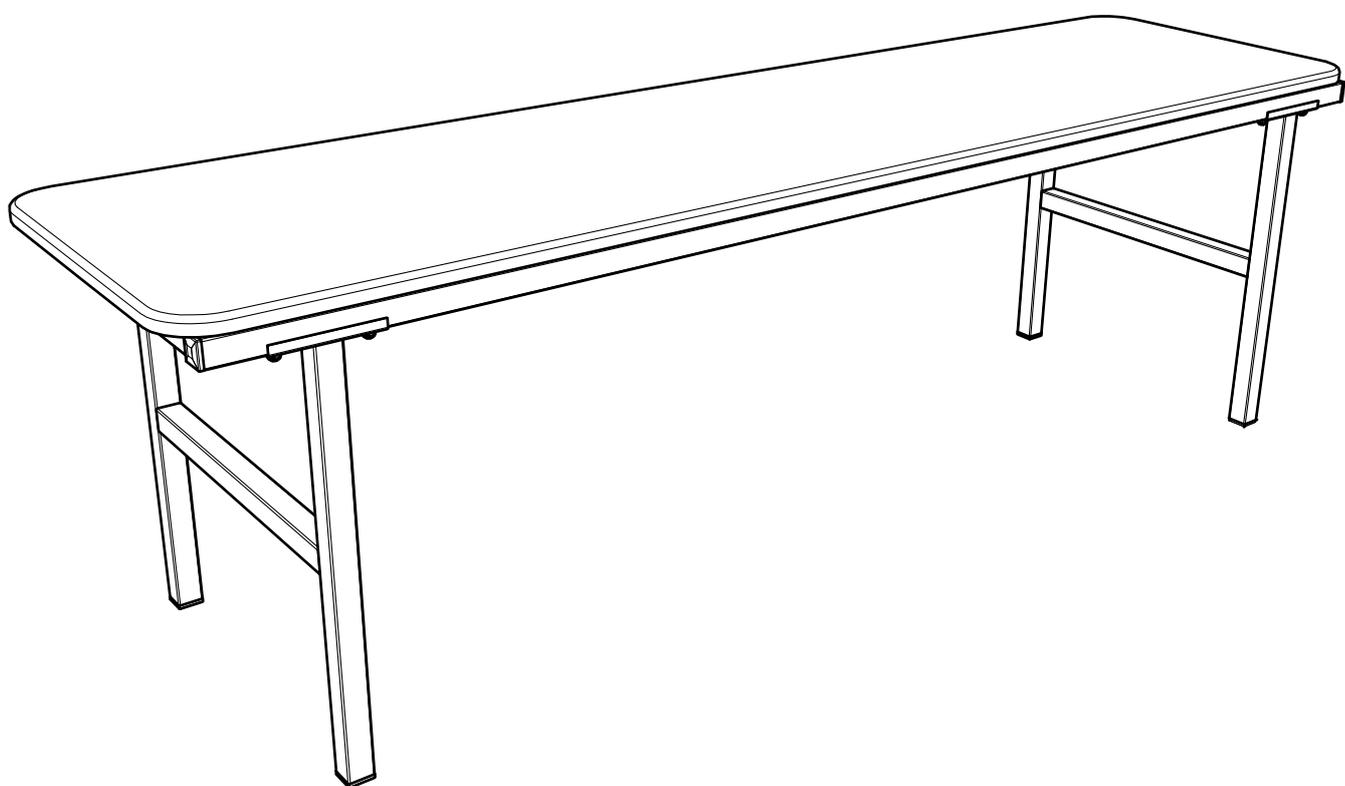


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Банкетка медицинская МД Б предназначена для размещения пациентов внутри больничных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

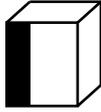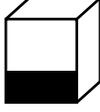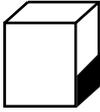
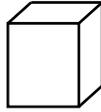
Модель	 mm	 mm	 mm	 kg**
МД Б	475	1520	470	14,5

* - допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Рама	1	3	Ложе	1
2	Опора	2	4	Комплект фурнитуры	1


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

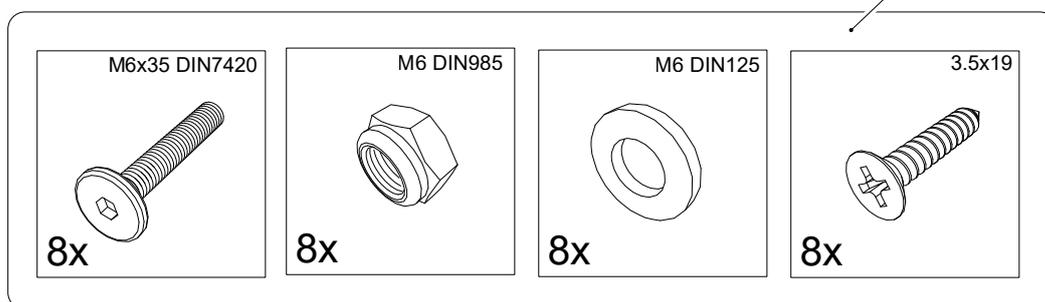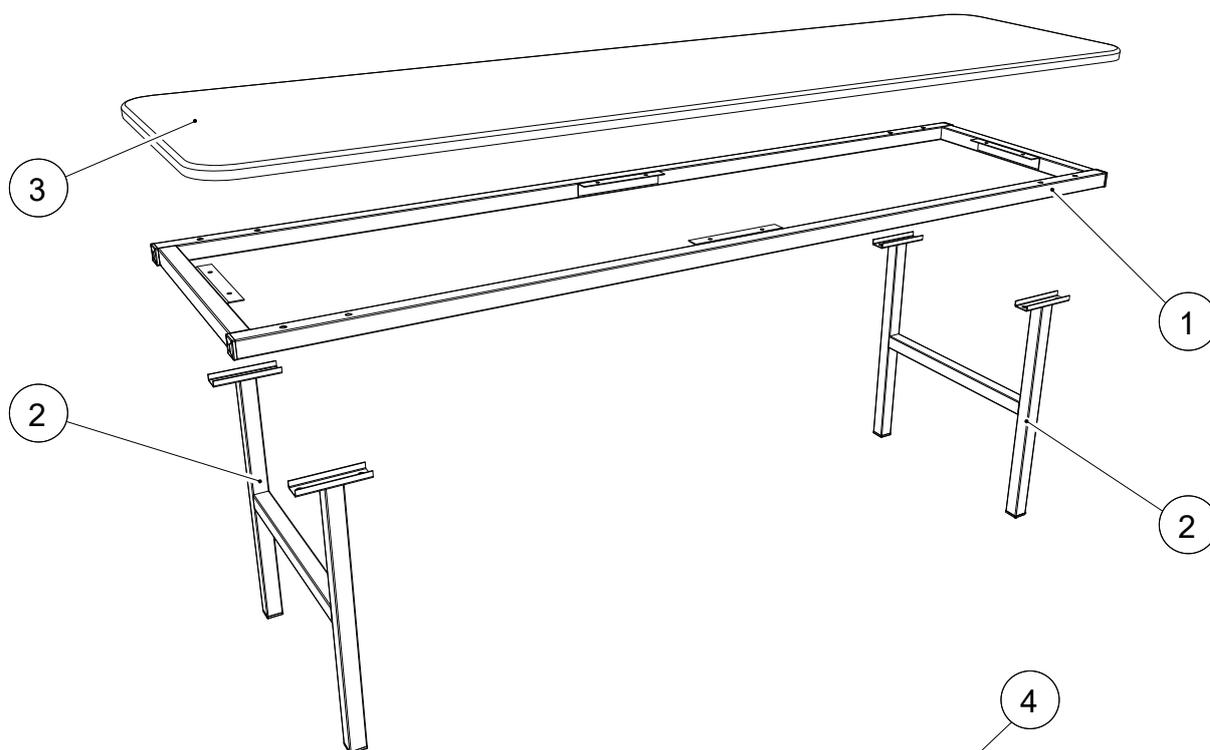

1

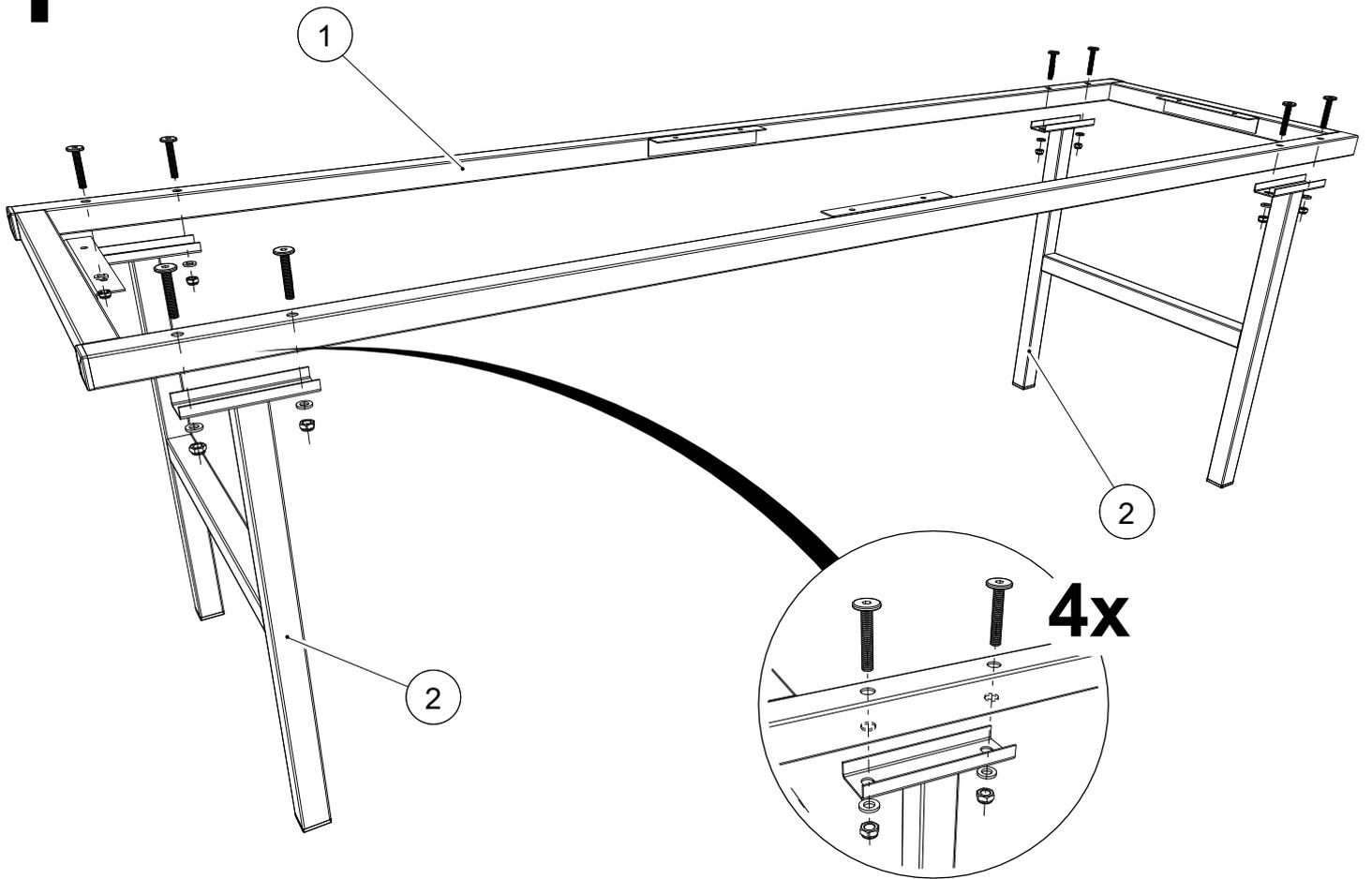

2

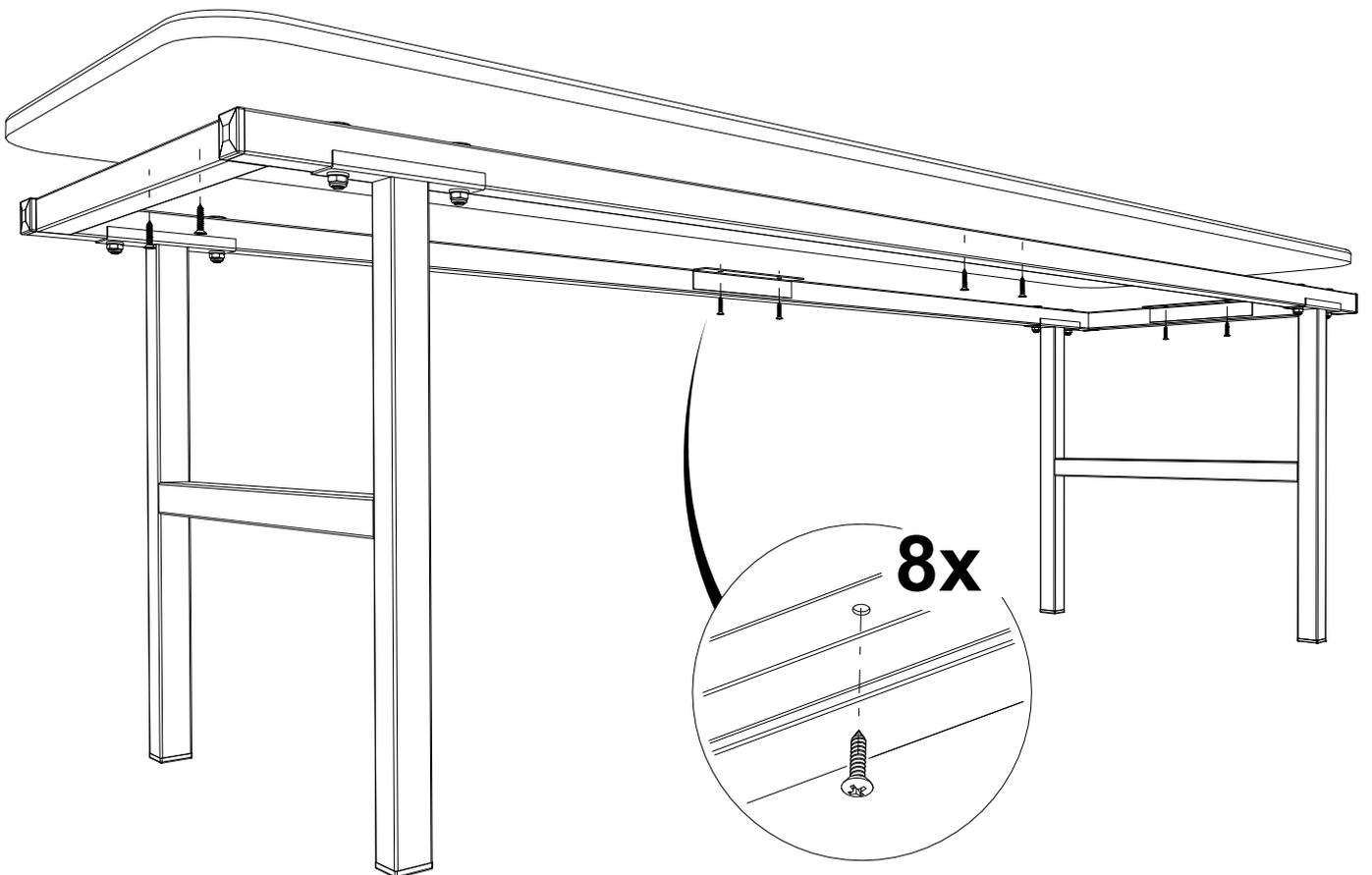

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для продления срока службы банкетки медицинской рекомендуется производить:

- осмотр болтовых соединений (надежность крепления узлов);
 - в случае обнаружения ослабленных соединений – затянуть болты ключом;
- Предельная распределенная нагрузка на ложе: 180 кг.

5.1 ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАНКЕТКИ

- Не используйте сильные кислоты и основания (оптимальный pH 6-8).
- Используйте только ПАВ, пригодные для очистки медицинского оборудования.
- Не используйте абразивные порошки, стальную стружку и другие материалы и чистящие средства, способные повредить покрытия.
- Не используйте ПАВ, приводящие к коррозии или содержащие щелочь.
- Для мытья банкетки используйте хорошо отжатую влажную ткань.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Медицинские банкетки можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.



Штамп службы качества _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.