

## 11. Сроки службы. Гарантии изготовителя. Сведения о рекламациях

- 11.1 Средний срок службы изделия – 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.
- 11.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 11.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
- 11.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях: истечение срока гарантии; нарушение правил хранения и эксплуатации; наличие механических повреждений изделия по вине потребителя. Замена фурнитуры и деталей мебели, имеющих дефекты производственного характера, осуществляется при предъявлении гарантийного талона и упаковочных этикеток. За изделия с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- 11.5 Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. ЗА – ЗА1), по факсу (831) 216-20-51 или по электронной почте [otk@tdask.ru](mailto:otk@tdask.ru).

## 12. Свидетельство о приемке и упаковывании. Сведения о производителе

Стол лабораторный серии Стандарт плюс модель СЛ.04.00 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2011 и признан годным для эксплуатации.

(штамп ОТК)

Серийный номер:

Дата выпуска изделия:

М.П.

Упаковщик:

Сведения о производителе: **ООО МК «АСК»**  
Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород,  
ул. Героя Смирнова, д.13, кв. 230.  
Место производства: 603147, г. Нижний Новгород,  
ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. ЗА – ЗА1).  
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18  
E-mail: [zakaz@tdask.ru](mailto:zakaz@tdask.ru) [www.tdask.ru](http://www.tdask.ru)

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии 12 мес. с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты производства.

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Наименование изделия                               | Стол лабораторный СЛ.04.00 |
| Дата ввода в эксплуатацию                          |                            |
| Внимание! Действительным является только заполнен- |                            |

М.П.

ный Гарантийный талон, заверенный печатью организации, вводящей изделие в эксплуатацию.


ОБРАЗЕЦ

ООО МК «АСК»



## Паспорт

| Наименование      | Серия         | Модель   |
|-------------------|---------------|----------|
| Стол лабораторный | Стандарт плюс | СЛ.04.00 |

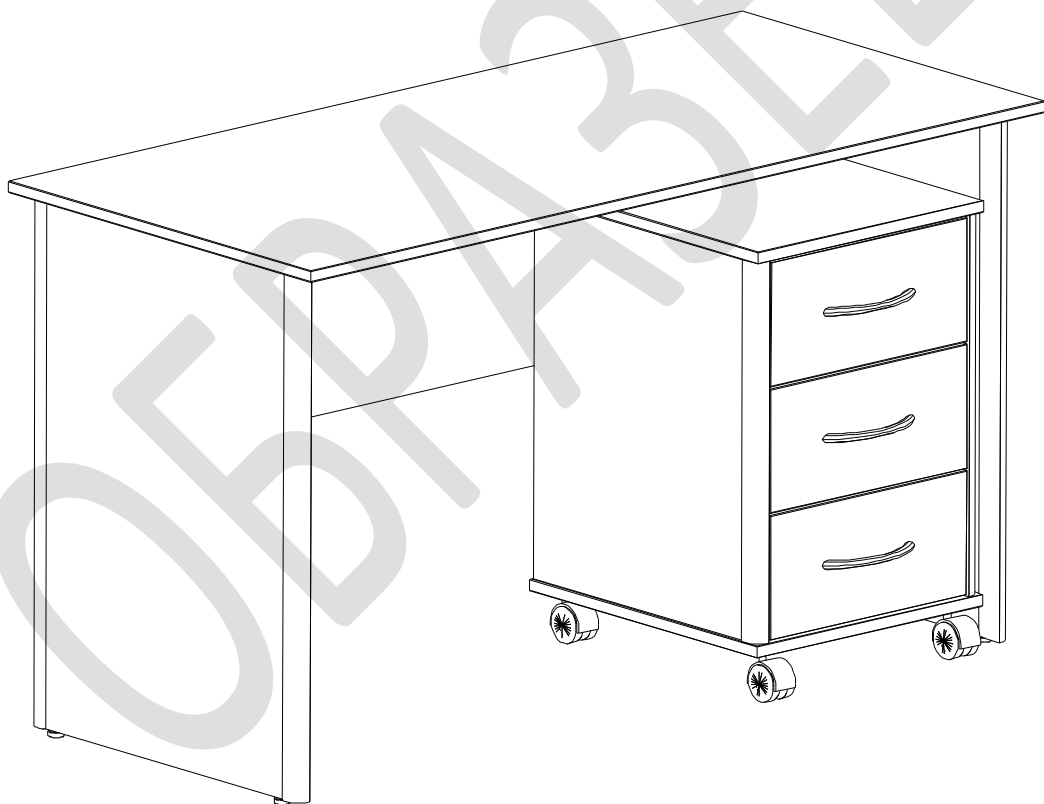

ТУ 9452-001-68690950-2011

г. Нижний Новгород

ОБРАЗЕЦ

# 1. Общие указания

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные характеристики изделия. Паспорт является документом, совмещающим техническое описание и руководство по эксплуатации.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.
- 1.5 Документ предназначен для ознакомления с медицинским изделием «Стол лабораторный» и устанавливает правила его эксплуатации (использования, технического обслуживания, транспортировки, хранения и т.д.).

# 2. Основные сведения об изделии и технические данные

| Наименование изделия | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм |         |        | Масса, кг<br>не более |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------|--------|-----------------------|
|                      |                    | ширина                 | глубина | высота |                       |
| Стол лабораторный    | СЛ.04.00           | 1300                   | 600     | 750    | 47                    |

- 2.1 Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011». Регистрационное удостоверение ФСР 2011/11043 от 21.03.2024г. Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
- 2.2 Потенциальный потребитель – медицинский работник.
- 2.3 Стол предназначен для оснащения диагностических лабораторий, кабинетов и палат медицинских учреждений. Используется для размещения на его рабочей поверхности и хранения внутри него - документов, медицинского инвентаря, лабораторной посуды и химических реактивов, инструментов и расходных материалов, аппаратуры, материалов для исследований, и манипуляций с ними.
- 2.4 Стол изготовлен из ЛДСП панелей и алюминиевого профиля, устанавливается на регулируемые опоры.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий. Изображения в паспорте, иллюстрирующие внешний вид изделия и порядок его сборки – схематические и могут отличаться от реального вида.**

# 3. Комплект поставки

| Наименование                                   | Кол-во, шт. |
|------------------------------------------------|-------------|
| Стол в разобранном виде с комплектом фурнитуры | 1           |

|          |   |
|----------|---|
| Паспорт  | 1 |
| Упаковка | 1 |

## 9. Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

9.1 Транспортировка должна производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковок в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

9.2 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.3 Хранение производить в отапливаемых и вентилируемых помещениях, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде.

9.4 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений в соответствии со своим функциональным назначением. Нормальные условия для хранения и эксплуатации мебели – температура воздуха от +10°C до +40°C при относительной влажности 45-70%.

9.5 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка не должна превышать: для столешницы – 70 кг, для полки и выдвижного ящика – 10 кг.

**Рекомендуется:** размещать предметы внутри мебели, обеспечивая равномерное распределение нагрузки (по принципу тяжёлые – ближе к краям, лёгкие – по центру), нагружая многоярусные шкафы больше в нижних секциях для лучшей устойчивости; во избежание перекосов дверей и ящиков держать их закрытыми; регулярно проверять прочность резьбовых соединений и при необходимости подтягивать их; удалять пыль сухой мягкой тканью; различные загрязнения удалять с применением средств, не содержащих абразивные частицы; проводить санитарную обработку дезинфицирующими средствами способом протирания (допускается использование раствора «Хлорамин Б» с добавлением моющих средств типа «Лотос» в кол-ве 50г на 10л раствора); периодичность обработки – до 2-х раз в сутки.

**Не допускается:** механическое повреждение деталей мебели и попадание на их поверхность влаги, растворителей и химически активных веществ; хранение в сырых неотапливаемых помещениях; установка вплотную к отопительным приборам; длительное воздействие солнечных лучей; перемещение мебели без последующей регулировки её положения относительно пола.

## 10. Порядок осуществления утилизации

10.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- 10.2 Утилизация осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.
- 10.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

## **6. Маркировка и упаковка**

- 6.1 Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011.
- 6.2 На изделии присутствует этикетка с указанием:  
наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;  
обозначения ТУ;  
обозначения (артикула или модели) изделия;  
месяца и года выпуска;  
серийного номера изделия.
- 6.3 Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и ТУ 9452-001-68690950-2011. Для транспортирования изделие упаковывается в короб из гофрокартона.
- 6.4 На транспортную тару нанесена маркировка, выполненная на бумажном ярлыке в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, содержащая следующую информацию:  
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;  
обозначение ТУ, наименование и обозначение (арт./модель) изделия;  
месяц и год выпуска;  
манипуляционные знаки указывающие на способ обращения с упакованным грузом;  
количество грузовых мест и порядковый номер места;  
масса брутто грузового места в килограммах;  
габаритные размеры грузового места в миллиметрах.

## **7. Подготовка к работе**

- 7.1 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделие в транспортной таре должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.
- 7.2 Распакуйте компоненты стола, освободив его от упаковочного материала.
- 7.3 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

## **8. Меры предосторожности (противопоказания)**

- 8.1 К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящий паспорт.
- 8.2 Запрещается использование изделия с механическими повреждениями.



8.3 Недопустимо использовать изделие не по назначению.

8.4 Побочные действия при применении по назначению не выявлены.

## 4. Сборка стола и техническое обслуживание

- 4.1 Распаковав стол, внимательно ознакомьтесь со схемой сборки, изображённой на рис.1. Согласно комплектовочной ведомости и позициям на схеме определите расположение деталей в изделии и порядок их сборки. Сборка производится на ровном полу, укрытом материалом, предотвращающим повреждение покрытия пола и деталей мебели. Подготовьте необходимые для сборки инструменты – плоскую и крестовую отвёртки, молоток, рулетку или линейку, шуруповёрт.
- 4.2 Сборка стола. На вертикальных боковых стенках [1, 2] и задней стенке [3] установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек (11) и шканты (12) в предназначенные для них отверстия. На боковых стенках и крышке [4] установите штоки эксцентриковых стяжек. Установите подпятники (9).
- 4.3 Соедините вертикальные стенки стола, установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. Установите заглушки для эксцентриковых стяжек (4). Установите стол на предназначенное для него место. Регулировкой опор обеспечьте устойчивое без перекосов положение стола.
- 4.4 Сборка тумбы. На вертикальных боковых стенках [5, 6], задней стенке [7] установите цилиндрические части эксцентриковых стяжек в предназначенные для них отверстия. На боковых стенках и крышке установите штоки эксцентриковых стяжек. Шурупами 3.5×16 (13) закрепите к боковым стенкам [ - образные части роликовых направляющих (6), поместив их на подкладки (8).
- 4.5 Соедините вертикальные стенки тумбы, установите крышку. Затяжка соединения производится путём поворота эксцентриков до упора в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки. При помощи евровинтов (2) установите горизонтальную нижнюю стенку [8], шурупами 3.5×16 закрепите на ней колесные опоры (7). Установите заглушки для эксцентриковых стяжек.
- 4.6 Сборка ящиков. Евровинтами (2) соедините боковые стенки ящика [10] с передней [12] и задней [11] стенками. Дно ящика [14] закрепите к перед. и зад. ст. гвоздями (1). Установите роликами назад [ - образные части направляющих (6) и закрепите их шурупами 3.5×16 (13). Шурупами 3.5×30 (14) закрепите фасад [13] к перед. стенке ящика. Установите на фасад ящика ручку (10), на видимы головки евровинтов установите заглушки (3). Установите собранные ящики в корпус тумбы. Удалите с алюминиевых профилей защитную плёнку (при её наличии).
- 4.7 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено: отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность изде-

лия, наличие и прочность крепления, отсутствие слабо закрепленных элементов.

ОБРАЗЕЦ

5. Комплектовочная ведомость на детали и фурнитуру

| № | Детали стола             | А мм. | В мм. | Кол. |
|---|--------------------------|-------|-------|------|
| 1 | Ст. бок. лев. (в сборе)  | 725   | 538   | 1    |
| 2 | Ст. бок. прав. (в сборе) | 725   | 538   | 1    |
| 3 | Ст. верт. зад.           | 1224  | 374   | 1    |
| 4 | Крышка                   | 1300  | 600   | 1    |

| №  | Детали тумбы             | А мм. | В мм. | Кол. |
|----|--------------------------|-------|-------|------|
| 5  | Ст. бок. лев. (в сборе)  | 522   | 446   | 1    |
| 6  | Ст. бок. прав. (в сборе) | 522   | 446   | 1    |
| 7  | Ст. верт. зад.           | 522   | 358   | 1    |
| 8  | Ст. гор. ниж.            | 400   | 450   | 1    |
| 9  | Крышка                   | 400   | 450   | 1    |
| 10 | Бок. ящ.                 | 400   | 110   | 6    |
| 11 | Зад. ящ.                 | 296   | 110   | 3    |
| 12 | Перед. ящ.               | 296   | 110   | 3    |
| 13 | Фасад ящика              | 170   | 348   | 3    |
| 14 | Дно ящ.                  | 400   | 325   | 3    |

| № | Наименование               | Кол. |
|---|----------------------------|------|
| 1 | Гвоздь                     | 30   |
| 2 | Евровинт 7 x 50            | 16   |
| 3 | Заглушка для евровинта     | 12   |
| 4 | Заглушка для эксцентрика   | 18   |
| 5 | Ключ для евровинта         | 1    |
| 6 | Компл. роликовых напр. 400 | 3    |
| 7 | Опора колесная             | 4    |
| 8 | Подкладка ПВХ для направ-  | 6    |

|    |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------|----|
|    | ляющих                                             |    |
| 9  | Подпятник регулируемый М6                          | 4  |
| 10 | Ручка дугообразная 128 /хром/ с крепёжными винтами | 3  |
| 11 | Стяжка эксцентр.                                   | 18 |
| 12 | Шкант 8 x 30                                       | 4  |
| 13 | Шуруп 3.5 x 16                                     | 46 |
| 14 | Шуруп 3.5 x 30                                     | 6  |

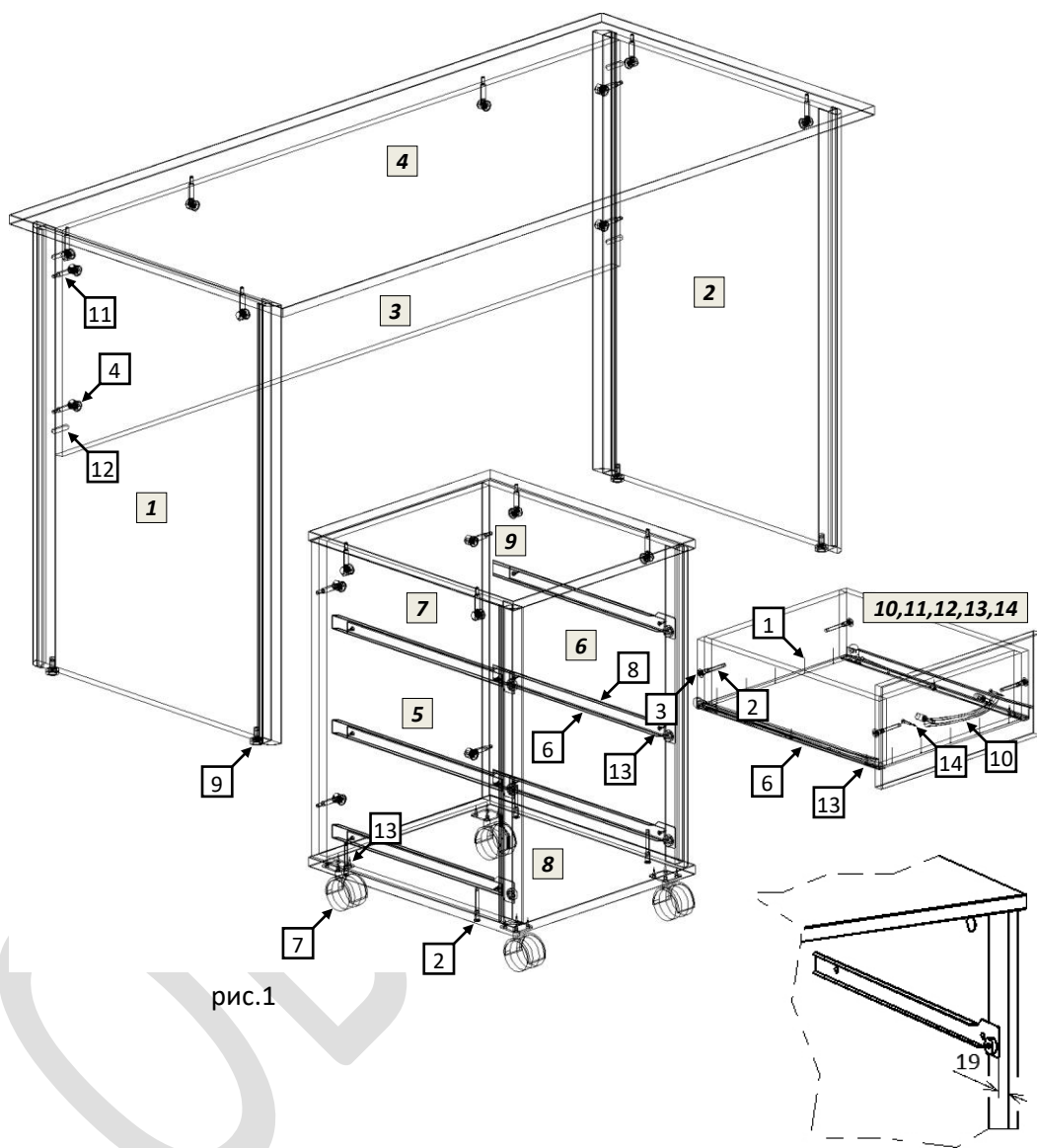


рис.1