

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.2. Кровати изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2.1. Основные параметры и размеры.

Параметры	
-----------	--

Таблица 1.

2.1.2. Конструкция имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

2.1.4. Поверхность кровати устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3.1. Комплект поставки кровати указан в таблице 2.

Таблица 2.

4. **УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

4.1. Кровать состоит из основания, подъемного механизма, лежа, дополнительной секции, установленной на выдвижную раму, быстросъемных спинок (торцевых ограждений), боковых ограждений, матраца.

4.2. Основание установлено на 4 колесные опоры диаметром 125 мм, вращающимися вокруг вертикальной оси. Все колеса снабжены тормозом.

- 4.4. Быстроразъемные спинки закреплены в посадочных местах многосекционного ложа резьбовыми фиксаторами.
- 4.5. Боковые ограждения опускаются под многосекционное ложе. Из верхнего в нижнее положение ограждения переводят нажатием кнопки управления, с одновременным давлением на дугу до упора.
- 4.6. Матрац трех-сегментный изготовлен из поролона обтянутого винилскожей по ТУ8714-138-05790484-2011.
- 4.7. Для придания кровати для родовспоможения положения «Кресло» необходимо снять ножную спинку, расположенную на выдвижной раме, матрац дополнительной секции и задвинуть раму до упора. Для выдвижения рамы необходимо потянуть раму на себя с одновременным нажатием кнопки разблокировки, расположенных на ее торце кровати.

5.1. К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кровати и правила ее эксплуатации.

5.2. При перемещении кровати необходимо отключить тормоза на всех колесах. Запрещается перемещать кровать с включенным тормозом колес.

5.3. По электробезопасности кровать, оснащенная электроприводом, соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0.92 (МЭК 601-1-88)

5.4. Не допускайте попадания питающего электропровода между движущимися элементами кровати.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. Кровать транспортируется упакованной в ящик. Кровать закреплена к поддону ящика через лист фанеры при помощи винтов М10х25.

6.1. После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего руководства.

7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кровати, проверку исправности подъемных механизмов, надежности крепления колес, а также при необходимости смазку подвижных соединений.

8.2. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

9.2 Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем руководстве.

10.2 Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

10.3 Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты отгрузки со склада Поставщика

10.4 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10.5 Средний срок службы 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская для родовспоможения

Дата выпуска _____ М. П. _____

Соответствует ТУ 9452-026-52962725-2009 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку (Хабибуллин Р.Р)

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ	
наименование и тип изделия	
ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ	

наименование и тип изделия	
номер ГОСТ или ТУ	

Номер и дата выпуска _____
Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ

1. Прикрутить колеса к ножкам при помощи гаечного ключа. Колеса с тормозом расположить диагонально. Для лучшей фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
2. Установить спинки на посадочные штифты, и закрепить при помощи резьбовых зажимов. Установить бампер.
3. Выдвижную раму выдвинуть до упора, установить дополнительную секцию
4. Гинекологический лоток из нержавеющей стали с подставкой задвинуть в направляющие на выдвижной раме.
5. Закрепить к боковым направляющим опоры для ног и упоры для рук при помощи универсальных зажимов.
6. Упоры для стоп устанавливаются на выдвижной раме. Для этого необходимо ослабить резьбовые зажимы, снять спинку, установить в посадочные места упоры для стоп, затянуть резьбовые зажимы.

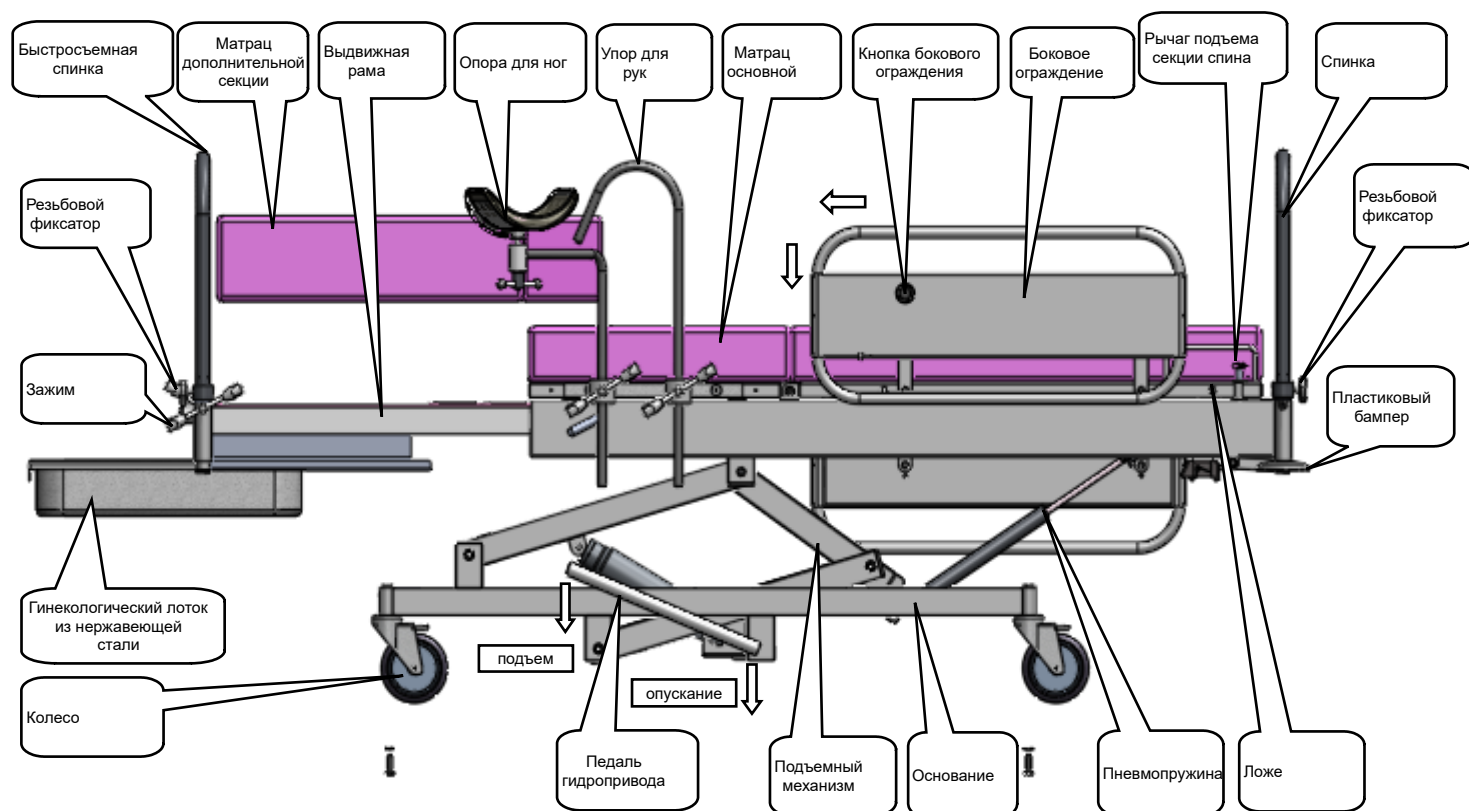


Рисунок 1 — КМРг137- «МСК» (МСК-137).

Рисунок 2 — Регулировка пневмопружины.