

Адрес изготовителя:
Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 Г
ООО «Айболит-2000»
Тел. (831) 468-06-73
Факс (831) 417-89-98, 468-86-60

Дата изготовления _____

ОТК _____

Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил и условий эксплуатации кровать долго будет служить Вам.

ООО «Айболит-2000»
Производство медицинской мебели
ПАСПОРТ

К Р О В А Т Ь
функциональная для
новорожденных с кюветом
из прозрачного органического стекла
передвижная
КНФ-01-«Айболит»

ГОСТ Р 50444-92



ТУ 9452-006-51768895-2003
г. Нижний Новгород

1. Назначение

Кровать функциональная для новорожденных с кюветом из прозрачного органического стекла передвижная КНФ-01 (в дальнейшем кровать) предназначена для перевозки детей в родильных блоках и детских палатах родильных домов, больниц и специализированных институтов.

2. Комплект поставки.

Каркас кровати в сборе – 1
Матрац - 1
Ванна-кювета - 1
Паспорт – 1

3. Инструкция по сборке.

- 3.1. Снять упаковку. Проверить крепление колесных опор, подтянув болты. Необходимо делать это периодически.
- 3.2. Чтобы изменить угол наклона кюветы – ослабить винт-барашек, изменить положение и снова закрепить винт-барашек.

4. Правила ухода.

- 4.1. Кровать эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 10°C до 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C .
- 4.2. Кровать необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в медицинских учреждениях растворителей, щелочей и кислот.
- 4.3. Наружные поверхности кровати устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

5. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 5.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.