

ОМ 29.754.01 от 18.10.2021

11. Свидетельство о приемке

Стол медицинский (мод.4) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.106 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Код 1014456

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,


Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9080 от 11.05.2021

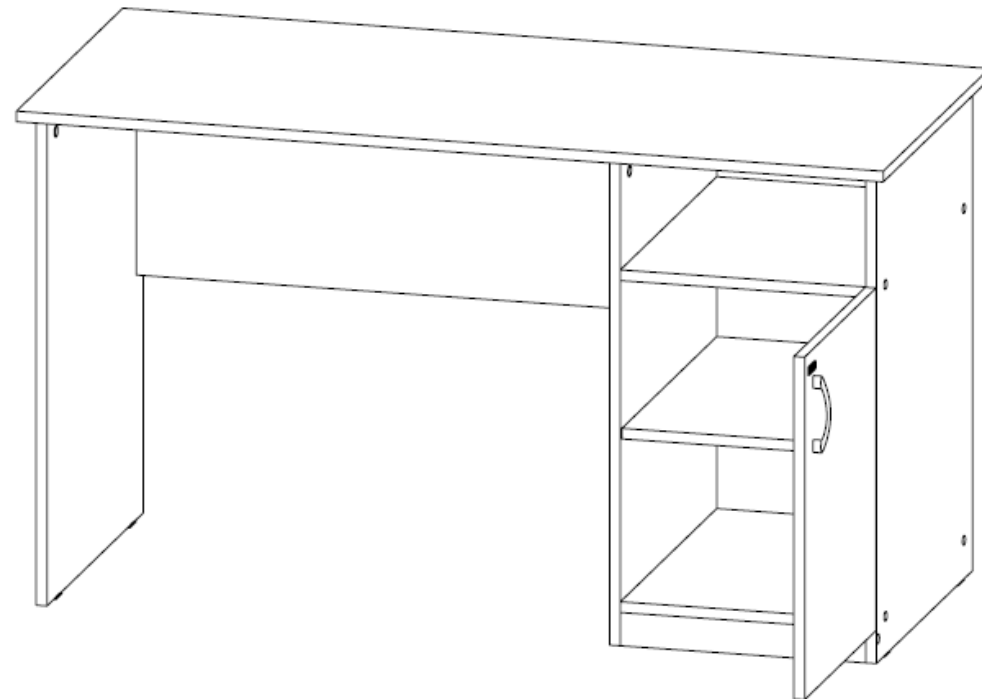

СТОЛЫ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.106 ТУ

**СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ
(мод.4)**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.211 РЭ**

Стол медицинский (мод.4) (в дальнейшем - стол), предназначен для обустройства помещений медицинских учреждений и организаций с учетом их функционального назначения. Может использоваться в больничных палатах, процедурных и смотровых кабинетах, лабораториях, для организации рабочих мест медицинского административного и обслуживающего персонала.

Показания к применению: для обустройства помещений медицинских учреждений и организаций с учетом их функционального назначения.

Противопоказания: не имеет.

Меры предосторожности:

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ облокачиваться и надавливать на верхние грани открытой двери!

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия 33,6±3,4 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (1300x600x750)± 4.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики стола при равномерном распределении нагрузки:

- на столешницу из плиты ламинированной древесностружечной – 25 кг;

- на полку из плиты ламинированной древесностружечной – 15 кг.

2.3. Зазоры в проемах на сторону для двери не более 4,0 мм. Дверь стола открывается и закрывается с усилием не более 3 даН. Угол открывания двери стола не менее 110°.

2.4 Стол имеет не регулируемые по высоте опоры в виде подпятников.

2.5 При эксплуатации стол устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°С.

2.6 Изделие изготовлено из ЛДСП. В стол встроена тумба в виде ниши с 2-мя полками, 1 из которых съёмная. Полки делят тумбу на 3 секции. Две нижние секции закрыты дверцей. Стол устанавливается на 6 мебельных подпятников без возможности регулировки по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки:

Наименование	Количество, шт
- Стол медицинский (мод.4)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Стол транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Стол транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°С до +50°С, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°С).

4.3 Условия хранения стола в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°С до +40°С и относительная влажность не более 98% при +25°С).

5. Дезинфекция

Поверхности стола устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113:3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь в ближайший сервисный

центр, указанный во вкладыше, или к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения стола или перевозки его в упаковке при температуре ниже +10°С изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки стола проверьте следующее:

- крепёжные элементы стола выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации стола:

Во избежание преждевременного выхода из строя стола не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях стола, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности стола воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

6.3 По механической безопасности стол соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание стола включает в себя:

- поддержание технического состояния стола в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов ручки двери не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений внешних поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей стола путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, рекомендованной СанПиН 2.1.3.2630-10 и регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт стола включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность стола.

10. Утилизация

Стол, потерявший потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовался стол по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.7.2790-10 для медицинских отходов класса «А».