



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ОКП 96 9320

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ТПГБ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ТЦДЗ.531.003 ПС (разборная)



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией. Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ (в дальнейшем - тележка) предназначена для внутрикорпусной транспортировки грязного белья.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Габаритные размеры тележки:	
- длина	858 ± 30 мм
- ширина	500 ± 20 мм
- высота	918 ± 20 мм
Габаритные размеры ёмкости для грязного белья:	
- длина	390 ± 15 мм
- ширина	250 ± 10 мм
- глубина	715 ± 15 мм
Масса, не более	22 кг
Предельная рабочая нагрузка на тележку	40 ± 1 кг
Усилие, необходимое для перемещения тележки с номинальной нагрузкой, не более	10 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Основание	1
2	Рама	1
3	Скоба	1
4	Ёмкость для сбора белья	2

5	Болт М8х16	4
6	Шайба А8	4
Эксплуатационная документация		
7	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

Крепежные изделия (болты М8 ГОСТ 7798-70; шайбы А8 ГОСТ 11371-78) поставляются установленными в местах их крепления или уложенными в отдельный пакет.


4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Тележка состоит из основания, установленного на самоориентирующихся колесах, скобы, на которой установлены две емкости для сбора грязного белья с откидными крышками.

4.2. Для подготовки к работе, необходимо распаковать тележку и очистить ее от упаковочного материала, удалить антикоррозионную смазку протираем насухо тампоном из марли, смоченным спиртом, провести техническое обслуживание согласно раздела 5 паспорта. Выполнить санитарную обработку тележки.

4.3. При получении тележки в разобранном виде произведите сборку согласно рисунка 1.

4.4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование неисправной тележки.

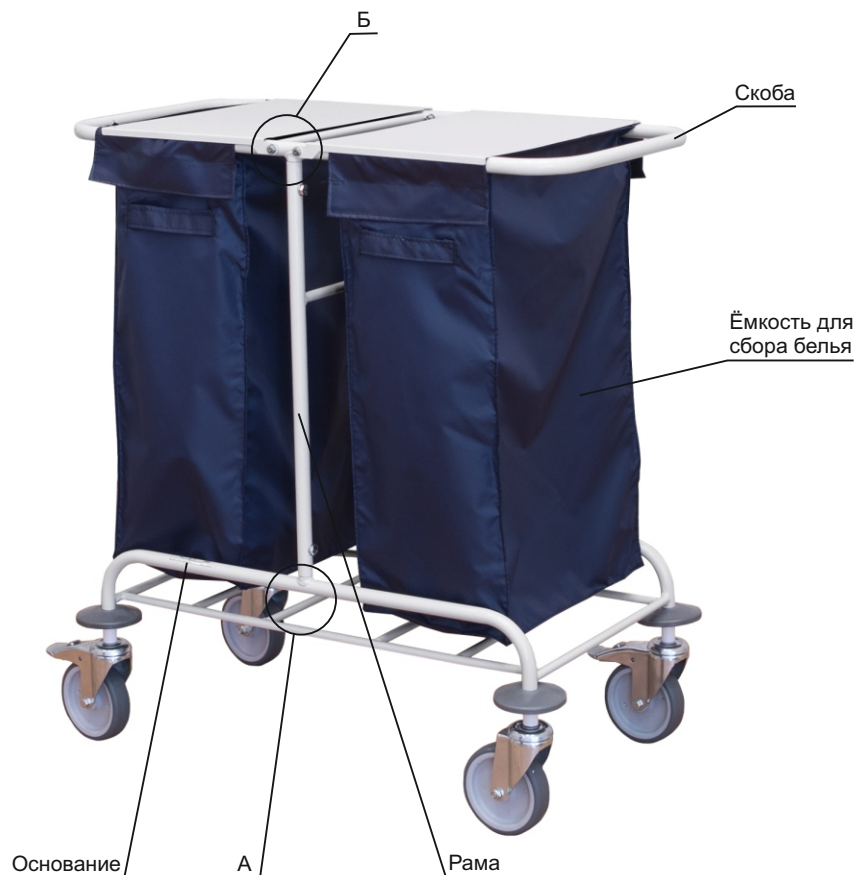**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок производителя

Наименование
товара

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ ТПГБ

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

12 месяцев

со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование
продающей
организации

Дата продажи

ФИО / Подпись

М.П.

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование
покупателя

ФИО / Подпись

М.П.



Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной ответственностью
«СПБ-Стандарт»

140004, Московская обл., Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом 411

ОГРН 1117847331414, ИНН 7839448244

Исх. № ОТК/1979 от 11.12.2015 года

Генеральному директору
АО «ДЗМО»
Кострову А.В.

Адрес: 607033, Нижегородская обл, г. Выкса, р.п. Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО»,
здание №1, помещение №001
ОГРН: 1025201635205
Тел./факс: +78317748062

Информационное письмо

Настоящим письмом Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СПБ-Стандарт» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ99 выдан 21.04.2014 г. Федеральной службой по аккредитации) сообщает, что в соответствии с Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 (с изм., утв. постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009):

Наименование продукции	Код ОКП
Изделия для общефизической подготовки спортсменов: кресло вращающееся, КВ-2С	96 1920
Изделия хозяйственно-бытового назначения металлические: тележка для перевозки грязного белья модели ТПГБ, тележка внутрикорпусная модели ТВК-2	96 9320
Установки для лечения вытяжением переломов верхних и нижних конечностей УВК-«ДЗМО». Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06838 от 12.11.2015 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения	94 5230

не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Данное письмо носит информационный характер

С уважением,

Заместитель руководителя

ОС ООО «СПБ-Стандарт»



М.Г. Васильева

Акционерное общество
«Досчатинский завод медицинского оборудования»

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

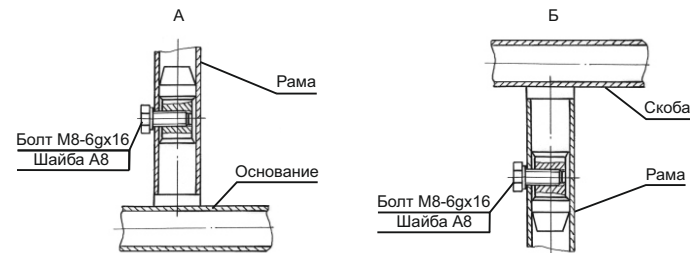


Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

5.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений; замене, при необходимости, годными деталями изношенных; промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.

5.2. Проверка технического состояния в целях установления возможности дальнейшего использования тележки, проводится на соответствие технических характеристик, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений.

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).

6.2. Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ подвергнута в АО «ДЗМО» консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

7.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.

9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).

9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.

9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
- 2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
- 3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки грязного белья	ТПГБ	
Наименование изделия	Обозначение	
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.		
Служба качества	┌	┐

подпись		

расшифровка подписи		

число, месяц, год	┌	┐
	┌	┐
Сборщик / упаковщик		
	┌	┐