



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦИТО»
ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул.Приорова, д.10, телефон 450-39-11

код 04.05.051

**ПЕТЛЯ ДЛЯ ВЫТЯЖЕНИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ШЕЙНЫХ И ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ (для детей)**

**Паспорт
684.00.00 ПС, 685.00.00 ПС**



ИМ15

Петля для вытяжения предназначена для лечения заболеваний и повреждений (переломов) позвоночника методом вытяжения за голову больного, а также петля применяется при наложении гипсовых корсетов или снятии гипсовых слепков для изготовления ортопедических корсетов.

К каждой петле прилагают два чехла для предохранения ее от загрязнения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Петля изготовлена из ткани хлопчатобумажной ГОСТ 12239-76, фиксирующие элементы из кожи ГОСТ 939-88, ГОСТ 485-82 и стали 30 ГОСТ 1050-88.

1.2. Размер петли, мм: 310×230(±20).

1.3. Петля выдерживает нагрузку — 10 кгс.

1.4. Средний срок службы — 9 месяцев.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- петля для вытяжения при повреждениях или заболеваниях шейных и грудных позвонков (для детей) — шт.;
- чехол — 2 шт.;
- паспорт — 1 экз.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

В процессе эксплуатации чехлы должны подвергаться санитарной обработке по ОСТ 42-21-2-85 после каждого больного, петля — по мере необходимости.

4. ОПИСАНИЕ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Сложенная вдвое петля, при вводе сбоку, имеет расширенную книзу форму. В каждый конец петли вшито по металлическому кольцу для крепления ее к вытягивающему приспособлению. Нижняя часть петли выкроена так, что будучи надетой на голову больного, петля образует опору для подбородка и для затылочного бугра. Петля затягивается с обеих сторон под ушными раковинами при помощи имеющихся на ней пряжек.

При применении на петлю с внутренней стороны надевается чехол, который может быть сменен по мере загрязнения. Надетая на голову петля равномерно и плотно затягивается так, чтобы одна половина ее охватила подбородок, не сдавливая при этом шеи, а вторая была бы подведена под затылочный бугор. После наложения петли больной укладывается на кровать со щитом, головной конец кровати приподнимается и устанавливается на подставку. Шнур для вытяжения крепится за кольца петли и протягивается к ролику прикроватного или накроватного блока. К концу шнура крепится груз.

Чехол применяется вместе с петлей при наложении большим гипсовых корсетов или вытяжения позвоночника. Чехол повторяет форму петли, но сделан двойным, с таким расчетом, чтобы покрыть как внутреннюю, так и наружную поверхность петли. Фиксируется чехол к петле завязками, пришитыми к боковым сторонам чехла.

5. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Петля должна храниться в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +40°C в упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации — без упаковки.

5.2. Воздух помещения, в котором хранятся петли и чехлы, не должен иметь повышенной влажности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

«Петля для вытяжения при повреждениях или заболеваниях шейных и грудных позвонков (для детей)» соответствует требованиям ТУ 9438-167-01894927-2004 и признана годной для эксплуатации.

Подпись _____

Штамп ОТК

Дата « ____ » _____ 200 ____ г.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие петли для вытяжения (для детей) требованиям ТУ 9438-167-01894927-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 4 месяцев; гарантийный срок хранения — 3 года.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1. В случае обнаружения дефектов, а также некомплектности поставки при первичной приемке, заказчик должен предъявить рекламацию предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

127299, Москва, ул. Приорова, 10

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО» (ФГУП «ЦИТО» Минздравсоцразвития России)

телефон отдела сбыта (095) 450-39-11

факс (095) 450-41-86

8.2. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.