

## 5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

## 7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.30 офис 121  
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

# Паспорт

## Шкаф для одежды

### ШО 2/02 (на опорах)



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

## 1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Шкаф предназначен для хранения одежды и личных вещей.
- 1.2. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
1900	800	560	60

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Дно (800*540)	1
2	Средняя панель (1550*540)	1
3	Верхняя панель (800x560)	1
4	Левая (правая) боковая панель (1794x540)	2
5	Дверь (1805*398)	2
6	Полка (768*540)	1
7	Задняя стенка (ДВП 1824*398)	2
8	Штанга для вешалок	2
9	Штангодержатель	4
10	Петля двери	6
11	Саморез 3.5x16	56
12	Евровинт (Ø7x50)	16
13	Ключ винтовой стяжки	1
14	Ручка	2
15	Винт М4x20	4
16	Опоры	6
17	Гвоздь	50
18	Заглушка винтовой стяжки	10
19	Планка соединительная для ДВП	1
20	Паспорт	1
21	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и молоток.

- 4.1. Распаковать компоненты шкафа.
- 4.2. При помощи ключа 13 соединить винтовыми стяжками 12 среднюю панель 2 с панелью дна 1 и полкой 6.
- 4.3. Закрепить винтовыми стяжками 12 на подсобранных панелях боковые панели 4, верхнюю панель 3.
- 4.4. Положить подсобранный каркас шкафа лицевой стороной на ровную поверхность. С помощью соединительной планки соединить задние стенки ДВП в верхнем отсеке шкафа. На заднюю поверхность каркаса положить заднюю стенку 7, выровнять по ней каркас и прибить гвоздями 17 к каркасу шкафа по контуру и к средней панели 2 с шагом 130 мм.
- 4.5. Установить с помощью саморезов 11 опоры 16 на дно 1.
- 4.6. Саморезами 11 закрепить на боковой 4 и средней 2 панелях штангодержатели 9 и установить штанги 8.
- 4.7. Саморезами 11 закрепить петли 10 на двери 5.
- 4.8. Закрепить на боковые стенки 4 планки петель 10 саморезами 11 по месту.
- 4.9. Поставить в вертикальное положение и с помощью опор отрегулировать шкаф. Отрегулировать фасады.
- 4.10. Закрепить ручки 14 на двери 5 винтами 15.
- 4.11. Установить в головки винтовых стяжек 12 на боковых стенках 4 заглушки 18.

