

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Стол медицинский палатный (далее по тексту - стол) предназначен для использования в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.
- 1.2. Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
- 2.1.1. Основные параметры и размеры столов указаны в таблице 1.

Таблица 1 .

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
1. Габаритные размеры, ±5 мм		
высота	750	750
ширина	850	1000
глубина	750	750
2. Масса, не более, кг	20	25

- 2.2. Характеристики:
 - 2.2.1. Столы изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и прямоугольного сечения, а также ламинированной ДСП.
 - 2.2.2. Номинальная распределенная нагрузочная способность столов не менее 80 кг.
 - 2.2.3. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
 - 2.2.4. Поверхность столов устойчива к обработке дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки столов соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	МСК-602	МСК-602.01
	Кол-во, шт.	Кол-во, шт.
Каркас- столешница	1	1
Ножка	4	4
Гайка М10	4	4
Шайба пружинная 10	4	4
Инструкция по сборке	1	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Столы представляют собой сборно-разборную конструкцию.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. К сборке и эксплуатации стола допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия .

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1. После транспортирования стола в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2. Распаковать стол и проверить целостность покрытия.
- 6.3. Проверить комплектность.
- 6.4. Осуществить сборку согласно инструкции.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Стол имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются крытыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
- 8.2. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
- 9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
- 9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский палатный СП- «МСК» _____
 Дата выпуска _____ М. П.
 Соответствует техническим условиям ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации.
 Подпись лиц, ответственных за приемку.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


на ремонт (замену) в течение гарантийного срока
 Изделие _____
наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ
 Номер и дата выпуска _____
 Приобретено _____
дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»
 Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

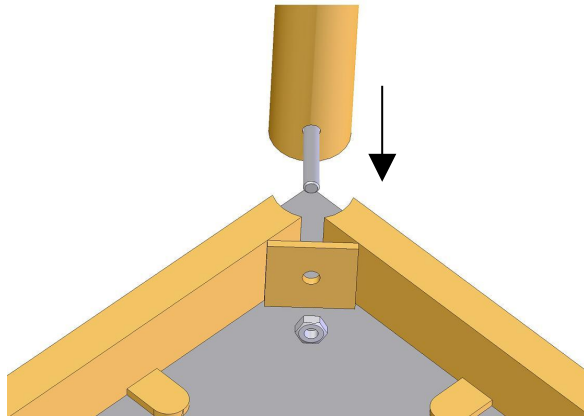

Инструкция по сборке столов МСК-602, МСК-602.01

1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

