



MET AVK GK 02

Кресло-кровать медицинская акушерская гинекологическая

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от комплектации и поставляемой модификации изделия!

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделия для улучшения качества.

1. Область применения медицинского изделия.

в лечебных учреждениях, в медицинских учреждениях в гинекологических отделениях.

Условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха 10 °С до плюс 35 °С.

-эксплуатация медицинского изделия осуществляется медицинским персоналом, прошедшим инструктаж от производителя.

2. Показания к применению и назначение медицинского изделия.

- проведение осмотра пациента
- проведение акушерско-гинекологических процедур и операций
- проведение лечения
- проведение родов

«Кресло-кровать медицинская акушерская гинекологическая «МЕТ» по ТУ 32.50.30-008-11459109-2020, в вариантах исполнения с принадлежностями» (далее по тексту – кресло-кровать или изделие). Кресло-кровать **предназначена** для поддержки тела беременной женщины в соответствующем положении во время родовой деятельности и родов, акушерско-гинекологических обследований и гинекологических операций различного рода.

3. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- вес пациента выше 170 кг.

4. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.



Чтобы правильно использовать изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом эксплуатации. Наша компания не несет ответственность за ущерб, возникающий из-за неправильного использования. Просим Вас сохранять руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Вашего изделия.



Кресло-кровать предназначена для использования в закрытых помещениях и в соответствии с условиями эксплуатации. Запрещается использование изделия в целях, не прописанных в данном руководстве.



"ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление".



"ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!".

- Если в кресло-кровать обнаружены неисправности или повреждения, не используйте ее и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.
- Перед каждым использованием изделия проверяйте его на наличие видимых повреждений.
- Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите пользование изделием и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.
- Регулярно проверяйте надежность соединений в изделии.
- В процессе эксплуатации следите, чтобы посторонние предметы не попадали или не располагались в непосредственной близости от подвижных узлов кресло-кровать.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием химикатов или других чистящих материалов, приведшим к повреждению или коррозии поверхности.
- Кресло-кровать требует применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости и должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в эксплуатационной документации.
- Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на кресло-кровать.

5. Подготовка к работе и порядок работы с изделием
ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать под кресло-кроватью

посторонние предметы, они могут быть повреждены при регулировке высоты кресло-кровати.

- Перед вводом в эксплуатацию изделия внимательно осмотрите упаковку, распакуйте изделие и сверьте комплектность. Ввод в эксплуатацию изделия осуществляется сервисным инженером производителя или уполномоченной организацией производителя.
- После пребывания изделия в условиях отрицательных температур распаковку производите после выдержки в помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности, не превышающей 80%, в течение 12 часов.
- Перед использованием кресло-кровати внимательно прочитайте данное руководство.
- Кресло-кровати поставляются к пользователю в собранном виде.
- После распаковки изделия установите съемные части, при этом крепко фиксируйте, чтобы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.
- Проведите санитарную обработку поверхности кресла-кровати.
- Подключите кабель в розетку.
- Мощность, потребляемая от сети не более 230 В-А
- Во время работы кресло должно быть зафиксировано, чтобы минимизировать риск травмы пациента.
- Для создания наиболее комфортного положения пациенту (изменение угла наклона секций кресла-кровати) используйте пульт управления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование неисправленного кресла-кровати.

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Производитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкцией. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

Управление функциями кресла при помощи пульта управления

Регулировка угла наклона спинной секции (вверх)		Регулировка угла наклона спинной секции (вниз)
Одновременная регулировка угла наклона спинной и тазовой секций		Одновременная регулировка угла наклона спинной и тазовой секций
Регулировка высоты (вверх)		Регулировка высоты (вниз)
Положение «Кресло»		Положение «Шок»

6. Комплект поставки:

- Кресло-кровать в собранном виде – 1 шт.; □
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

7. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Средний срок службы до списания кресел-кроватей— не менее пяти лет. Кресло-кровать является ремонтнопригодным изделием. За предельное состояние принимают такое состояние изделия, при котором стоимость ремонта для восстановления её работоспособности экономически нецелесообразна.

8. Условия хранения и транспортировки.

Изделия должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.

Транспортирование изделий осуществляется транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование изделий в климатическом исполнении для условий хранения 3 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность 98 %).

Условия хранения — в соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от -50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха — до 80 % при 25 °С).

9. Техническое обслуживание.

Следуя рекомендациям по эксплуатации и уходу за изделием, проводя регулярное ТО и используя оригинальные запчасти, Вы

значительно продлите срок эксплуатации Вашего изделия. В случае отказа изделия или его неисправности в течение гарантийного срока предприятие (потребитель) - «Владелец» должно направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона;
- гарантийный талон.

При обнаружении неисправности в работе изделия следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

ООО «МЕТ»

108811, Г. МОСКВА, П МОСКОВСКИЙ, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.),

ДВЛД. 4, СТР. 2, ЭТАЖ 5 БЛОК Г

8-495-775-75-95

10. Чистка и дезинфекция



При очистке используйте только безопасные для здоровья обеззараживающие средства.



Не используйте абразивные вещества и жесткие щетки, которые могут привести к повреждению поверхности изделия.



Не используйте для очистки моющие средства, спирт и кислоты, которые могут повредить элементы изделия.



После каждого пациента необходимо дезинфицировать изделие во избежание передачи инфекций.

Наружные поверхности кресел-кроватей не должны иметь вмятин, трещин, заусенцев, острых кромок, потертостей, острых выступающих частей и других дефектов. Поверхности изделия должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос».

Изделие не стерильно.

11. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кресел-кроватей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. В течение гарантийного срока изготовитель, осуществляющее гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет медицинское изделие или его составные части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт. В случае отказа изделий или неисправности их в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца изделия; гарантийный талон.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя. Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт (замену) в течение гарантийного
срока

Кресло-кровать медицинская акушерская гинекологическая «МЕТ» по ТУ 32.50.30-00811459109-2020, в вариантах исполнения с принадлежностями

№ Дата изготовления « » 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли
(заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....
.....

4.Выполненные работы

.....
.....
.....
.....

Руководитель
предприятия - «Владелец»

.....
«...». 20 ...г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

.....
«...». 20 ...г
М.П.