

Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по
ТУ 32.50.50-040-16789225-2018 тип М192-02

Комплектность поставки

Вершина – 1 шт. (поз. 1)
Звено – 4 шт. (поз. 2)
Опора – 1 шт. (поз. 3)
Сумка-чехол – 1 шт.



Поз. 1



Поз. 2



Поз. 3

Инструкция по сборке капельницы

1. Освободить все комплектующие от упаковки.
2. Установить опору на пол (см. рис. 1).
3. Сверху одеть 4 звена и вершину (см. рис. 2)
4. Взявшись за крючки вершины, придерживая (ногой) опору, повернуть все звенья капельницы в любую сторону до упора.

Во время проведения процедур капельницу не передвигать!



Рис. 1


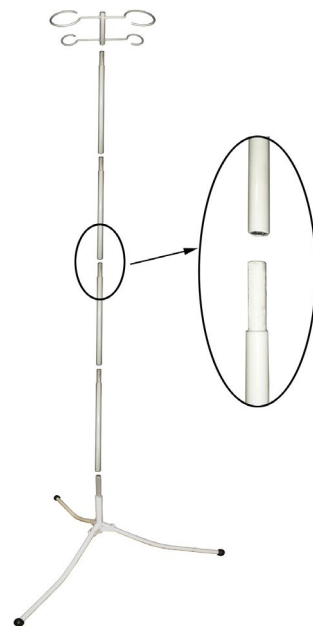


Рис. 2

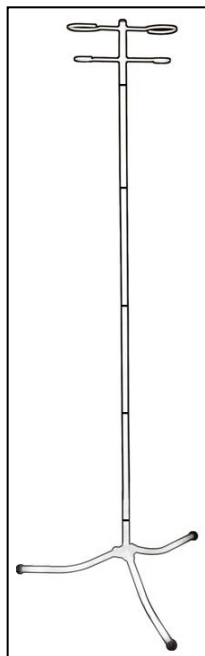

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за тканью (кожей)

1. Обычные очистительные химические средства могут повредить ткань (кожу).
2. Для выведения пятен с поверхности ткани следует использовать моющие средства на основе воды или легкие стиральные порошки.
3. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
4. Время от времени кожу следует протирать сырой тряпкой или губкой.
5. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на ткань (кожу) светлых тонов.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.