



Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008

Паспорт

СС-04-01.00.000 ПС

г. Волгоград

1. Назначение изделия

1.1. Столы для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008(далее по тексту стол) предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога. Показания к применению: для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.

2. Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Стол для стоматолога СС-04-01	1
2	Ящик	2
3	Ручка	2
4	Замок	2
5	Полка верхняя	1
6	Полка нижняя	1
7	Колесо Ø 40	4
Эксплуатационная документация		
8	Паспорт	1

3. Основные технические характеристики

3.1 Каркас изделия выполнен из стальной трубы Ø 18. Ящики изготовлены из металла и комплектуются замками. Столик перемещается на 4 поворотных пластиковых колесных опорах Ø 40 мм.

3.2 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032. Лакокрасочные покрытия столов по ГОСТ 9.401. Все металлические части изделия, кроме коррозионностойких имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания согласно МУ-287-113. При обработке рекомендуется применять способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе одного из следующих дезинфицирующих средств:

- металлические поверхности - раствором перекиси водорода 3,0 % по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства (Лотос, Лотос - автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс);

- неметаллические поверхности - раствором хлорамина 1,0 %.

3.3 Основные параметры и размеры.

3.3.1 Габаритные размеры ДхШхВ: 703х418х787(±4);

3.3.2 Габаритные размеры ящика с фасадом ШхВхГ: 235х140х301(±4);

3.3.3 Размеры ящика внутренние ШхВхГ: 200х90х300(±4);

3.3.4 Полка верхняя: 660х375 (±2);

3.3.5 Полка нижняя: 660х300 (±2);

3.3.6 Равномерно распределенная нагрузка на полку не более 5 кг;

3.3.7 Равномерно распределенная нагрузка на дно ящика не более 5кг;

3.3.8 Масса изделия: 18 ±1,8 кг.

4. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 5044

5. Правила транспортирования и хранения.

5.1 Столы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

5.2 Столы в исполнении УХЛ 4.2 в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150. Ящики со столами должны быть размещены не более, чем в два ряда.

6. Утилизация.

6.1 Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

6.2 Столы, после дезинфекции, подлежат утилизации в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

6.3 Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

6.4 Утилизацию (уничтожению) столов, не пригодных к эксплуатации, производят специализированные компании, имеющие соответствующие лицензии.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8. Свидетельство о приемке

Стол для стоматолога СС-04-01 по ТУ 9452-003-13726632-2008

Серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-003-13726632-2008 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

9. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Юридический адрес: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12.

Адрес производства: Россия, 400011, г. Волгоград, ул. Электросовская 70а, 70б, 70л.