

Паспорт

Весы ветеринарные wikiVET PT-300 напольные до 300 кг



2023 г

Оглавление

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
2.КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ	5
6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6
7.ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА	6

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДШВ	940*490*60мм 1200*800*60мм
Максимальный вес	300 кг
Градуировка шкалы	100 гр
Вес, кг	20 кг
Тип питания	От сети / аккумулятор

2.КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во, шт	Изображение
Платформа	1	
Дисплей	1	
Блок питания	1	

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Данное устройство использует источник переменного тока, поэтому питание должно иметь заземление;
2. Подключите дисплей к платформе и подключите блок питания.
3. Если необходимо обнулить вес нажмите кнопку «Zero»
4. Транспортировка весов осуществляется с помощью колесиков и ручки с боку платформы.
5. Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксид, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

6. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.
7. Запрещается допускать на рабочую поверхность нагрузку, превышающую допустимую

4.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.
2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.
3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.
4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.
5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия
6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы изделия не ограничен.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

Потребитель лишается гарантийного права в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2

Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____/_____/20____ г

М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)