

8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская – кушетка-стол массажная КСМ-02,

№ _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 9452-001-18732063-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата производства

Отметка ОТК

Производитель:

ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2

Тел.: 8 (495) 995-995-9
www.med-engineering.ru



ПАСПОРТ Мебель медицинская Кушетка-стол массажная КСМ-02



Арт. КСМ-02

Мебель медицинская
Кушетка-стол массажная арт. КСМ-02

1. Назначение

Мебель медицинская – кушетка-стол массажная КСМ-02 (далее – кушетка) предназначена для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений. Изделие используется для проведения массажных и косметических процедур.

2. Описание

- 2.1 Кушетка изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 9452-001- 18732063-2016 и имеет РУ №РЗН 2017/5682 от 20.04.2017.
- 2.2 Каркас кушетки изготовлен из стальных профильных труб с нанесением порошкового полимерного покрытия.
- 2.3 Мягкие элементы выполнены из фанеры, на которую уложен слой поролона, обтянуты искусственной кожей.
- 2.4 Кушетка поставляется в собранном и разобранном виде.
- Инструкция по сборке прилагается.

3. Технические характеристики

- 3.1 Габаритные размеры:
Высота — 730 мм
Длина — 2000 мм
Ширина — 700 мм
- 3.2 Угол наклона головной секции - от 0 до +45°
- 3.3 Допускаемая распределённая нагрузка (не более) 160 кг на ложе; 15 кг на подголовник
- 3.4 Масса изделия не более 31 кг:
- 3.5 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
- 3.6 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- изделие в разобранном или в собранном виде - 1 шт.
- паспорт, содержащий инструкцию по эксплуатации – 1 шт.
- инструкция по сборке – 1 шт.
- гарантийный талон – 1 шт.

Информация о каркасных деталях, крепежных изделиях и мягких элементах, входящих в комплект поставки, содержится в таблице

5. Правила эксплуатации и меры безопасности.

- 5.1. Использовать кушетку только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.
- 5.2. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.
- 5.3. Изделия не предназначены для эксплуатации вне помещения.
- 5.4. При использовании необходимо руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации.
- 5.5. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6. Хранение и транспортировка

- 6.1. Транспортировка изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
- упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°С до +40°С.
- 6.2. Изделие может храниться в течение 5 лет в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +40°С.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
- 7.2. На механические повреждения мягких элементов изделия, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ), данная гарантия не распространяется.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи конечному покупателю.
- 7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить гарантийный талон, товарно-транспортную накладную (или УПД), рекламацию и фото/видео материалы, которые могут помочь определить проблему.
- 7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
107076, г. Москва, ул. Электrozаводская д.29 стр. 2, 4 этаж, тел. (495) 642-86-62, 988-76-60, E-mail: service@med-engineering.ru