

5. Свидетельство о приемке.

Кушетка медицинская смотровая КМс-01, КМс-02 «Ока-Медик» .

_____ (число, месяц, год)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9452-012-70373441-2011 и признан для эксплуатации.

Контролер ОТК.

Мастер (нач. цеха)

_____ (личная подпись)

_____ (личная подпись)



ООО «Производственное предприятие Ока-Медик»

**Кушетки медицинские КМ-«Ока-Медик»
по ТУ 9452-012-70373441-2011, вариант исполнения:
КМс-01, КМс-02 -«Ока-Медик» - смотровая с подголовником**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

607100, г. Навашино, Нижегородской области,
ул. Дорожная, 13
8(83175) 5-54-84,5-65-15
OkaMedik2006@yandex.ru

Корешок талона на гарантийный ремонт КМс-01

_____ (подпись)

_____ (Дата заполнения талона)

Линия отреза

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик» 607100 г. Навашино
Нижегородская обл. ул. Дорожная 13. т. 8(83175) 5-54-84;5-65-15.

Талон №

На гарантийный ремонт кушетки медицинской смотровой КМс-01

_____ Продан _____
(дата изготовления) наименование

_____ торгового предприятия

М П Торгового предприятия _____
(подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

_____ (подпись) _____ (дата заполнения)

1. Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1 Кушетка предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении массажных процедур. Область применения – отделения лечебно-профилактических учреждений.

1.2 Габаритные размеры кушеток (ДхШхВ) :

КМс-01 «Ока-Медик» 1900х600х550 (+/- 5) мм с подголовником регулирующимся вручную с помощью гребёнок; КМс-02 «Ока-Медик» 1900х600х550 (+/- 5).

1.3 Вес кушетки в упаковке не более 50 кг.

1.4 Нагрузка на ложе кушетки не более 130 кг.

1.5 Средний срок службы не менее 5 лет.

1.6 Кушетки, по просьбе заказчика, могут изготавливаться разборными. При этом восемь крепёжных болтов поставляются ввёрнутыми в отверстия к которым крепятся ножки.

1.7 Комплектность см табл.

№	Наименование	Кол-во Шт.
1	Кушетка (плюс две ножки если разборная)	1
2	Упаковка	1
3	Паспорт	1

2. Устройство, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1 Кушетка состоит из мягкого, покрытого кожзамениателем ложа, ножек и подголовника регулируемого по углу наклона по отношению к горизонтали от 0° до 45°.

2.2 Порядок сборки кушетки (если кушетка поставляется в разобранном виде).

- Распакуйте комплект и очистите его от упаковочного материала.

- Отверните ключом на 10 четыре крепёжных болта ножки.

- Совместите крепёжные отверстия ножек с отверстиями на ложе (из которых вывернули болты).

- Зафиксируйте ножку четырьмя болтами надёжно затянув их.

- Проведите предыдущие операции со второй ножкой.

2.3 Для подготовке к работе, распакуйте кушетку и очистите её от упаковочного материала. Соберите кушетку согласно пункта 2.2 (если поставка осуществлялась в разобранном виде). Установите кушетку на ровной поверхности и убедитесь в отсутствии качки (зазор между одной из опор ножек и полом не должен превышать 3 мм). Выполните санитарную обработку кушетки.

2.4 Запрещается использовать неисправную кушетку.

3. Техническое обслуживание и сведения о консервации и упаковке .

3.1 Техническое обслуживание осуществляется перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации с периодичностью один раз в год. Техническое обслуживание заключается в проверке и подтяжке всех резьбовых соединений, проверке целостности рамы ложа и ножек, а также целостности самого ложа и его покрытия (визуально).

3.2 Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования кушетки, проводится на соответствие техническим характеристикам и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется (визуально) отсутствие погнутых, сломанных, изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надёжности закрепления всех резьбовых соединений.

3.3 Кушетки в упаковке производителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -35 до +50 °С и относительной влажности 98% при температуре 25 °С, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Кушетка в упаковке производителя может транспортироваться на любом виде транспорта.

3.4 Срок хранения без переконсервации – 3 года.

4. Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позже 6 месяцев со дня получения изделия потребителем.

4.2 В течении гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет кушетку или её части, пришедшие в негодность по вине производителя по предъявлению гарантийного талон, дефектной ведомости, составленной комиссией с заявкой на ремонт (замену), с указанием адреса где находится изделие и номера телефона контактного лица. Рекламации на кушетку подвергнутую ремонту потребителем (в гарантийный срок) не удовлетворяются.

