


1. Общие сведения.

1.1 Шкаф медицинский металлический (далее по тексту шкаф), предназначен для хранения медицинских принадлежностей, документации и т.п.

2. Техническая характеристика.

2.1. Общий вид и габаритные размеры шкафа.

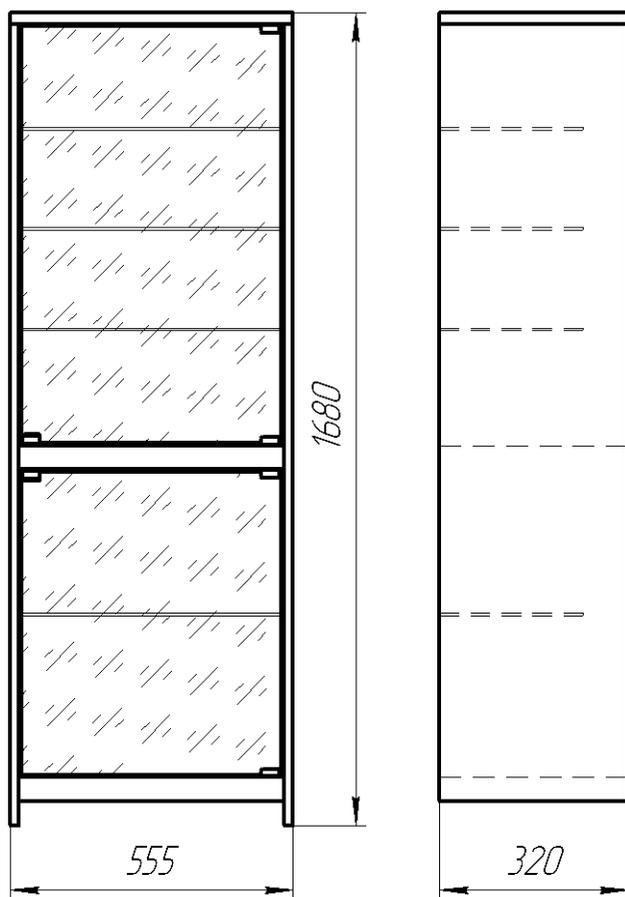

2.2. Шкаф изготовлен из холоднокатаной, листовой стали.

2.3. Конструкция шкафа обеспечивает фиксацию створок каждого отделения магнитной защелкой.

2.4. Створки и полки отделений – стекло толщиной 4мм.

2.5. Нагрузка на стеклянную полку не должна превышать 5кг.

3. Комплект поставки.

- шкаф – 1 шт.
- полки – 1 компл.
- створки – 1 компл.
- фурнитура для установки створок – 2 компл.
- паспорт – 1 экз.

4. Инструкция по сборке шкафов.

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить пластмассовые втулки в отверстия под петли на корпусе шкафа.
- 4.3. Установить петли стеклянных створок в пластмассовые втулки. При этом крепежные винты должны быть внутри.
- 4.4. Во внутрь петель вложить пластмассовые вкладыши. Со стороны крепежных винтов вложить металлический вкладыш.
- 4.5. Вставить стеклянную створку в петлю между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между створкой и каркасом шкафа. Затянуть крепежные винты, для надежной фиксации стекла в петлях.
- 4.6. Установить на место магнитный держатель и закрепить его винтами.
- 4.7. Вложить пластиковый вкладыш в ручку. Вставить ручку в нижнюю кромку стеклянной створки напротив магнитного держателя.
- 4.8. Уложить стеклянные полки на полкодержатели.

5. Правила транспортировки и эксплуатации.

- 5.1. Склады для хранения продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- 5.2. Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.
- 5.3. Запрещается:
 - ударять изделия друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
 - наступать и наезжать на упакованную продукцию;
 - перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

6. Свидетельство о приемке.

6.1. Шкаф соответствует рабочим чертежам и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления

Контролер ОТК

М.П.

7. Гарантии изготовителя.


- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа в течение 12 месяцев со дня отгрузки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
- 7.2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию шкафа не ухудшающих его потребительских свойств.
- 7.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, изготовитель ответственности не несёт.

Изготовитель: Россия г. Н.Новгород, пр.Гагарина, д.21/2, помещение ПЗ
ООО «Мебель-Групп»
Тел (831) 228-30-60
Тел./факс (831) 439-39-36
E-mail: 151@151.ru web-сайт: www.rommel.ru

ООО «Мебель-Групп»

ПАСПОРТ

Шкаф ШСС-1

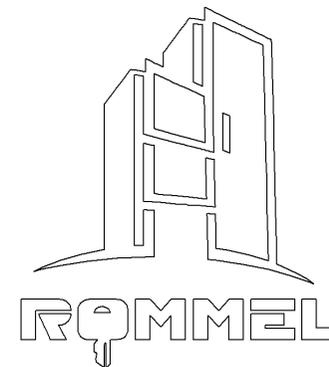

Нижний Новгород