

**Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных  
СИх-«ЭЛЕКТРА»  
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022  
МПЭЛ.942819.008 ХХ.12**

Стол СИх-«ЭЛЕКТРА» представляют собой медицинские изделия многоразового применения, предназначенные для размещения медицинского инструмента, медицинских приборов, перевязочного материала в стационарных и лечебно-профилактических учреждениях различного профиля при профилактике, диагностике, лечении и медицинской реабилитации. Область применения – хирургия.

Стол выполнен из высококачественной хромоникелевой нержавеющей стали, устойчивой к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.  
«Стол инструментальный модели СИх-«ЭЛЕКТРА»-ХХ.ХХ.» (первые две цифры определяют размер полки, третья цифра - количество полок, 4 цифра тип опор: 1 – колесная, 2 – регулируемая.

**Стол с одной полкой на регулируемых опорах**

№ п/п	Наименование модели	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Масса стола кг
1	СИх-«ЭЛЕКТРА»-01.12	800	600	850	16
2	СИх-«ЭЛЕКТРА»-02.12	800	700	850	17
3	СИх-«ЭЛЕКТРА»-03.12	800	800	850	18
4	СИх-«ЭЛЕКТРА»-04.12	1000	600	850	18
5	СИх-«ЭЛЕКТРА»-05.12	1000	700	850	19
6	СИх-«ЭЛЕКТРА»-06.12	1000	800	850	20
7	СИх-«ЭЛЕКТРА»-07.12	1200	600	850	19,5
8	СИх-«ЭЛЕКТРА»-08.12	1200	700	850	20,7
9	СИх-«ЭЛЕКТРА»-09.12	1200	800	850	22
10	СИх-«ЭЛЕКТРА»-10.12	1400	600	850	22
11	СИх-«ЭЛЕКТРА»-11.12	1400	700	850	23,7
12	СИх-«ЭЛЕКТРА»-12.12	1400	800	850	25,5
13	СИх-«ЭЛЕКТРА»-13.12	1600	600	850	25
14	СИх-«ЭЛЕКТРА»-14.12	1600	700	850	26
15	СИх-«ЭЛЕКТРА»-15.12	1600	800	850	27
16	СИх-«ЭЛЕКТРА»-16.12	1800	600	850	30
17	СИх-«ЭЛЕКТРА»-17.12	1800	700	850	31,7
18	СИх-«ЭЛЕКТРА»-18.12	1800	800	850	33,5
19	СИх-«ЭЛЕКТРА»-19.12	2000	600	850	32
20	СИх-«ЭЛЕКТРА»-20.12	2000	700	850	33,5
21	СИх-«ЭЛЕКТРА»-21.12	2000	800	850	35

Стол должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку, максимальная нагрузка на полку 20 кг. Средний срок службы стола должен быть не менее 8 лет.

**Устройство изделия**

Стол представляет собой каркас на регулируемых опорах Ø31, выполненный из нержавеющей стали и прошедший электрохимическую полировку. На каркасе располагается одна полка, выполненная из листовой зеркальной нержавеющей стали.

### Подготовка к работе

Распакуйте стол очистите его от упаковочного материала и защитной пленки. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию стола дезинфицирующими средствами, утвержденными в установленном порядке.

### Порядок работы

Стол поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

Объем работ	Методика технического обслуживания
Внешний вид	Осмотр стола на отсутствие внешних повреждений
Проверка стола на отсутствие зазора между опорой и полом	Стол, оснащённый регулируемыми опорами, необходимо выставить в горизонтальное положение вращая нижнюю часть опоры до устранения зазора с полом.

### Ремонт

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой зазор между опорой и полом	Неотрегулированная опора.	Отрегулировать
Большое усилие прикладывается для вращения опоры	Нарушено резьбовое соединение	Заменить регулируемую опору на новую.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества стола **СИХ-01-«ЭЛЕКТРА»** в течение всего срока годности требованиям технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022**, национальных стандартов и документации производителя при соблюдении правил транспортирования, хранения и правильного применения.

Изготовитель не несет ответственности за причиненный вред, который был нанесен самостоятельной модернизацией или неквалифицированным использованием изделия. Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделия – 1 год с даты выпуска.

Производитель имеет право без согласования вносить конструктивные изменения, улучшающие функциональность изделия.

### Свидетельство о приемке

Стол инструментальный из нержавеющей стали для операционных и перевязочных модели **СИХ-«ЭЛЕКТРА»** - \_\_\_\_\_ - 12, серийный номер - б/н. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующих технических условий **ТУ 32.50.30-008-39548518-2022** и признан годным к эксплуатации

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

МП

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока  
Стол инструментального СИХ-«ЭЛЕКТРА» - \_\_\_\_\_ - 12 по ТУ 32.50.30-008-39548518-2022  
Зав. номер: б/н.

Дата выпуска: 02.2025 г.

Приобретен \_\_\_\_\_  
(заполняется торгующей организацией, дата, подпись, штамп)

Введен в эксплуатацию \_\_\_\_\_  
(дата подпись)

Принят на гарантийное обслуживание \_\_\_\_\_  
(заполняется ремонтным предприятием)

подпись и печать  
руководителя  
ремонтного предприятия

подпись и печать  
руководителя  
учреждения владельца