



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЦИТО»Росздрава

125299, Москва, ул.Приорова, 10

тел 450-39-11 факс 450-41-86

ГРУЗЫ ДЛЯ СКЕЛЕТНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ



ИМ02

Грузы применяются при лечении методом скелетного вытяжения.

1. Технические данные

1.1. Грузы изготовлены из конструкционной стали марок 10, 15, 20 и 25 ГОСТ 1050-88 с защитным никелевым покрытием по ГОСТ 9.303-89.

2. Состав изделия и комплект поставки

В комплект поставки входят:

- грузы (весом 1, 2, 3 и 5 кг — по одному каждого веса) — 1 комп.;
- паспорт — 1 экз.

3. Подготовка к работе

3.1. Провести расконсервацию грузов.

3.2. Провести осмотр и проверку комплектности согласно п. 2.

3.3. Перед применением и в процессе дальнейшей эксплуатации грузы необходимо подвергнуть обработке дезинфицирующим раствором.

4. Методика применения

Грузы подбираются с учетом необходимой нагрузки при лечении методом скелетного вытяжения.

Грузы навешиваются на подвесной крюк держателя, разворачиваются под прямым углом и устанавливаются на дисковую площадку.

При увеличении или уменьшении нагрузки грузы соответственно добавляются или убираются.

5. Консервация и хранение

5.1. Грузы упакованы на ФГУП «ЦИТО» Росздрава для условий хранения 2(С): ВЗ-0, ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

5.2. Грузы должны храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ в упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации могут храниться и без упаковки.

5.3. Воздух помещения, в котором хранятся грузы, должен иметь нормальную влажность и не содержать коррозионно-активных примесей.

6. Свидетельство о приемке

Грузы для скелетного вытяжения соответствуют требованиям ТУ 9452-155-01894927-98 и признаны годными для эксплуатации.

Подпись _____

Штамп ОТК

Дата « ____ » _____ 200 ____ г.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие грузов для скелетного вытяжения требованиям ТУ 9452-155-01894927-98 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев, гарантийный срок хранения — 3 года.

7.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем замены.

7.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.