

**Адрес изготовителя:**

Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г  
ООО «Айболит-2000»  
Тел. (831) 468-06-73  
Факс (831) 417-89-98, 468-86-60

Дата изготовления \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

**Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что при соблюдении правил и условий эксплуатации изделие будет долго служить Вам.**

**ООО «Айболит-2000»  
Производство медицинской мебели**

**ПАСПОРТ**

**Стол массажный регулируемый  
СМ-1-«Айболит»  
ГОСТ Р 50444-2020**

ТУ 9452-012-51768895-2007

г. Нижний Новгород

### 1. Назначение

Стол массажный регулируемый СМ-1 (в дальнейшем стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений, косметологических и массажных кабинетов.

### 2. Комплект поставки.

Стол массажный регулируемый СМ-1	– 1
Паспорт	- 1

### 3. Инструкция по сборке

- 3.1. Распаковать стол. Снять транспортировочные распорки из трубы (4 шт).
- 3.2. Подсоединить пульт управления к блоку управления штекером.

### 4. Правила эксплуатации

- 4.1. **Электропривод, питание от сети 220V**  
Внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
- 4.2. **Не допускать попадания воды на электропривод.**

### 5. Правила ухода

- 5.1. Стол эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях с температурой воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажностью воздуха до 80% при 25 °С .
- 5.2. Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия влаги, тепла и применяемых в медицинских учреждениях растворителей, щелочей и кислот.
- 5.3. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16.

### 6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 6.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.