



**ООО «Горское»**

142400, Московская область, г. Ногинск,

ул. 200 лет города, дом 2

Тел: 8-800-444-06-65

e-mail: [info@gorskoye.com](mailto:info@gorskoye.com)

[www.gorskoye.com](http://www.gorskoye.com)

Сделано в России



**ООО «Горское»**

142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 200 лет города, дом 2

Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

## **ПАСПОРТ**

**Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-"Горское"**

по ТУ 9452-005-49894635-2011

**Вариант исполнения КГУ-05.00 «Горское»**



Год выпуска 2023

# Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.00 «Горское»

ТУ 9452-005-49894635-2011

Зав. № \_\_\_\_\_

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.00 «Горское» механическое, предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и процедур.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 2.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.00 «Горское» состоит из кресла и навесных приспособлений.
- 2.2. Каркас кресла изготовлен из стальных труб с порошковым покрытием.
- 2.3. Кресло стоит на основании – «краб», на которое крепится стойка.
- 2.4. Мягкие элементы кресла: спинка, сидение, крепятся через раму на стойку.
- 2.5. Подколенные упоры регулируются по высоте и углу поворота.
- 2.6. Подколенные упоры выполнены из интегрального пенополиуретана, эргономичные по форме, легко обрабатываются санитарными растворами, не требуют дополнительных чехлов из винилискожи.
- 2.7. Кресло укомплектовано выдвижным поддоном из нержавеющей стали  $\varnothing$  260 мм. Выдвижение поддона из-под сидения осуществляется методом поворота.
- 2.8. Угол наклона спинки осуществляется механически при помощи механизма «растомат» дискретно от  $0^\circ$  до  $80^\circ(\pm 5^\circ)$  относительно горизонтали.
- 2.9. Угол наклона сидения – не регулируется.
- 2.10. Кресло имеет четыре регулируемые опоры, которые позволяют устранить неровности пола.
- 2.11. Кресло укомплектовано опорными ручками.
- 2.12. Кресло укомплектовано приставной ступенью.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Габаритные размеры кресла:
  - длина ложа – 1320 ( $\pm 20$ ) мм;
  - ширина – 700 ( $\pm 10$ ) мм;
  - высота – 1710 ( $\pm 10$ ) мм.
  - высота до сидения – 910 ( $\pm 10$ ) мм.
- 3.2. Размеры панелей кресла:
  - спинка – 880 ( $\pm 10$ ) мм x 550 ( $\pm 10$ ) мм;
  - сидение – 420 ( $\pm 10$ ) мм x 550 ( $\pm 10$ ) мм;
- 3.3. Спинка кресла может менять угол наклона от  $0^\circ$  до  $80^\circ(\pm 5^\circ)$  относительно горизонтальной оси.

- 3.4. Масса кресла – 29 кг±5% без упаковки и 31 кг±5% с упаковкой в 5-тислойный гофрокороб.
- 3.5. Кресло выдерживает рабочую нагрузку не менее 160 кг.
- 3.6. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на кресло – 180 кг.
- 3.7. Габаритные размеры упаковки: ДхШхВ = 1060 x 680 x 505 мм.
- 3.8. Кресло транспортируется в разобранном виде.

#### **4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА**

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 9452-005-49894635-2011 и ГОСТ Р 50444-92 (Рр. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
- 4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Штамп производителя

Дата выпуска:

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи:

Печать организации, продавшей изделие