

5. Условия хранения и эксплуатации.

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

7. Адрес изготовителя:

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск

Ул. Студенческая д.30 офис 121

ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»

Тел./факс (8313)25-35-78

Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления _____ 20__ г.

Упаковщик_____

Паспорт

Тумба

ТП 1/03

(на опорах или колесах)



РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская

по ТУ 5620-001-36725405-2015

г. Дзержинск.

1. Назначение и конструкция.

- 1.1. Тумба предназначена для хранения личных вещей и использования в качестве столика.
 1.2. Тумба изготовлена из ламинированной ДСП.

2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
700	450	450	30

3.Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Стенка боковая (594*430)	2
2	Крыша (450*450)	1
3	Дно (450*430)	1
5	Задняя стенка ДВПО (624*448)	1
6	Панель ниши (416*430)	1
7	Фасад ящика (200*448)	2
8	Задняя стенка ящика (360*120)	2
9	Боковые стенки ящика (400*120)	4
10	Дно ящика ДВПО (390*398)	2
11	Ручка	2
13	Стяжка эксцентриковая	4
14	Стяжка винтовая (евровинт)	16
15	опоры/колеса	4
16	Винт М 4*35	4
18	Саморез 3,5*16	32
19	Направляющие роликовые L400, комплект	2
20	Гвозди 1*20	52
21	Ключ шестигранный	1
22	Заглушки	8
23	Паспорт	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

4. Инструкция по сборке.

Сборка должна производиться квалифицированным специалистом. Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

- 4.1. Распаковать компоненты тумбы.
- 4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с панелью ниши 6 и дном 3.
- 4.3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 19 к боковым стенкам 1.
- 4.4. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми стенками 1.
- 4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 4.6. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 5 к задней поверхности каркаса тумбы.
- 4.7. Собираем ящик. При помощи ключа 21 и винтовых стяжек 14 соединить боковые стенки ящика 9 с задней стенкой 8. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 10.
- 4.8. Положить тумбу крышкой вниз и установить опоры 15 при помощи саморезов 18.
- 4.9. Поставить тумбу в исходное положение. Закрепить ручки на фасадах. Установить ящики в каркас тумбы.
- 4.10. При помощи отвертки отрегулировать фасады.

