



Рисунок 1 Столик медицинский стоматологический
(гинекологический, урологический) СМс-8 «Ока-Медик»

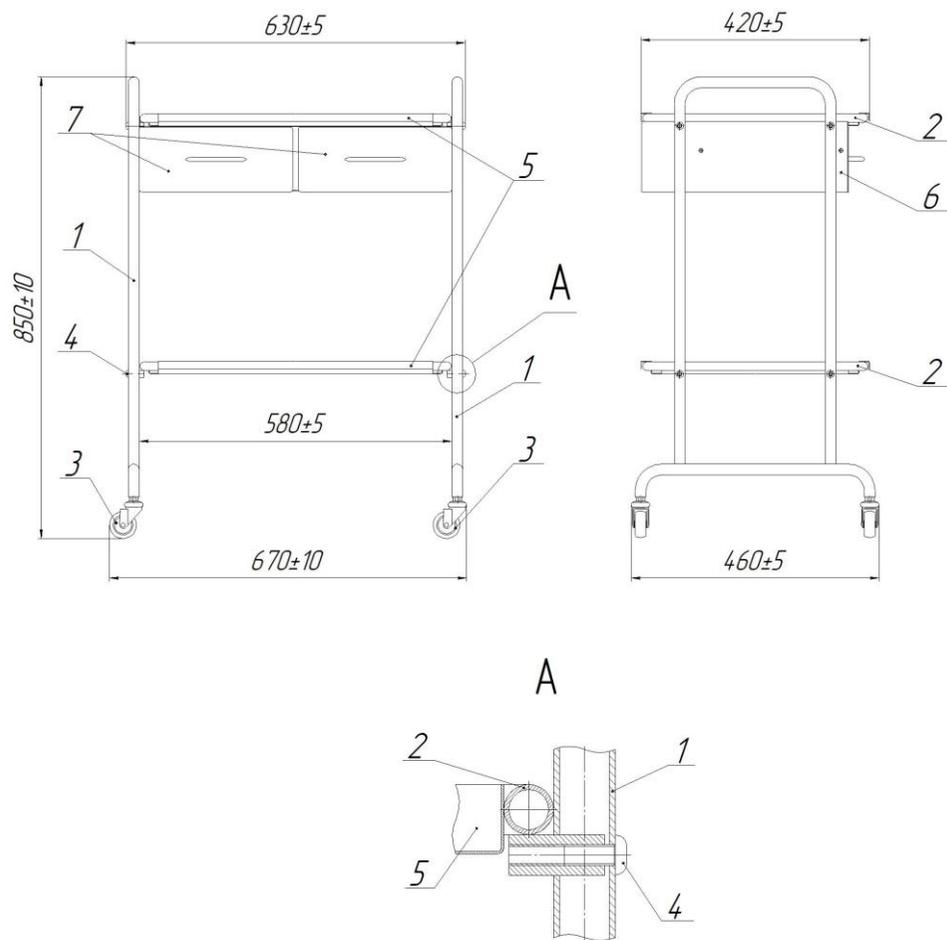

- Габаритные размеры указаны для столов с колесами на резиновой шинке диаметром 50 мм.

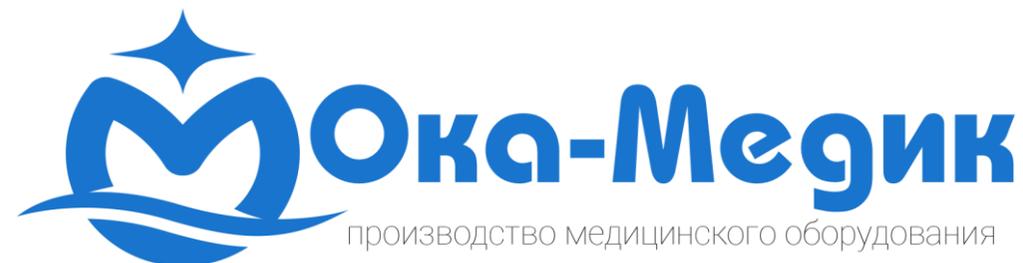

ООО «Производственное предприятие Ока-Медик»

**Столики медицинские СМ-«Ока-Медик»
по ТУ 9452-004-70373441-2008, вариант исполнения:**

**Столик медицинский стоматологический
(гинекологический, урологический) СМс-8 «Ока-Медик»**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

607100, г. Навашино, Нижегородской области,

ул. Дорожная, 13

8(83175) 5-65-15, 5-54-84

OkaMedik2006@yandex.ru

okamedik.ru

Столик медицинский стоматологический (гинекологический, урологический) СМс-8 «Ока-Медик»

Паспорт ПОМ. СМс-8.00.000 ПС

1. Назначение, технические характеристики, комплектность.

1.1. Столик предназначен размещения, транспортировки и перемещения (в отделениях лечебного учреждения) медицинских инструментов, медикаментов, препаратов, перевязочных материалов, раскладки стерильных хирургических инструментов, шовного материала. Применяется в стоматологических, гинекологических, урологических, процедурных кабинетах лечебных учреждений всех профилей.

Противопоказания: отсутствуют.

Побочные действия: отсутствуют

1.2. Габаритные размеры столика. см. рисунок 1.

1.3. Габаритные размеры верхней панели см. рисунок 1.

1.4. Масса, не более кг. 15

1.5. Предельная нагрузка на столешницу, кгс 37,5
на дно ящика, кгс 5

1.6. Предельно допустимое усилие для перемещения столика, кгс 5

1.7. Средний срок службы, не менее лет. 8

1.6. Комплектность см таблицу.

Таблица 1

№	Наименование	Обозначение	Кол-во шт.	Позиция по рис.
1	Столик медицинский стоматологический СМс-8 «Ока-Медик»	ТУ 9452-004070373441-2008	1	Рисунок 1
2	Паспорт	ПОМ СМс-8.00.000 ПС	1	-

Примечание: - В базовом варианте исполнения столика – диаметр колес 50 мм. Крепежные изделия поставляются установленными в места креплений или уложенными в пакет. Возможна поставка с частичной разборкой (снятые колеса, лоток) они укладываются в отдельные пакеты и фиксируются в упаковке. По просьбе заказчика столик может комплектоваться колесами на резиновой шинке или мебельными (пластмассовыми) колесами диаметром до 150 мм.

2. Устройство, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности.

2.1 Столик (см. рис. 1) состоит из боковин (поз. 1), рамок (поз. 2), закрепленных между боковинами, с закрепленными на них панелями (поз. 5). Футляра (поз. 6) закрепленного между боковин, выдвижного ящика (поз. 7) (два ящика), закрепленного в футляре на направляющих. И самоориентирующихся колес (поз. 3) закрепленных в основании боковин. Крепление перечисленных элементов осуществляется согласно (рис. 1).

2.2. Порядок сборки столика Распакуйте набор деталей для столика и очистите их от упаковочного материала. Возьмите боковину (поз. 1) вставьте в отверстия боковины рамки (поз. 2), закрепите их болтами М8 (поз. 4). Аналогично совместите отверстия во второй боковине с выступами рамок и так же закрепите их болтами М8. Приверните колеса (поз. 3) как показано на (рис. 1) и надежно закрепите их. Поставьте столик на колёса. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты.

2.3. Для подготовки к работе, распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. И удалите антикоррозионную смазку, протираяем насухо тампоном из марли, смоченную спиртом, проведите техническое обслуживание согласно документу 3 паспорта. Выполните санитарную обработку.

2.4. Запрещается использование неисправного столика. Во избежание падений предметов на полках и опрокидывания столика избегайте резких рывков или ударов столика при его перемещении.

3. Техническое обслуживание и сведения о консервации и упаковке.

3.1. Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации (периодичность раз в год) заключается в проверке и подтяжке всех видов резьбовых соединений, проверке целостности колес, замене при необходимости годными деталями поломанных или изношенных и санитарной обработке столика.

3.2. Проверка технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования столика, проводится на соответствие технических характеристик и комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых, сломанных, изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежности крепления всех резьбовых соединений, вращение колес вокруг своей оси и вокруг вертикальной оси.

3.3. Столики в упаковке изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -50⁰ С до +50⁰ С и относительной влажности 98% при 25⁰ С, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Столик в упаковке изготовителя может транспортироваться на любом виде закрытого транспорта.

3.4. Срок хранения без переконсервации – 3 года.

4. Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях.

4.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяце со дня получения изделия потребителем.

4.2. В течении гарантийного срока изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет столик, или его части, пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлению гарантийного талона, дефектной ведомости, составленной комиссией с заявкой на ремонт (замену), с указанием адреса, где находится изделие, номера телефона. Рекламации на столик и его части, подвергнутые ремонту потребителем (в гарантийный срок) не удовлетворяются.

Примечание: Если столик укомплектован пластмассовыми колесами, срок гарантии колес 6 месяцев.

5. Свидетельство о приемке.

Столик медицинский стоматологический (гинекологический, урологический) СМс-8 «Ока-Медик»

(число, месяц, год)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9452-004-70373441-2007 и признан для эксплуатации.

Контролер ОТК.

Мастер (нач. цеха)

(личная подпись)

(личная подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Корешок талона на гарантийный ремонт СМс-8

(подпись)

(Дата заполнения талона)

Линия отреза

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик» 607100 г. Нава-
шино Нижегородская обл. ул. Дорожная 13. т. 8(83175) 5-65-15.

Талон №

На гарантийный ремонт столика медицинского стоматологического СМс-8

Продан _____
(дата изготовления) наименование

_____ торгового предприятия

М П Торгового предприятия _____
(подпись продавца)

Владелец и его адрес _____

(подпись) (дата заполнения)