



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦИТО» Минздравсоцразвития России
127299, Москва, ул. Приорова, д.10, телефон 450-39-11

УГЛОМЕР ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ


Паспорт
401.64.00.00ПС



ИМ 13

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Угломер ортопедический предназначен для измерения углов сгибания суставов, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника.

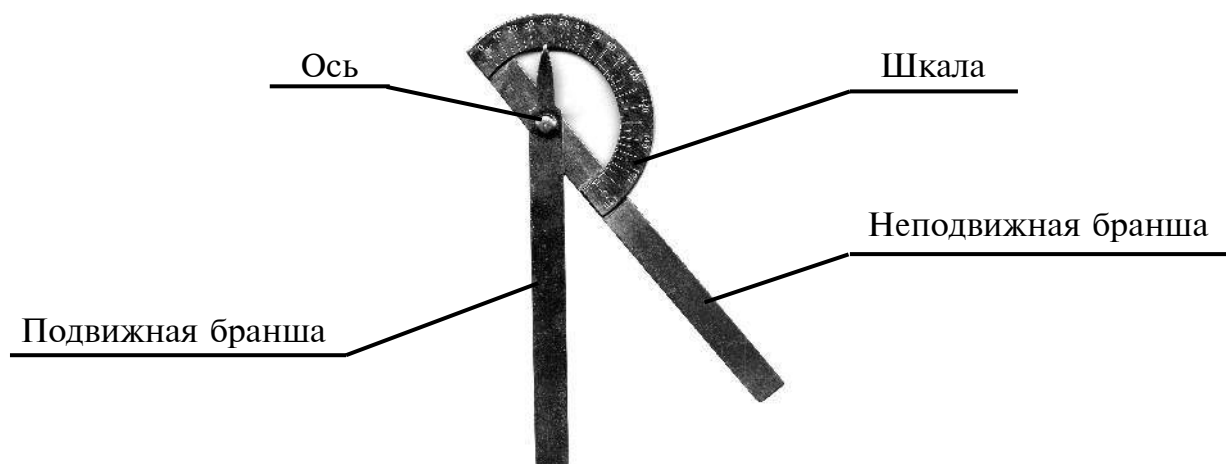

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Угломер обеспечивает измерение углов поворота в суставах и угловых отклонений оси позвоночника от 0°С до 180°С.

2.2. Угломер выпускается в двух вариантах:

- большой (длиной 370мм);
- малый (длиной 210мм).

2.2. Габаритные размеры угломера (мм):

	большой	малый
длина	$370\pm 0,5$	$210\pm 0,5$
ширина	$58\pm 0,5$	$58\pm 0,5$
толщина	$13\pm 0,3$	$13\pm 0,3$

2.3. Угломер изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

2.4. Масса угломера ортопедического:

- большого — $0,168\pm 0,01$ кг;
- малого — $0,107\pm 0,01$ кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В каждый комплект поставки угломера ортопедического большого (или малого) входят:

- угломер — 1шт.
- паспорт с инструкцией по эксплуатации — 1 экз.;
- этикетка — 1шт.

4. УСТРОЙСТВО (см. рисунок)

4.1. Угломер состоит из неподвижной бранши, на которой крепится шкала с делениями от 0°С до 180°С, и подвижной бранши-указателя, вращающейся вокруг оси.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Провести расконсервацию и осмотр изделия.

5.2. Проверить комплектность согласно п.3 настоящего паспорта.

6. ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1. При измерении углов сгибания в суставах неподвижная бранша угломера располагается вдоль продольной оси проксимальной (неподвижной части) конечности, а подвижная бранша —указатель устанавливается вдоль продольной оси дистальной части, выполняющей движение, и ее конец на шкале показывает угол сгибания в суставе.

6.2. При определении кривизны оси позвоночника неподвижная бранша угломера располагается вдоль основной оси позвоночника, а подвижная бранша-указатель перемещается до совмещения с осью искривленной части позвоночника, и ее конец на шкале показывает угол искривления позвоночника.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Угломер ортопедический соответствует требованиям
ТУ 9452-162-01894927-2005 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата “___” _____ 200__ г.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 6 месяцев при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения - 3 года.

8.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 3 месяцев со дня получения продукции потребителем.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно устраняет дефекты, возникшие по его вине, путем бесплатного ремонта или замены изделия (или его составных частей).

8.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения изделия в результате неправильной эксплуатации и хранения.

9. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

9.1. Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в установленном порядке с приложением технически обоснованного акта и настоящего паспорта по адресу:

127299, Москва, ул. Приорова, 10,

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО»,

факс/тел. (095) 450-41-86 (круглосуточно),

тел. 450-39-11 (отдел сбыта).

10. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Изделие должно храниться в закрытых помещениях при температуре от -10°C до +40°C и относительной влажности не более 98% при +25°C.