


Крепление мягких элементов

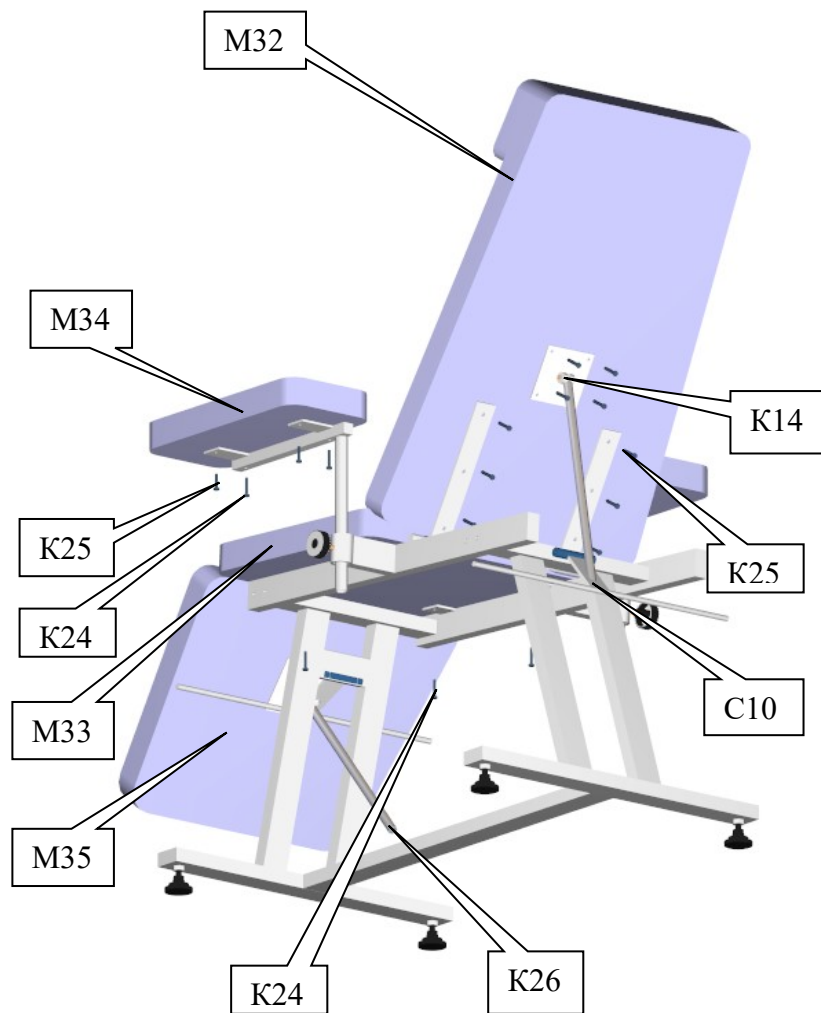

Кресло медицинское К-023ДН

Инструкция по сборке Комплектация

Обозначение	Наименование детали	Кол-во (шт.)	Примечание
Детали			
С 1	Стойка передняя	1	
С 2	Стойка задняя	1	
С 3	Подлокотник (левый, правый)	2	
С 4	Ригель (левый, правый)	2	
С 5	Навес спинки (левый, правый)	2	
С 6	Опора подушки для ног	1	
С 7	Опора спинки	1	
С 8	Штифт опоры подушки для ног	2	
С 9	Переходная втулка подлокотника	2	
С 10	Узел упора наклона спинки	1	
С 11	Узел упора наклона подножки	1	
Крепежные изделия			
К 11	Опора М10	4	
К 13	Болт М8х40	8	Крепление С1,С2 и С4
К 14	Болт М8х50	2	
К 15	Болт М10х70	2	
К 16	Шайба D внутр. Ø8 мм.	12	
К 17	Шайба D внутр. Ø10 мм	2	
К 18	Петли подушки для ног №538 (большая)	2	Сверлить 6 отверстия Ø8 мм.
К 19	Ручка фиксатор	2	
К 20	Шайба стопорная D=8	4	
К 22	Гайка самоконтрящаяся М8	2	
	Шайба стопорная 5	4	
К 24	Винт М6х16с прессшайбой	4	
К 25	Винт М6х25 с прессшайбой	6	
К 26	Шайба стопорная D=12	2	
К 27	Винт М6х20	28	
К 29	Ручка оливка	4	
К 30	Штифт 95 мм.	2	
К 31	Саморез М4х19	4	
Мягкие элементы			
М 32	Подушка спинки	1	
М 33	Подушка сиденья	1	
М 34	Подушка подлокотника	2	
М 35	Подушка для ног	1	

К36	Заглушки 50x25	8	
К37	Заглушки 30x15	4	
К38	Заглушка №8	12	
К39	Заглушка №10	2	
К40	Шток опоры для ног L-350 мм.	1	
К41	Шток спинки L-570 мм.	1	
К42	Шток подлокотника	2	

Сборка кресла

1. Подготовить рабочее место и инструмент: ключи гаечные S 13.17, отвертка крестовая № 2, шило.
2. Распаковать изделие, проверить целостность деталей и комплектность.
3. Ввернуть в основания стоек поз. С1, С2 опоры К11.
4. Собрать основной каркас, скрепив стойки С1 и С2 с ригелями С4 болтами К13. Под головки болтов, перед их ввинчиванием, подложить шайбы К16
5. Надеть на оси ригелей С4 навесы спинки С5.
6. Установить на каркас штифтом К30 узел упора наклона подножки С11 с отверстием Ø 17 мм.
7. Установить на каркас штифтом К30 узел упора наклона подножки С10 с отверстием Ø 17 мм.
8. Установить по разметке и закрепить на подушке для ног М35 опору С6 винтами К27.
9. Установить по разметке и закрепить на подушке спинки М32 опору С7 винтами К27.
10. Соединить с помощью петель К18 подушку для ног М35 с подушкой сиденья М 33. Петли крепить винтами К27 и саморезами.
11. Установить на каркас подушки и закрепить винтами К27.
Закрепить на подлокотниках С3 подушки М34 с помощью винтов К24 и К25
12. Вставить в каркасные направляющие подлокотников втулки С9 из копролона, если они не были установлены на предприятии изготовителе.
13. Установить на каркас подлокотники и зафиксировать в нужном положении ручками-фиксаторами К19.
14. Вставить шток опоры для ног К40 в отверстие штока угла наклона подножки С11 соединить с опорой подножки С6, в проточку штока К40 установить стопорную шайбу К26.
15. Вставить шток спинки К41 в отверстие штока узла наклона спинки С10 соединить с опорой спинки С7, в проточку штока К41 установить стопорную шайбу К26.
16. Болты и гайки закрыть заглушками.

Сборка каркаса

