

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется организацией, вводящей изделие в эксплуатацию

Стол пеленальный (смотровой) _____

обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

б) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Стол пеленальный (смотровой): _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

Изделие изготовлено, упаковано и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признано годным для эксплуатации.

ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ (СМОТРОВОЙ)

СП.01.00; СП.02.00; СП.03.00; СП.04.00; СП.05.00

Паспорт

СП.00.00.2014.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5.	РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5
6.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	6
7.	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ	8

- 5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.
- 5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- 5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.3 Утилизация

- 5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а так же в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.
- 5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.
- 5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4 Гарантии изготовителя

- 5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
- 5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1, ООО МК «АСК».

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незавершенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1 **Наименование изделия:** Стол пеленальный (смотровой): СП.01.00; СП.02.00; СП.03.00; СП.04.00; СП.05.00. Далее по тексту – изделие, стол.
Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений: набор мебели для медицинских кабинетов, набор мебели для медицинских палат медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014».
Регистрационное удостоверение РЗН 2024/23329 от 08.08.2024г.
- 2.2 **Сведения о производителе:** ООО МК «АСК».
Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.
Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.
Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Специфичное назначение изделия:

Наименование изделия	Назначение
Стол пеленальный (смотровой): СП.01.00; СП.02.00; СП.03.00; СП.04.00; СП.05.00.	Предназначено для проведения медицинского осмотра, медицинских процедур, пеленания и ухода за новорожденными в смотровых, диагностических, процедурных, терапевтических кабинетах, в больничных и реанимационных палатах медицинских организаций.

- 2.4 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).
- 2.5 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
- 2.6 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:
- группа 2
 - Стол пеленальный (смотровой): СП.01.00; СП.02.00; СП.03.00; СП.04.00; СП.05.00.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- 3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).
- 3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжелыми твердыми предметами.
- 3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

- 3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.
- 3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.
- 3.6 Не допускайте раскачивания изделия.
- 3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.
- 3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.
- 3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры ШхГхВ, мм	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг	Конструктивные особенности
Стол пеленальный (смотровой)				
СП.01.00	1010×720×1000	35	столешница-20 полка-10	Ложе с бортиками, полка. Устанавливается на регулируемые опоры.
СП.02.00	1010×720×1000	54	столешница-20 полка-10	Ложе с бортиками, полка, две дверки. Устанавливается на регулируемые опоры.
СП.03.00	880×730×960	25	столешница-20 полка-10	Ложе с бортиками, полка. Устанавливается на регулируемые опоры.
СП.04.00	600×700×950	15	столешница-10 полка-10	Ложе с бортиками, полка. Устанавливается на регулируемые опоры.
СП.05.00	900×700×1000	45	столешница-10 полка-10	Ложе с бортиками, полка, две дверки. Устанавливается на колесные или регулируемые опоры.

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Стол пеленальный (смотровой)	СП.01.00; СП.02.00; СП.03.00; СП.04.00	-	+	-
2	Стол пеленальный (смотровой)*	СП.05.00	75	+	-

Примечание:

*- изделие может устанавливаться на колесные опоры или на регулируемые опоры.

4.3 Общие виды изделий показаны в таблице 4.

Таблица 4.

Конструктивные особенности, изображение	
 <p>СП.01.00</p>	 <p>СП.02.00</p>
 <p>СП.03.00</p>	 <p>СП.04.00</p>
 <p>СП.05.00</p> <p>а - вариант стола, установленного на колесные опоры</p>	 <p>СП.05.00</p> <p>б - вариант стола, установленного на регулируемые опоры</p>

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 **Срок службы.** Средний срок службы - 8 лет. За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

5.2 Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.