

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МАТРАС ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ

Мы благодарны Вам за использование противопролежневой системы - матрас противопролежневый.


Прежде, чем использовать противопролежневую систему, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание: пожалуйста, имейте в виду, что применение данной системы должно полностью соответствовать этой инструкции, иначе продукт может быть повреждён. Пожалуйста, проводите дезинфекцию, руководствуясь этой инструкцией.


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пролежни являются серьёзной проблемой для прикованных к постели пациентов, особенно для тех, кто не может поворачиваться. Из-за долгого контакта с поверхностью кровати, кожа начинается воспаляться и этот процесс развивается. Язва причиняет серьёзную боль пациенту помимо основного заболевания, таким образом, уход за пациентами становится намного тяжелее. Стандартный противопролежневый матрас несёт в себе предохранительную функцию, а не восстановительную. Их основная цель - уменьшить давление тела на кровать, а не лечить пролежни.

Противопролежневая система - матрас с компрессором состоит из воздушных ячеек. Они поочерёдно накачиваются, образуя 2 группы А и В, и, соответственно, меняют точно давления тела. Рисунок 1.

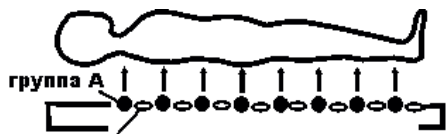

группа А наполнена воздухом, в это время - группа В - пустая

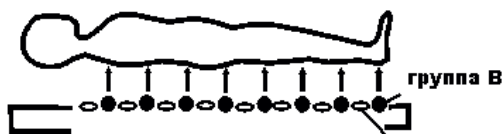

группа В наполнена воздухом, в это время - группа А - пустая

2. СТРУКТУРА И ПАРАМЕТРЫ

Комплектность:

Матрас противопролежневый - 1.


Трубка пластиковая - 2 (сдвоенная).

Насос воздушный (компрессор) - 1.

Ремкомплект - 1.

Паспорт - 1.

На панели воздушного насоса есть световой индикатор и диск переключения давления. Смотри Рисунок 2.

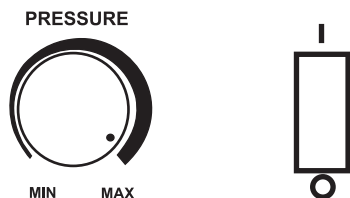

На обратной стороне воздушного насоса есть СЕТЕВОЙ ПРОВОД, 2 ПОРТА ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА и ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

Технические характеристики:

- Размер Матраса (в рабочем состоянии), длина x ширина x высота: 1950 x 950 x 65 мм
- Размер блока управления (не более): 225 x 120 x 100 мм
- Рабочее давление: 20 +/- 1 кПА
- Уровень шума работающего компрессора не более 45 дБА.
- Допустимая нагрузка (не менее): 120 кг
- Работа: непрерывная
- Блок питания: переменный ток 230 В ± 10%, 50 Hz ± 2%
- Потребление мощности: 10 Вт; ток 0,06 А
- Предохранитель RT1-20, Ф5х20
- Класс электробезопасности: Класс II
- Работа: непрерывная
- Защита от электричества: Тип В
- Вес: 3 кг

3. МЕТОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

1) Размещение ВОЗДУШНОГО МАТРАСА

Матрас должен лежать вверх стороной, накаченной воздухом.

НАСОС должен устанавливаться в "ногах" пациента, если шум воздушного потока беспокоит его. Для использования противоположной системы в кровати, сделанной из жёсткого материала необходимо постелить лёгкое одеяло под матрац.

2) Размещение подстилки

Сверху матраца рекомендуется использовать подстилку из лёгкого тканевого материала, пропускающего воздух.

3) Подсоединение воздушной трубки

Нельзя допускать перегибов трубки, т.к. из-за этого может нарушиться воздушный поток.

4) Подключение воздушного насоса

Подключите воздушный насос к питанию и нажмите ON ("0" означает выключить, "1" - включить). Затем световой индикатор станет зелёным и насос будет работать. По мере как матрац будет использоваться, воздух должен идти непрерывно.

5) Использование диска переключения давления

Поворот диска налево делает матрац мягче, направо - жёстче. Когда матрац мягче пациент чувствует себя более комфортно. Хотя при лечении пролежней рекомендуется жёсткий матрац.

6) Пациент чувствует холод

Положите грелку под матрац, чтобы удержать тепло.

4. ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Типы поломок		Проблемы	Методы починки
Матрац не надувается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Присоединить ее
		Матрац проколот	Заклейте прокол
	Индикатор выключен	Не подключено питание	Подключите питание
		Перегорел предохранитель	Замените его
Матрац надувается не полностью	Матрац очень мягкий	Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрац трещит	Разверните его и вымойте
		Воздушный фильтр запылен из-за долгого использования	Продуйте его
	Насос шумит	Винты на воздушном насосе не затянуты	Затяните их

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прежде, чем перемещать или ремонтировать насос отключите его от сети!

- 1) Матрац должен находиться на сухом месте. Избегайте попадания пыли и воды.
- 2) Избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- 3) Перед тем как мыть матрац его необходимо надуть. Дезинфицирующее средство должно содержать лакмус.

Пожалуйста, используйте в качестве антисептика 75% спирт.

- 4) После длительного использования (3 месяца), воздушный фильтр должен быть прочищен:

1. Отвинтите заднюю крышку насоса
2. Вытащите фильтр из насоса;
- 5) Вымойте под краном, если же пыль остается, используйте мягкую щеточку. Будьте аккуратны, чтобы не испортить фильтр.
- 6) После того, как фильтр высох, установите этому обратно в насос и закрутите винты.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Температура: от - 40С до + 55С


Влажность: 10% – 93%

Среда: 860hpa – 1060hpa

В хорошо вентилируемом помещении.

При транспортировке будьте осторожны: избегайте влажности и тряски.

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

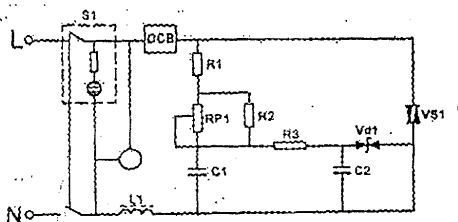

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Матрас противопролежневый соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00925 от 27.12.2007 г

Произведено: Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co. Ltd., Dangui Rd. Economikal Development Dist. Danuang, 212310, Jiangsu, China

«Цзянсу Юйюе Медикал Эквипмент энд Сьюпли Ко. Лтд.», Дангуи Рд., Экономикал Девелопмент Дист. Даньянг, 212310, Джиангсу, Китай

Импортер: ООО «ОПОРА»

630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Северная, д. 5, пом. №1

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента

Сервисный центр:

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров

Моск. обл., г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02



Обратитесь к Руководству по эксплуатации



Не выбрасывать!
Специальные условия утилизации



Хрупкий груз



Беречь от влаги



Верх



Возможная вторичная переработка упаковки



Изделие класса II



Изделие типа B



Перед использованием обратитесь к Руководству



Евразийское соответствие