

**Паспорт**  
**Стол инструментальный  
и манипуляционный**  
**СИМ 3**

**7. Адрес изготовителя:**

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.28 пом.34  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru



Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик\_\_\_\_\_

**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

**г. Дзержинск.**

## **1. Назначение и конструкция.**

- 1.1. Столик инструментальный СИМ 3 предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов.
- 1.2. Разборный каркас столика выполнен из металлической трубы с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

## **2. Основные технические характеристики.**

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	длина	
810	450	540	26

## **3. Комплект поставки.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
3.1	Стекло и/или металл + рамка	3
3.2	Стойки	2
3.3	Опора колесная	4
.4	Крепежные элементы	набор
3.6	Паспорт	1
3.7	Упаковка	1

## **4. Инструкция по сборке.**

**Сборка должна производиться квалифицированным специалистом.**

- 4.1 Распаковать компоненты столика.
- 4.2 Соединить стойки 3.2 с рамами 3.3 при помощи крепежных элементов.
- 4.3 Ввернуть в ножки каркасов колеса 3.3
- 4.4 Установить полки в собранный каркас

**Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.**

## **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место долговременного расположения мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°C. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

## **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.