



Руководство по применению:

Cliplight / /Cliplight LED / KaWe DIALIGHT® XL / фонарик диагностический, белый

Уважаемые клиенты, большое спасибо, что Вы приняли решение в пользу изделия фирмы KaWe. Наша продукция известна своим высоким качеством и долговечностью. Настоящее изделие фирмы KaWe соответствует определениям директивы EG 93/42/ EWG (директива по медицинским приборам).



Перед использованием прочтите тщательно и полностью руководство по применению и соблюдайте указания по уходу. Перед применением внимательно ознакомьтесь с правилами пользования.

Сохраните данное руководство по применению и при смене пользователя передайте его вместе с устройством.

Применение:

Использовать фонарики диагностические разрешается только специально обученному и допущенному персоналу.

Назначение:

Фонарики диагностические являются вспомогательным средством для освещения места обследования напр. полости рта, поверхности кожи.

Светодиодный диагностический фонарик Cliplight LED разрешается использовать для осмотра глаз (оценка безопасности в соответствии с международным стандартом DIN EN 62471: 2009-03 (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем).

Эксплуатация:

Фонарик диагностический Cliplight: Включение происходит путем нажатия на клипсу до контакта с

металлическим кольцом на штифте. Замена батареек путем отвинчивания металлического держателя лампы.

Фонарик диагностический KaWe DIALIGHT® XL:

Включение и выключение путем передвижения ползункового переключателя вкл/выкл. Для замены лампы или батареек (батарейки не входят в объем поставки) отвинтить головку от рукоятки.

Фонарик диагностический, белый: Включение и выключение путем нажатия на черный кнопочный выключатель. Для замены лампы или батареек отвинтить черную часть клипсы.

Использование не по назначению/противопоказания для изделия:

Иное или выходящее за рамки предназначения применение считается не соответствующим назначению. За возникающие вследствие этого последствия производитель ответственности не несёт.

Диагностические фонарики Cliplight, DIALIGHT® XL и фонарик диагностический, белый запрещается использовать для осмотра глаз.



Предостережения:

Никогда не погружайте фонарик в жидкость. Не допускайте прямого контакта с языком и слизистой оболочкой.

При осмотре полости рта следите за тем, чтобы фонарик не упал в полость рта. Существует опасность удушья!

При наличии видимых повреждений фонариков запрещается применять в клинических целях.



Диагностические фонарики Cliplight, DIALIGHT® XL и фонарик диагностический, белый запрещается использовать для осмотра глаз.

Гарантия:

При правильном использовании и соблюдении нашего руководства (указаний) по применению, мы предоставляем 2 года гарантии со дня продажи (гарантия не распространяется на лампы накаливания и аккумуляторы). При возникновении вопросов или в случае возможного ремонта, обратитесь к Вашему продавцу в сети специализированной торговли!

Ограничение регенерации:

Никаких особых требований. Рекомендуем регенерацию инструмента производить сразу после его применения.

Хранение и транспорт:

Храните инструмент в упаковке, чтобы избежать загрязнений и попадания пыли. Обратите внимание, что при падении лампа может разбиться.

Очистка:

Поверхность фонариков можно очистить влажной или сухой салфеткой.

Дезинфекция:

Для дезинфекции фонариков салфетку можно слегка смочить спиртом.

Стерилизация:

Стерилизация не возможна.

Контроль и проверка функции:

Перед применением произвести визуальный контроль фонарика.

Дополнительные сведения:

Изделие утилизируется в специальных пунктах по отдельной утилизации электрических и электронных приборов.

Общие принадлежности:

Дополнительную информацию по данному изделию Вы найдете на нашем сайте: www.kawemed.de.

Производитель:

Kirchner & Wilhelm GmbH & Co. KG
Eberhardstraße 56 | DE-71679 Asperg

Контакт с производителем:

Адрес или номер телефона продавца в сети специализированной торговли или наберите +49-7141-68188-0.

Значение символов:

	Производитель
	Дата изготовления
	Партия товара
	Соблюдать руководство по применению
	Внимание!
	Дифференцированный сбор электрических и электронных приборов
	Утилизация отработанных батареек и аккумуляторов в пунктах приёма
	Соответствие изделия ЕС требованиям



- de** Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.
- en** All information is without guarantee and subject to change.
- fr** Informations sous toutes réserves – Sous réserve de modifications.
- it** Tutte le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia e possono essere modificate.
- es** Toda la información sin compromiso. Nos reservamos el derecho de realizar cambios.
- pt** Todas as indicações entendem-se sem compromisso – Sujeito a alterações sem aviso prévio.
- ru** Информация представлена без гарантий любого рода – оставляем за собой право вносить изменения.



KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
Eberhardstr. 56 • 71679 Asperg • Germany

Zentrale / Central office

Fon: +49 -7141-68188-0
Fax: +49 -7141-68188-11
Email: info@kawemed.de
Internet: www.kawemed.de