

ПАСПОРТ

Ветеринарный стол СВ-29



wiki⁺vet
СДЕЛАНО В РОССИИ

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
2. ОПИСАНИЕ.....	5
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.....	8
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ..	9
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ.....	9
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	11
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.....	11

Ветеринарный стол СВ-29 с дверцами

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Стол ветеринарный СВ-29 (далее изделие) предназначен для проведения осмотров, а также эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных.

2. ОПИСАНИЕ

2.1. Изделие соответствует требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2. Каркас изделия изготовлен из стальных профильных труб квадратного сечения с нанесением защитно-декоративной порошковой краски.

2.3. Стол также может использоваться для осмотра животных.

2.4. Материал столешницы - прочный полипропилен. Две опускающиеся створки - помогают проводить врачебные манипуляции.

2.5. Вырезы в столешнице облегчают проведение процедур с аппаратами, которые имеют провода (УЗИ-сканеры, кардиографы).

2.6. Высота стола регулируется электроприводом. Электропривод приводится в действие педали. Для увеличения высоты столешницы нажмите на сторону педали «UP» и удерживайте до тех пор, пока столешница не поднимется на необходимый уровень. Для уменьшения высоты стола нажмите на сторону педали «DOWN» и удерживайте пока столешница не опустится на необходимый уровень.



Рис. 1 Педаль управления

2.7. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице ниже

Длина стола, мм	1300-1450
Ширина стола, мм	750
Высота стола, мм	550-970
Масса стола, кг	~ 53,90
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100

3.2. Наружные поверхности стола устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенной к обработке поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с изделием допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной площадке.

4.3. Перед использованием необходимо убедиться в устойчивости изделия.

4.4. При эксплуатации запрещается нагружать изделие весом, превышающем значение, установленное в настоящем паспорте.

4.5. Запрещается эксплуатация неисправного изделия

4.6. Запрещается внесение изменений в конструкцию изделия

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляется в разобранном виде в составе

№	Наименование	Количество, шт	Изображение
1	Стол ветеринарный для УЗИ wikiVET СВ-75 с дверцами	1	
2	Паспорт	1	-

6. УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

6.1. После транспортировки изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях не менее 2х часов.

6.2. Изделие поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. После транспортировки стола, при отрицательной температуре окружающей среды, запрещается включать стол в электрическую сеть в течение пяти часов, чтобы электрооборудование успело прогреться до комнатной температуры, а сконденсированная влага могла испариться

7.2. Покрытие из нержавеющей стали допускает проведение влажной уборки. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование для уборки хлорсодержащие растворы и моющие средства, содержащие абразивы.

ВАЖНО: средства, изготовленные на основе хлора, вызывают коррозию металлических поверхностей.

РЕКОМЕНДУЕМ следующие вещества: пероксид, дезоксан, секусепт, перекись водорода, ПВК.

7.3. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений.

7.4. Запрещается допускать на рабочую поверхность стола нагрузку, превышающую допустимую.

7.5. Обслуживание изделия включает в себя периодическую подтяжку крепежных элементов и регулирование высоты стоек (ножек) при переустановке изделия на новое место.

7.6. Температурный режим эксплуатации от +10 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Стол транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

8.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги.

8.3. Транспортировка и хранение стола без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность стола. Повреждения стола, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

8.4. Хранение изделия должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

9.1. Стол не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

9.2. Утилизация стола осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличия гарантийного талона с отметкой торгующей организации о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

10.2. Потребитель лишается права продажи в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия по вине потребителя
- при несоблюдении пунктов 4, 7, 8 настоящего паспорта.
- при отсутствии паспорта изделия и при его не правильном заполнении.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделий изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ветеринарный стол СВ-29 соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____ / _____ /20 ____ г.

Подпись ответственного за приемку _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие
медицинской
техники
(наименование
и тип)

Ветеринарный стол СВ-29

Серийный
номер

Производитель: ООО «МПО МТП РУС»

155523, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Д. Бедного, д. 31, офис 2

Контакты: + 7 (499) 110 52 38, opt@wikizoo.ru

Дата продажи ____ / _____ /20 ____ г.

М.П. _____

(подпись, штамп торгующей организации)