

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется организацией, вводящей изделие в эксплуатацию

Стол _____

обозначение

Серийный номер _____

Дата выпуска _____

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____

число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____

подпись

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Стол: _____

обозначение исполнения

Дата изготовления: _____

месяц, число

Серийный номер _____

Стол изготовлен, упакован и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 и признан годным для эксплуатации.

ООО Медицинская Компания «АСК»



СТОЛ

СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00;
СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06

Паспорт

СК.00.00.2014.ПС.01

г. Нижний Новгород

версия 1.1

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.....	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ.....	8

5.3. Утилизация


- 5.3.1 Утилизация изделия осуществляется после завершения срока эксплуатации изделия, а также в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными.
- 5.3.2 Утилизация изделий производится в соответствии с установленными нормами и правилами, включая требования местных организаций и правила утилизации в данном регионе.
- 5.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

5.4. Гарантии изготовителя

- 5.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- 5.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
- 5.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д. 60, пом. № 1, ООО МК «АСК».

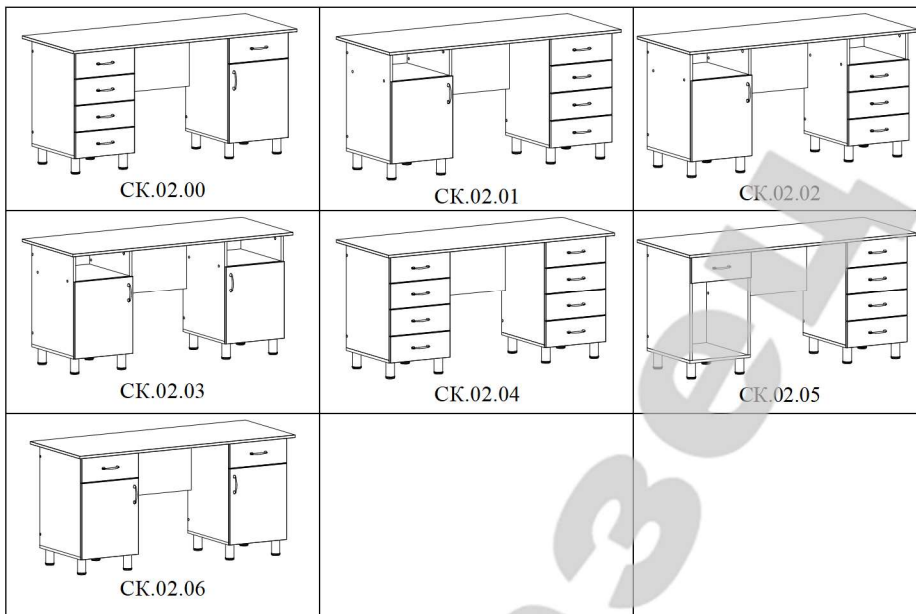

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Срок службы

5.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

5.2. Условия транспортирования и хранения

5.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности воздуха не более 100% при температуре плюс 25°С.

5.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Наименование изделия: Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06

Изделие выпускается по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014 в составе исполнений:

I. Набор мебели для медицинских кабинетов;

II. Набор мебели для медицинских палат

медицинского изделия «Набор мебели для медицинских кабинетов и палат по ТУ 32.50.30-003-68690950-2014».

Регистрационное удостоверение РЗН 2024/23329 от 08.08.2024г.

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Юлиуса Фучика, д.60, пом. №1.

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 Специфичное назначение изделия:

Таблица 1

<p>Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06</p>	<p>Предназначено для проведения медицинских осмотров, медицинских процедур и медицинских манипуляций, размещения медицинских расходных материалов, медицинских изделий, проб биоматериалов пациента, медицинских приборов и аппаратов в процедурных, перевязочных, смотровых, диагностических и терапевтических кабинетах, больничных и реанимационных палатах медицинских организаций</p>
---	--

2.4 Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2.5 Климатическое исполнение - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.7 Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444:

- группа 1:

- Стол: СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

3.1 Не допускайте воздействия на изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

3.2 Не проводите и не ударяйте по поверхностям изделия острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

3.3 Не допускайте эксплуатацию изделий с поврежденными поверхностями. В случае повреждения целостности покрытия поверхности или кромки детали изделия (скол, отслоение, порез, вздутие), такую деталь следует заменить.

3.4 Во избежание опрокидывания изделия не рекомендуется открывать все двери и выдвигать все выдвижные ящики одновременно (при их наличии), а также опираться на открытые двери и выдвинутые ящики.

3.5 Не допускайте в помещении-месте размещения изделия высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

3.6 Не допускайте раскачивания изделия.

3.7 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

3.8 Не допускайте превышения номинальных нагрузок на изделие.

3.9 Соблюдайте требования символов и знаков, нанесенных на маркировке.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Основные технические характеристики и конструктивные особенности изделия приведены в

Таблице 2.

Таблица 2.

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
Стол				
СК.01.02	1300x600x750	42	столешница-70; ящик-5	Стол с тумбой - четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.04	1300x600x750	34	столешница-60; ящик-5	Стол с двумя ящиками под столешницей; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.05	1300x600x750	35	столешница-70; ящик-5	Стол с тумбой – ящик, ниша; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.06	1300x600x750	40	столешница-70; полка-15	Стол с тумбой – ниша, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.07	1300x600x750	40	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с тумбой – ниша, три выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.01.08	1300x600x750	39	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с тумбой – ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.00	1500x600x750	55	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с двумя тумбами - четыре ящика; ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.01	1500x600x750	56	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.02	1500x600x750	58	столешница-70; полка-15; ящик -5	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; ниша, три ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.03	1500x600x750	52	столешница-70; полка-15	Стол с двумя тумбами - ниша, дверка, внутри полка; ниша, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры

Наименование, исполнение	Габаритные размеры, мм, Ш×Г×В	Масса, кг не более	Номинальная нагрузка, кг, ±0,2 кг	Конструктивные особенности
СК.02.04	1500x600x750	60	столешница-70; ящик -5	Стол с двумя тумбами - четыре выдвижных ящика; четыре выдвижных ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.05	1500x600x750	55	столешница-70; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ящик, ниша; четыре ящика; устанавливается на регулируемые опоры
СК.02.06	1500x600x750	55	столешница-70; полка-15; ящик-5	Стол с двумя тумбами - ящик, дверка, внутри полка; выдвижной ящик, дверка, внутри полка; устанавливается на регулируемые опоры

* - габаритные размеры изделий приведены без учета принадлежностей.

4.2 Изделия установлены на опоры, согласно таблице 3, обеспечивающие устойчивость изделий на твердой горизонтальной поверхности пола. Регулируемые опоры имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Таблица 3.

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение исполнения	Опоры		
			Колесные опоры, диаметр колес, мм допуск ± 3 мм	Регулируемые опоры	Нерегулируемые опоры
1	Стол	СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06	-	+	-

4.3 Общие виды изделий показаны в таблице 4.

Таблица 4. Стол СК.01.02; СК.01.04; СК.01.05; СК.01.06; СК.01.07; СК.01.08; СК.02.00; СК.02.01; СК.02.02; СК.02.03; СК.02.04; СК.02.05; СК.02.06

