

**ООО «Горское»**

142400, г. Ногинск Московская область, ул. 200 лет города, дом 2  
Тел: 8-800-444-06-65 e-mail: info@gorskoye.com

**Паспорт**

**Стол для перевязок, процедур и перевозки больных  
внутрикорпусные СПП VLANA  
ТУ 32.50.50-003-91587838-2017**

**Вариант исполнения СППг VLANA**



Год выпуска 2022г

## Стол с гидроприводом для перевязок и процедур СППг VLANA

ТУ 32.50.50-003-91587838-2017

Зав. № \_\_\_\_\_

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

**1.1** Стол для перевязок и процедур СППг VLANA предназначен для проведения осмотров, малых хирургических операций, различных видов медицинских процедур, для проведения перевязок.

### 2. Устройство и принцип работы.

2.1 Стол состоит из каркаса, трех-секционного ложа, подлокотников и механизмов для изменения высоты, угла наклона секций.

2.2 Каркас стола выполнен из стальных труб, покрытых порошковым полимерным покрытием. На каркас крепится ложе стола, изготовленное из многослойной фанеры, пенополиуретана и покрытого искусственной кожей.

Ложе состоит из: подголовника, спинной, ножной секций и двух подлокотников.

2.3 Регулировка подголовника и ножной секции осуществляется бесступенчато при помощи пневмопружины.

2.4 Угол наклона спинной секции осуществляется дискретно при помощи механизма «растомат».

2.5 Высота подъема стола меняется с помощью гидравлического привода с ножной педалью регулировки.

2.6 Подлокотники регулируются по высоте и устанавливаются по бокам ложа или возле подголовника методом поворота.

2.7 Основание стола устанавливается на четыре поворотных колеса Ø 100 (125, 150, 200мм по запросу) мм, 2 из которых с тормозом.

2.8 В углах стола крепятся пластиковые бамперы-отбойники.

2.9 Комплект поставки стола:

- каркас стола с установленным на нем комплектом гидропривода, мягкими элементами ложа (подголовник, спинная, ножная секция, подлокотники)– 1шт;
- колеса Ø 100 мм -4 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- инструкция по сборке-1 шт.;

Дополнительные принадлежности (по запросу):

- штатив для вливаний- 1 шт.;
- подколенные упоры для гинекологических процедур -2 шт.;
- табурет врача- 1шт;
- стул врача- 1 шт.;
- подставка под таз в комплекте с тазом -1 шт.;
- подставка под таз в комплекте с двумя тазами -1 шт.;
- держатель рулонных полотенец- 1 шт.;
- колеса Ø 125, 150 или 200 мм.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Масса стола - не более 70 кг без навесных приспособлений.

3.2 Размеры стола

Габаритные размеры стола, мм:

- общая длина стола с бамперами-отбойниками 2060 (±10) мм;
  - общая ширина стола с бамперами-отбойниками 730 (±10) мм;
  - длина ложа - 1960±10 мм; ширина ложа - 600±10мм; высота – 450 (±10) ..940 (±10) мм;
  - длина подголовника 440 ±10 мм; ширина подголовника 600±10 мм;
  - длина спинной секции 950±10 мм; ширина спинной секции 600±10 мм;
  - длина ножной секции 520±10 мм; ширина ножной секции 600±10 мм;
  - длина подлокотников 480±10 мм; ширина подлокотников 150±5 мм;
- 3.3 Угол наклона подголовника изменяется бесступенчато от 0° до +45°.
- 3.4 Угол наклона спинной секции меняется дискретно от 0° до +80°.
- 3.5 Угол наклона ножной секции меняется бесступенчато от 0° до +45°.
- 3.6 Ход регулировки по высоте передних подлокотников стола 230 мм. По углу поворота подлокотники регулируются на 180°.
- 3.7 Стол при горизонтальном положении выдерживает равномерно-распределенную нагрузку до 200 кг.
- 3.8 Стол имеет четыре поворотных колеса диаметром 100 мм (125, 150, 200 мм по запросу), два из них с тормозом.
- 3.9 По углам стола в ножной и головной части крепятся полиэтиленовые бамперы-отбойники
- 3.10 Наполнитель обивки - пенополиуретан толщиной не менее 40 мм.

### 4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 32.50.50-003-91587838-2017, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4.3 Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска:

Штамп производителя

Срок эксплуатации 6 лет

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие