


Рисунок 1 Штатив для длительных инфузионных вливаний ШВ – «Ока-Медик»

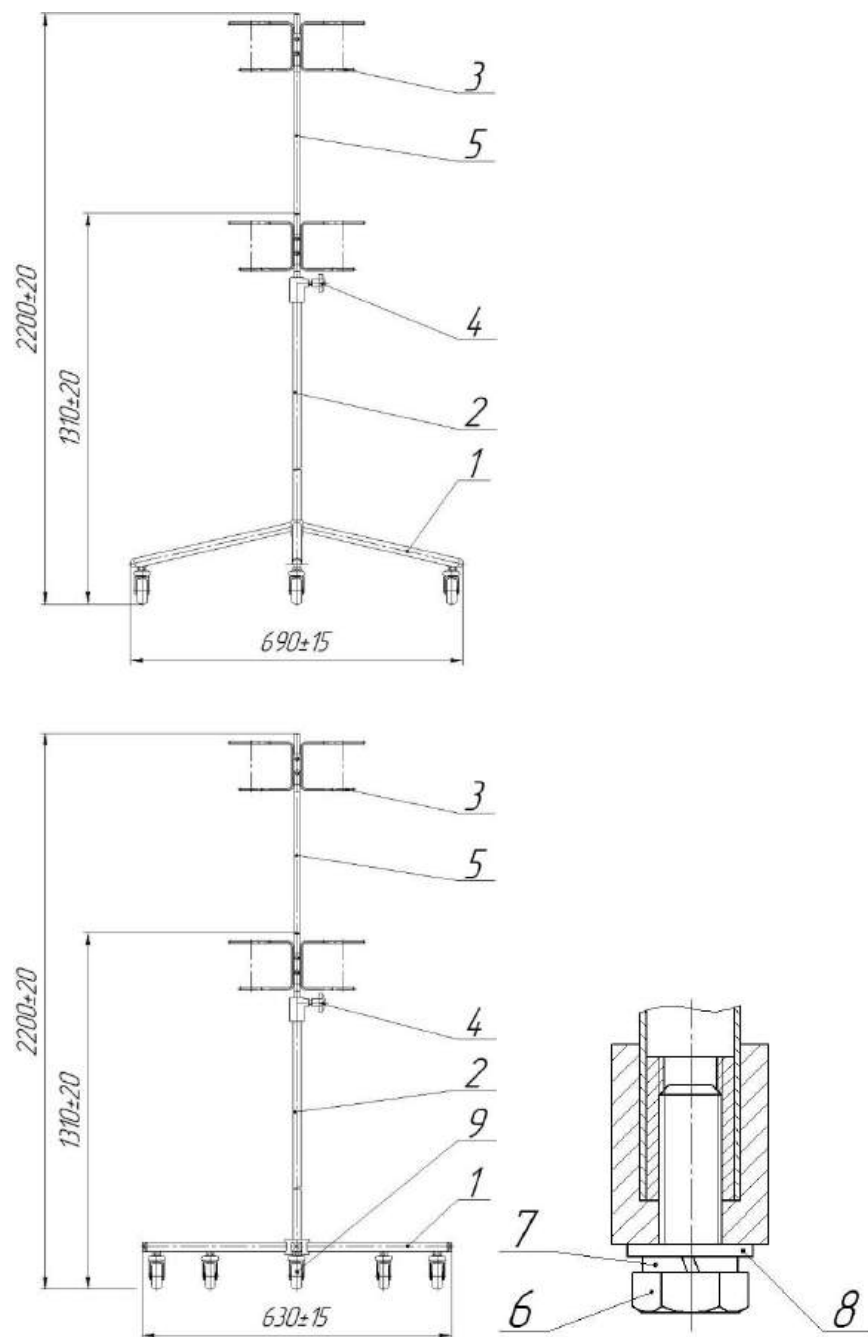

ООО «Производственное предприятие Ока-Медик»

**Штатив для длительных инфузионных вливаний
ШВ-«Ока-Медик» по ТУ 9452-005-70373441-2008,
вариант исполнения: ШВ2-03, ШВ2-05**



Сертифицировано ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

607100, г. Навашино, Нижегородской области,

ул. Дорожная, 13

8(83175) 5-65-15, 5-65-15

Okamedik2006@yandex.ru

okamedik.ru

1. Технические данные, комплектность, порядок работы.

- 1.1 Технические данные:
1.2 Габаритные размеры штативов (см. рисунок)
1.3 Усилие для фиксации держателя флаконов или штока (в зависимости от модели), кгс – 8
1.4 Допустимая нагрузка на каждое кольцо не более, кг – 2
1.5 Максимальная вертикальная нагрузка на штатив, кг – 12
1.6 Масса штатива не более, кг – 5
1.7 Средний срок службы до списания, лет – 5

2. Комплектность

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол -во
	Штатив для длительных инфузионных вливаний	ШВ – «Ока-Медик»	1
Состав штатива			
1	Основание	ШВ1.03 или (05)	1
2	Стойка	ШВ1.03 или(05)	1
3	Держатель	ШВ1или(02,03,04).03или(05)	1
4	Фиксатор	ШВ1.03	1
5	Шток (только для телескопического варианта)	ШВ1.05	1
6	Колесо		5
7	Болт М6		1
8	Шайба гравёр 6		1
9	Шайба 6		1
10	Паспорт	ШВ1.03или(05) ПС	1

3. Порядок работы

- 3.1 Сборка штатива.
3.1.1 Освободите все детали от упаковочного материала, потрите их и убедитесь в их целостности.
3.1.2 Вставьте стойку (2) в основание (1) и закрепите болтом (6) с шайбами (7,8). Для не телескопических штативов – оденьте держатель (3) с фиксатором (4) на стойку (2), установить колёса (9).
3.1.3 Перед эксплуатацией штатива проведите санитарную обработку с соответствующими НТД утвержденными МЗ РФ.
3.1.4 Высота держателя (3) регулируется при помощи фиксатора (4) по средствам ослабления или затягивания фиксирующего винта.
3.2 Меры безопасности
3.2.1 Запрещается использование штатива с неисправным фиксатором (4), основанием (1), стойкой (2), держателем (3).
3.2.2 Запрещается регулировка высоты держателя в время вливания.

4. Упаковка, гарантии изготовителя.

- 4.1 Штативы упаковываются в картонную тару по одному или группой. Допускается упаковывать основания, держатели и стойки отдельно друг от друга.
4.2 Штативы в упаковке изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от -50 С до +40 С и относительной влажности 98% при +25 С, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
4.3 Штатив может транспортироваться любыми видами закрытого транспорта.
4.4 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. Но не позднее 6 месяцев со дня получения изделия потребителем. Рекламации на штатив и его части, подвергнутые ремонту самостоятельно потребителем, предприятие изготовитель не удовлетворяет.

5. Свидетельство о приемке.

Штатив для длительных инфузионных вливаний ШВ – «Ока-Медик»

(число, месяц, год)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией ТУ 9452-005-70373441-2008 и признан для эксплуатации.

Контролер ОТК.

Мастер (нач. цеха)

(личная подпись)

(личная подпись)

Корешок талона на гарантийный ремонт ШВ

(подпись)

(Дата заполнения талона)

Линия отреза

ООО Производственное предприятие «Ока-Медик» 607100, г. Навашино Нижегородская обл. ул. Дорожная 13. т. 8(83175) 5-54-84;5-65-15.

Талон №

На гарантийный ремонт Штатива для длительных инфузионных вливаний ШВ – «Ока-Медик»

Продан

(дата изготовления)

наименование

торгующего предприятия

М П

Торгующего предприятия

(подпись продавца)

Владелец и его адрес

(подпись)

(дата заполнения)