



Стол приборный модульный СПМ-30

Паспорт
СПМ-30.00.000 ПС

1. Назначение

Стол приборный модульный СПМ-30 (в дальнейшем – стол) предназначен для размещения приборов, приспособлений и другого оборудования, используемого в поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях.

2. Комплектность поставки

п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Стол СПМ-30	1
2	Стекло*	1
3	Колесо Ø 75 мм	2
4	Колесо с тормозом Ø 75 мм	2
Эксплуатационная документация		
5	Паспорт	1

*Комплектуется по согласованию с заказчиком

3. Основные технические характеристики

3.1. Основные детали стола выполнены из листового металла. В нижней части стола установлен блок с розетками. Для его питания установлена рулетка с вилкой, выходящая с правой стороны стола. Равномерно распределенная нагрузка: на верхнюю полку – 5 кг, на среднюю и нижнюю полку – 10 кг.

3.2. Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное покрытие порошковой, эпоксидно-полиэфирной краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания согласно МУ-287-113. При обработке рекомендуется применять способ двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе одного из следующих дезинфицирующих средств 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства («Прогресс», «Лотос»)

3.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

3.4. Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

3.5. Основные параметры и размеры.

3.5.1. Габаритные размеры:

ДхШхВ – 510х520х786 (±4 мм)

3.5.2. Диаметр колесных опор: 75 мм.

3.5.3. Масса: 27 ± 2,7 кг.

4. Устройство и сборка

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию.

Четыре самоориентирующихся колеса диаметром не менее 75 мм из серой немаркой резины (2 из них с тормозом), устанавливаются в основание стола.

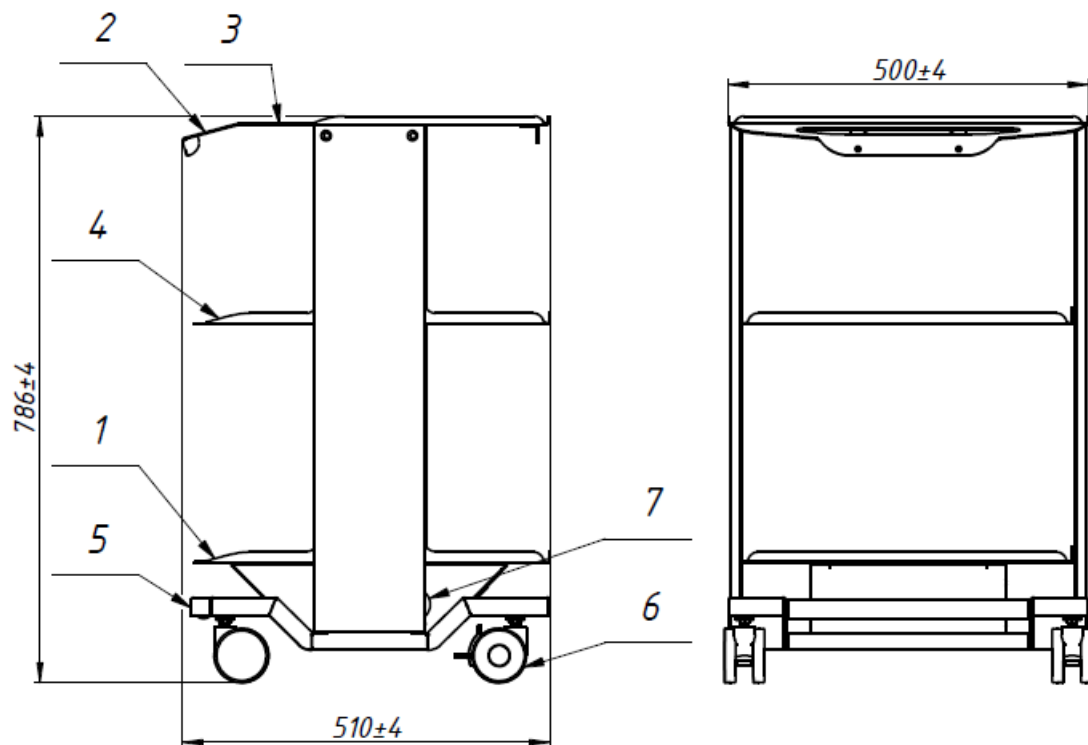


Рисунок 1

1. Полка нижняя; 2. Полка верхняя; 3. Стекло*; 4. Полка средняя; 5. Основание; 6. Колесо ø75мм. 7. Вилка.

4.2. Сборка

4.2.1. Распаковать и проверить целостность покрытия.

4.2.2. Проверить комплектность.

4.2.3. Сборку рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

- Снять защитную пленку со стекла* (поз.3) и установить на верхнюю полку (поз.2).

- Вкрутить колеса (поз.6) во втулки, находящиеся на основании (поз.5).

*Комплектуется по согласованию с заказчиком

5. Меры предосторожности (противопоказания) при применении изделия

5.1. К сборке и эксплуатации допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации, описание и конструкцию изделия.

ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.

После хранения в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях изделие можно включать в сеть не раньше, чем через 2 часа пребывания при комнатной температуре.

Запрещено использование в местах с влажностью выше 80%.

Запрещается вставлять и вынимать сетевой шнур в розетку мокрыми руками.

Все работы по обслуживанию и ремонту производить только после отключения прибора от питающей сети.

6. Срок службы (годности) и указание на запрет использования изделия по истечении срока службы (годности)

6.1. Средний срок службы до списания не менее 5 лет. Предельное состояние - состояние, при котором восстановление работоспособности невозможно или экономически нецелесообразно.

7. Условия хранения

7.1. Изделие транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 16371 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки - контейнерами и мелкая отправка.

7.2. Изделия должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и влажности от 45 до 70%.

7.3. Изделие обёрнуто влагонепроницаемым материалом.

8. Требования к применению и эксплуатации изделия

8.1. Изделие соответствует условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

9. Техническое обслуживание

9.1. Изделие имеет простую надежную конструкцию и не требует специального технического обслуживания.

9.2. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений.

9.3. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их.

10. Порядок осуществления утилизации

10.1. Утилизация мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, осуществляется через организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

10.2. Утилизацию мусора и отходов, которые образуются при использовании изделия, производят в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

10.3. Утилизация изделий, для которых закончился срок хранения, должна проводиться в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления».

11. Гарантии изготовителя

11.1. При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу изделия на протяжении гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи, гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с момента выпуска изделия.

12. Свидетельство о приемке

Стол приборный модульный СПМ-30

серийный номер _____

Дата выпуска _____ М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

13. Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование и тип изделия _____

Дата выпуска _____ № _____

Приобретено _____

Заполняется торгующей организацией

Производитель: АО «СКБ СО и Э»

Юридический адрес: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Революционная 57А, оф.12.

Адрес производства: Россия, 400002, г. Волгоград, ул. Электросовская 70а, 70б, 70л.

Вы можете оставить отзыв или задать интересующие вас вопросы, заполнив форму по QR-коду:

